

# Compact 8



## Caratteristiche e funzionalità avanzate

# Indice

<b>Introduzione .....</b>	<b>1</b>
1.1 Informazioni su questo documento.....	1
1.2 Cosa c'è nella confezione .....	2
1.3 Panoramica del dispositivo.....	2
<b>Configurare Compact 8.....</b>	<b>7</b>
2.1 Collegare i cavi .....	8
2.2 Caricare la batteria .....	9
2.3 Accendere Compact 8 .....	10
2.4 Istruzioni di configurazione software .....	11
<b>3. Usare il Touc screen .....</b>	<b>13</b>
3.1 Modalità Semplificata e Modalità Avanzata .....	14
3.2 Operazioni di base.....	16
3.3 Barre dei pulsanti .....	19
3.4 Struttura del Menù principale .....	21
<b>4. Lavorare con Compact 8.....</b>	<b>24</b>
4.1 Leggere usando la Telecamera per documenti .....	24
4.2 Visualizzare oggetti a breve distanza .....	25
4.3 Ingrandire l'immagine mostrata dalla telecamera.....	25
4.4 Scorrere per vedere più porzioni di un'immagine. ....	26
4,5 Cambiare la modalità colore .....	27
<b>5. Scattare istantanee.....</b>	<b>29</b>
5.1 Chiudere un'istantanea .....	30
5.2 Modificare un'istantanea .....	31

5.3 Salvare un'istantanea .....	31
5.4 Aprire un'istantanea salvata .....	32
5.5 Eliminare le istantanee .....	34
<b>6. Personalizzare l'aspetto .....</b>	<b>36</b>
6.1 Colore .....	38
6.2 Linea .....	41
6.3 Sensibilità alla luce .....	42
6.4 Effetti per i contorni .....	42
6.5 DALTONISMO .....	49
<b>7. Cambiare le impostazioni di sistema .....</b>	<b>50</b>
7.1 Tema .....	52
7.2 Luci .....	53
7.3 Audio .....	53
7.4 Miracast .....	54
7.5 Standby .....	56
7.6 Lingua .....	56
7.7 Aggiorna .....	57
7.8 Ripristina .....	58
7.9 Informazioni .....	59
<b>Uffici Optelec .....</b>	<b>61</b>



# Introduzione

Vi ringraziamo per aver scelto Compact 8 di Optelec. Questo videoingranditore portatile è dotato di un supporto da tavolo per la lettura, o può essere tenuto in mano per la visione di oggetti vicini. La sua dimensione contenuta lo rende ideale per il trasporto, facendone lo strumento perfetto per l'ingrandimento in mobilità. Una comoda custodia viene fornita assieme al dispositivo per proteggerlo durante il trasporto.

Grazie al suo schermo integrato a LED ((Diodi ad emissione di luce) da 8 pollici, potete ingrandire le immagini fino a 30 volte. Potete regolare la visualizzazione delle immagini, sia in tempo reale che istantanee, in base alle vostre preferenze personali, tra cui: filtri di luminosità e colore, combinazioni di colori, linee e maschere ed effetti per i contorni.

Potete far scorrere la visualizzazione sia quando la telecamera si trova nella modalità in Tempo reale, sia dopo aver scattato un'istantanea. Potete mantenere le immagini scattate all'interno del dispositivo, per poi modificarne la modalità colore o il livello di ingrandimento per una migliore visualizzazione.

Potete utilizzare il Wi-Fi per collegare Compact 8 a un televisore o monitor con Miracast.

## 1.1 Informazioni su questo documento

Optelec cerca costantemente di migliorare i propri prodotti e le loro funzionalità. Nel sito Web di Optelec, troverete frequenti aggiornamenti di questo documento.

Queste istruzioni vi aiuteranno a prendere confidenza con le funzionalità del dispositivo. I capitoli sono in ordine di complessità, dalle operazioni di base a quelle avanzate. Inoltre, le informazioni vengono fornite nell'ordine corretto di lettura. Per esempio, vi verrà spiegato prima come preparare e caricare il dispositivo, e solo in

seguito come accenderlo. Le istruzioni sono fornite in un formato accessibile, facile da consultare.

Questo documento è formattato per la stampa fronte retro, su carta formato 21,5 x 28 cm, con le pagine dispari sul fronte (lato destro) e quelle pari sul retro (lato sinistro).

## **1.2 Cosa c'è nella confezione**

Nella confezione troverete quanto segue:


1. Dispositivo Compact 8
2. Custodia protettiva per il trasporto
3. Panno per la pulizia della lente
4. Alimentatore di corrente  
**Nota:** il tipo di alimentatore potrebbe variare a seconda del Paese.
5. Cavo di alimentazione da USB-C a USB-A
6. Documenti di Informazioni all'uso (IFU)—*Compact 8 Installazione ed uso e Compact 8 Sicurezza e manutenzione*

## **1.3 Panoramica del dispositivo**

La parte frontale del dispositivo è quella in cui si trova lo schermo. Dato che il dispositivo è dotato di schermo Touch, non è presente alcun pulsante, eccezion fatta per il pulsante di Accensione.



La seguente illustrazione mostra la parte posteriore del dispositivo, nella quale si trovano le telecamere, le luci ed il supporto integrato. Il pulsante di **Accensione** si trova nella parte superiore.

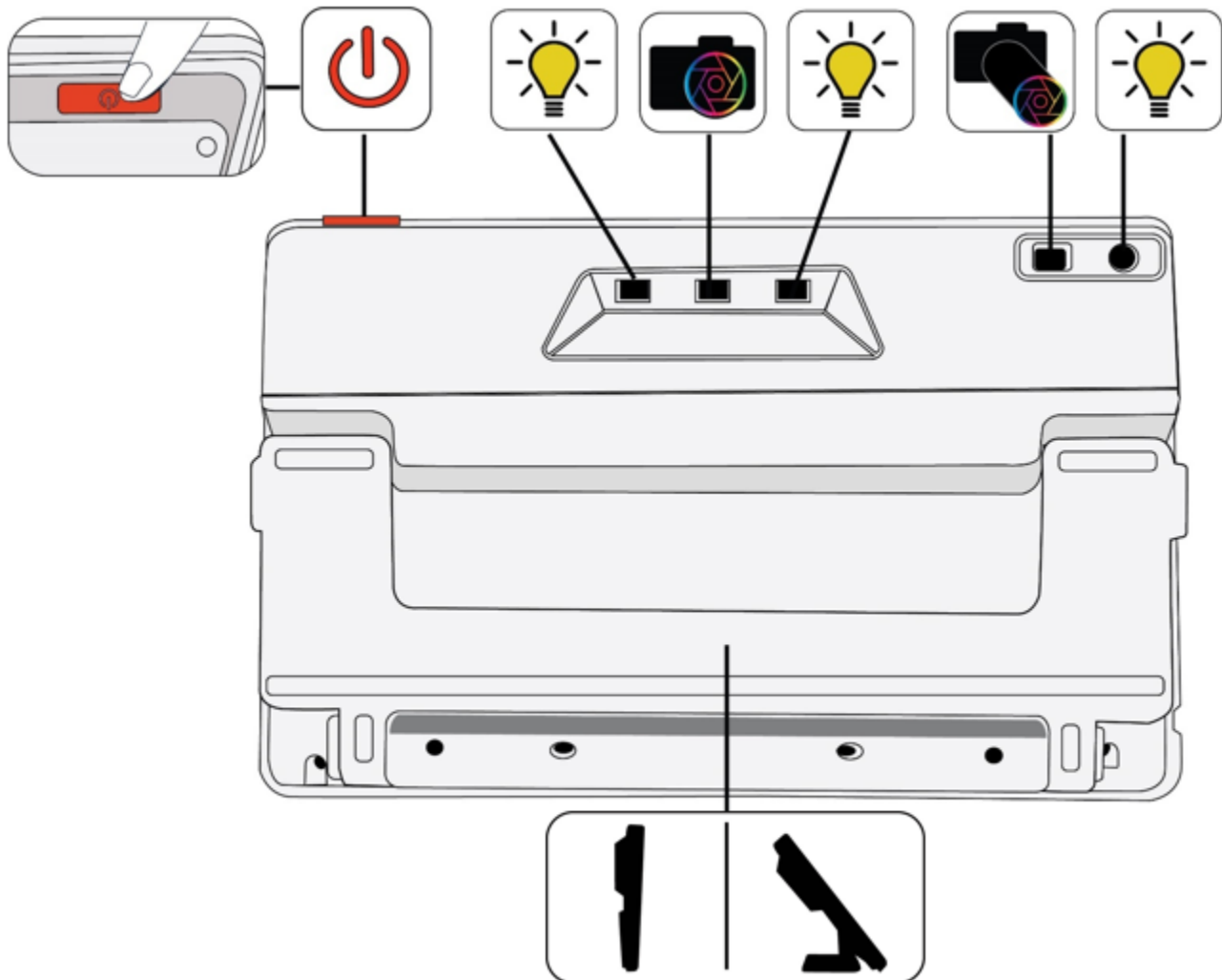

La parte posteriore del dispositivo contiene i seguenti componenti, elencati dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra:

- Pulsante di Accensione/Spegnimento/Standby
- Luce 1 per la telecamera per documenti
- Telecamera per documenti
- Luce 2 per Telecamera per documenti
- Telecamera a distanza



- Luce per Telecamera a distanza
- Supporto integrato


Un suono viene emesso all'accensione, mentre il suono di un otturatore verrà riprodotto quando viene scattata un'immagine. Verrà riprodotto un clic quando viene attivata una funzionalità o viene modificato il livello del volume.

**Nota:** la porta audio sul lato sinistro del dispositivo non a attualmente alcuna funzione.

Il dispositivo non ha alcun tipo di vibrazione o feedback aptico.

### ***Aprire il supporto***

Il supporto deve essere aperto per poter leggere tramite la telecamera per documenti.

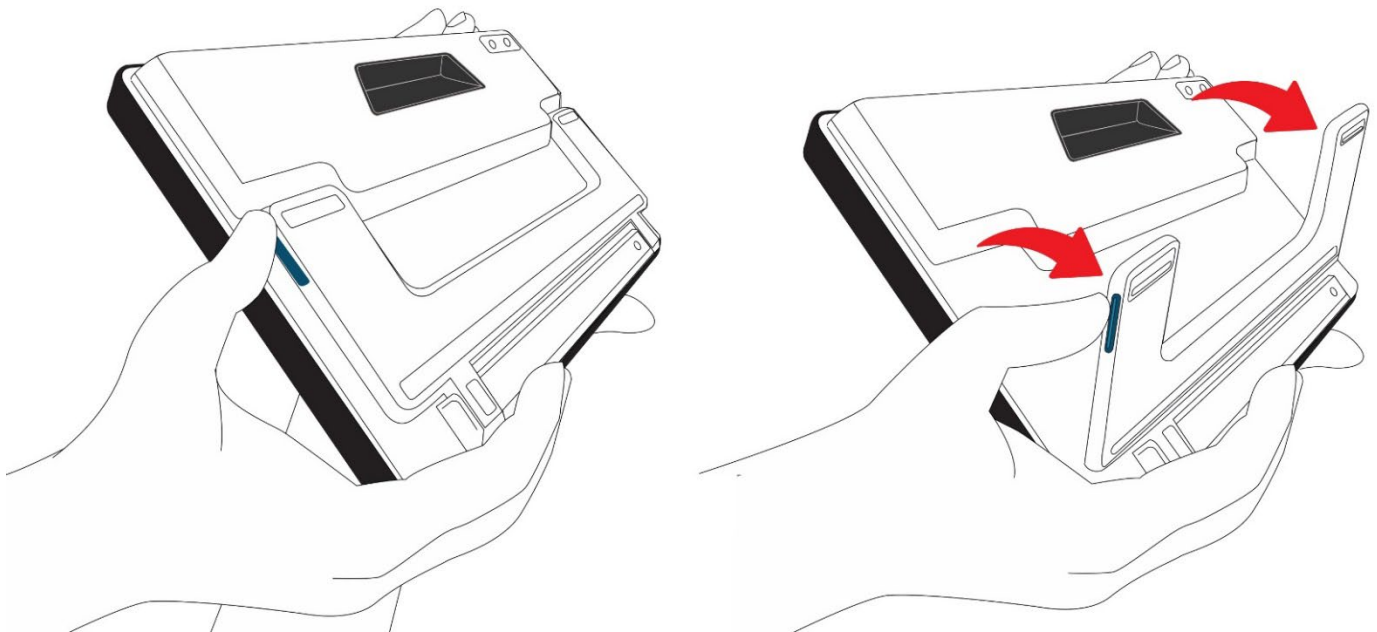


Per aprire il supporto:

1. Tenete il dispositivo in verticale su una superficie piana, con lo schermo rivolto verso di voi.
2. Usate una mano per tenere fermo il dispositivo dall'alto

3. Con il pollice dell'altra mano, premete il pulsante blu mentre ruotate il supporto allontanandolo dallo schermo. Quando sarà completamente aperto, il supporto scatterà automaticamente in posizione.

### **Chiudere il supporto**

per la visione di oggetti a breve distanza, il supporto deve essere chiuso. Per esempio, per visionare un'etichetta o un cartello, dovete chiudere il supporto e tenere in mano il dispositivo.

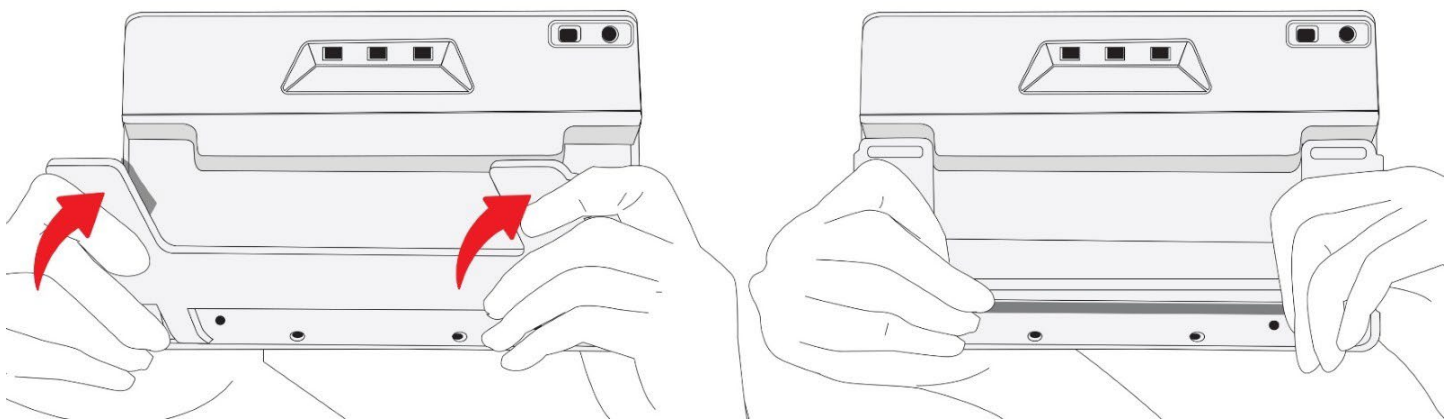

Per chiudere il supporto:


1. Tenete il dispositivo fermo dalla parte inferiore, con lo schermo rivolto verso di voi.
2. Con i palmi dell'altra mano, tenete fermi i lati del dispositivo mentre spingete le gambe verso il corpo sino a quando non si chiudono.

**Attenzione:** quando chiudete il supporto, assicuratevi che le vostre dita si trovino al di fuori dell'area incassata sul retro al fine di evitare che rimangano schiacciate.

# Configurare Compact 8

Togliete il contenuto dalla confezione, quindi prendetevi il tempo per esplorarlo attentamente. Quindi, seguite queste istruzioni per collegare l'alimentatore e caricare completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.



Fate riferimento alla seguente illustrazione per una panoramica del processo di installazione.

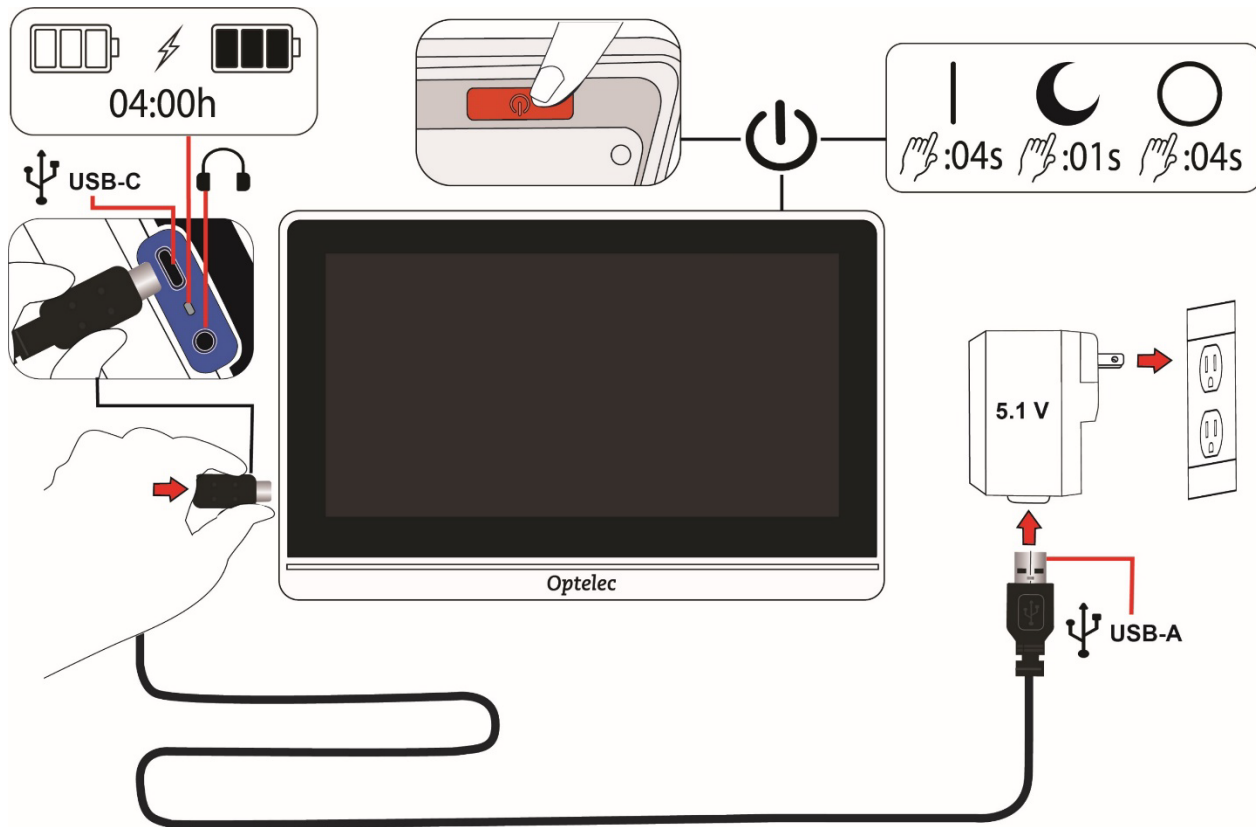

## 2.1 Collegare i cavi

Per collegare il videoingranditore all'alimentazione:

1. Il videoingranditore viene fornito con un alimentatore di corrente e 4 diversi tipi di presa specifici per regione: Europa, Regno Unito, Stati Uniti ed Australia. Fate scivolare l'adattatore di corrente appropriato per la vostra regione nell'alimentatore sino a quando non scatta.
2. Collegate l'estremità USB-C del cavo fornito in dotazione alla porta di connessione USB-C dell'alimentatore.

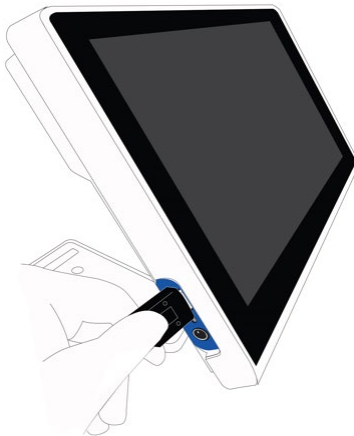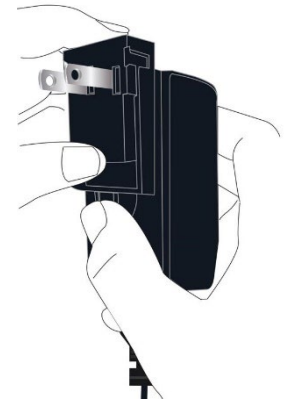


Quando lo schermo è rivolto verso di voi, sul lato sinistro del dispositivo troverete una porta USB-C, una spia di stato e un jack audio non funzionante.

3. Collegate l'estremità USB-A del cavo all'alimentatore di corrente.  
**Attenzione:** per motivi di sicurezza, usate solo il cavo USB-C e l'alimentatore di corrente forniti con il dispositivo per caricare la batteria.
4. Collegate l'alimentatore di corrente ad una presa da muro facilmente accessibile.

**Nota:** si consiglia di avere installato un salvavita nel proprio impianto elettrico per proteggere da temporali o altri eventi che potrebbero causare una sovratensione.

## 2.2 Caricare la batteria

Caricate completamente la batteria prima del primo utilizzo. La ricarica del dispositivo richiede fino a 4 ore. Prima di accendere il dispositivo, attendete che la spia di stato della carica sul lato sinistro del dispositivo sia fissa di colore verde.

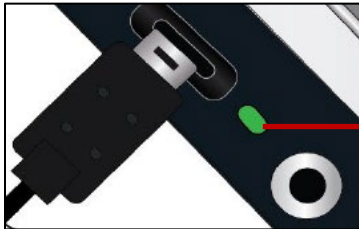

Spia di stato

### ***Ricarica continua***

La batteria può essere caricata continuamente, anche quando l'unità è in funzione. Dato che la batteria non può sovraccaricarsi, potete lasciare il caricabatterie connesso anche mentre usate il dispositivo.

### ***Carica della batteria***

La carica della batteria dura normalmente 3,2 ore; ciò dipende naturalmente dalle impostazioni e dall'utilizzo del dispositivo.

### ***Livello della batteria***

Se il dispositivo è spento ed in carica, verrà visualizzato il simbolo della batteria. Verrà anche visualizzato nel Menù principale, a cui si accede toccando lo schermo per mostrare le barre dei pulsanti, quindi toccando il pulsante nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.



Nell'immagine seguente, la batteria sinistra è completamente carica, la batteria centrale è al 60% ed in carica, mentre la batteria di destra è quasi scarica, al 20%.



Vi raccomandiamo di caricare il dispositivo quando il livello della batteria scende al di sotto del 40%.


### ***Spia di stato della batteria***

Una piccola spia accanto alla porta USB indica lo stato della batteria.

- Una luce verde lampeggiante indica che la batteria si sta ricaricando.
- Una luce verde fissa indica che la batteria è completamente carica e l'adattatore di corrente è connesso.
- Una luce gialla lampeggiante indica una batteria completamente esaurita, oppure un errore nel caricamento. Se accade, assicuratevi di usare il caricabatterie fornito con il dispositivo e che tutti i cavi siano collegati correttamente. Se la spia non diventa verde lampeggiante entro 30 minuti, contattate [Optelec](http://www.optelec.it) per assistenza.

## **2.3 Accendere Compact 8**

Per accendere il dispositivo, tenete premuto il pulsante arancione sulla parte superiore per 4 secondi. Quando lo schermo è rivolto verso di voi, il pulsante si trova sul lato destro, immediatamente dietro il bordo frontale.

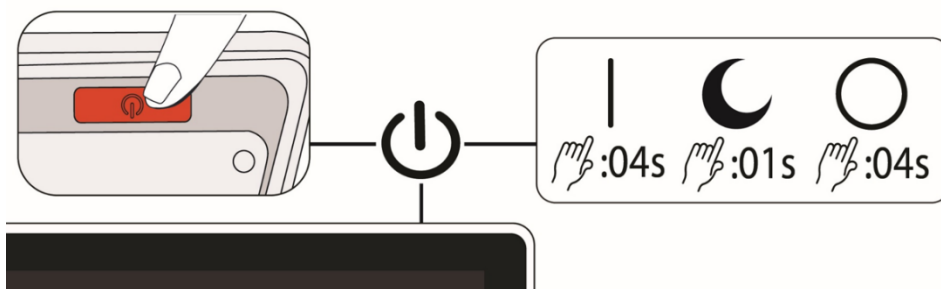

Il pulsante di **accensione** viene anche usato per spegnere o mettere il dispositivo in standby. Quando volete lasciare il dispositivo acceso ma non lo utilizzerete per un breve periodo di tempo, potete risparmiare batteria mettendolo in standby: per farlo, premete il pulsante di **Accensione** per un secondo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il pulsante di **Accensione** per 4 secondi.

Consultate la tabella seguente per una breve panoramica sull'uso del pulsante di **Accensione**.

Modalità	Azione	Risultato
Attivo	Pressione per 1 secondo	Modalità Standby
Attivo	Premere per 4 secondi	Spegne il dispositivo
Disattivo	Pressione per 1 secondo	Mostra informazioni sulla batteria durante il caricamento
Disattivo	Premere per 4 secondi	Accende il dispositivo
Standby	Pressione per 1 secondo	Riattiva il dispositivo

## 2.4 Istruzioni di configurazione software


La prima volta che accendete il dispositivo, vi verrà chiesto di selezionare una lingua. Potete cambiare la lingua in qualsiasi momento andando alla schermata [Lingua](#), come descritto a pagina 56. Potete utilizzare il videoingranditore in modalità semplificata o avanzata. All'avvio, il dispositivo sarà impostato per lavorare in modalità semplificata. Cambiare modalità è molto facile, e potete farlo in qualsiasi momento. Consultate [Modalità semplificata e modalità avanzata](#) a pagina 14 per ulteriori informazioni.

Se volete anche impostare correttamente la data e l'ora, seguite le istruzioni al capitolo [Impostare data e ora](#) a pagina 16.



### 3. Usare il Touc screen

Il videoingranditore è dotato di Touch screen; perciò, tutte le funzioni sono accessibili tramite menù e pulsanti, i quali verranno mostrati quando toccate lo schermo. Potete nascondere menù e pulsanti toccando nuovamente lo schermo. Le barre dei pulsanti verranno nascoste automaticamente dopo circa 10 secondi. La seguente illustrazione mostra tutti i pulsanti disponibili.

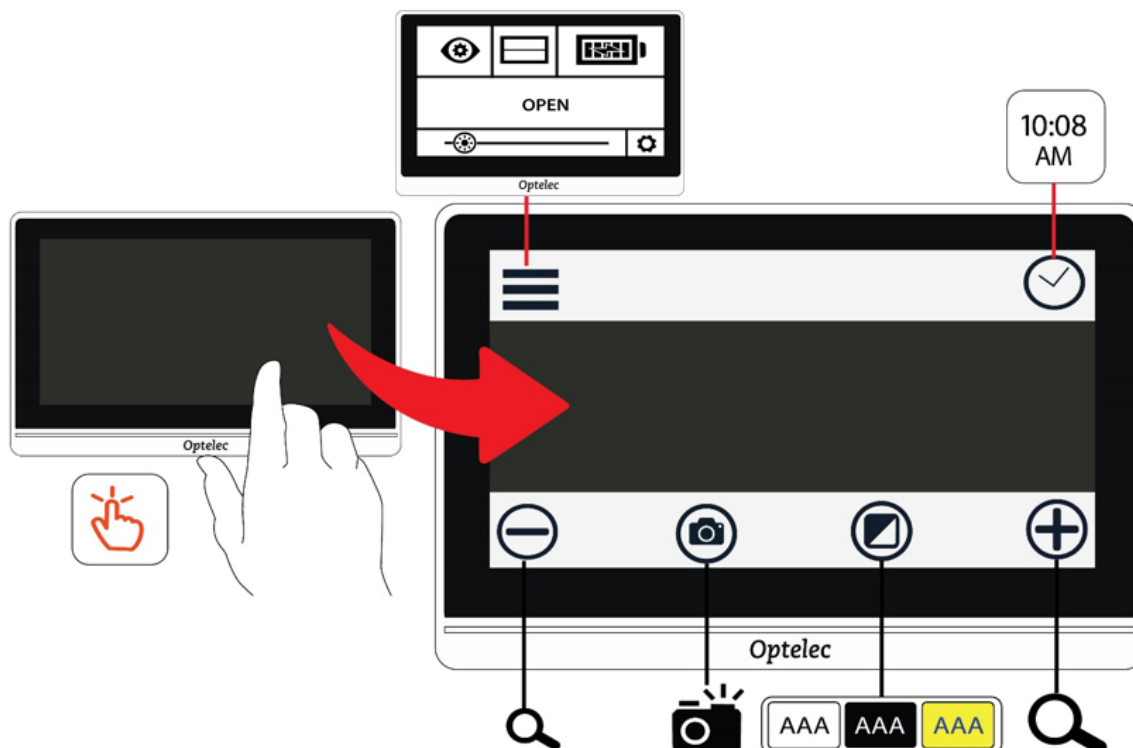

Questo capitolo, che descrive le funzioni di base del touch screen, è diviso nelle sezioni seguenti:


- Sezione Modalità semplificata e modalità avanzata, che descrive le differenze tra le due modalità e spiega come passare dall'una all'altra.
- Sezione Operazioni di base, identifica gli elementi comuni tra le schermate e spiega come impostare l'ora e la data.
- Sezione Barre dei pulsanti, che elenca i pulsanti presenti nella barra superiore e in quella inferiore.

- Sezione Struttura del menù principale, che elenca le icone presenti nel Menù principale.

### 3.1 Modalità Semplificata e Modalità Avanzata

Potete usare Compact 8 con o senza i menù. In Modalità semplificata, il pulsante Menù e l'orologio saranno nascosti quando toccate lo schermo. Verranno mostrati soltanto i pulsanti nella parte inferiore. Questi pulsanti vengono usati per modificare il livello di ingrandimento, cambiare la combinazione di colori attiva e scattare un'istantanea.

Nella seguente illustrazione, la modalità Semplificata viene mostrata sulla sinistra mentre la Modalità avanzata viene mostrata sulla destra.

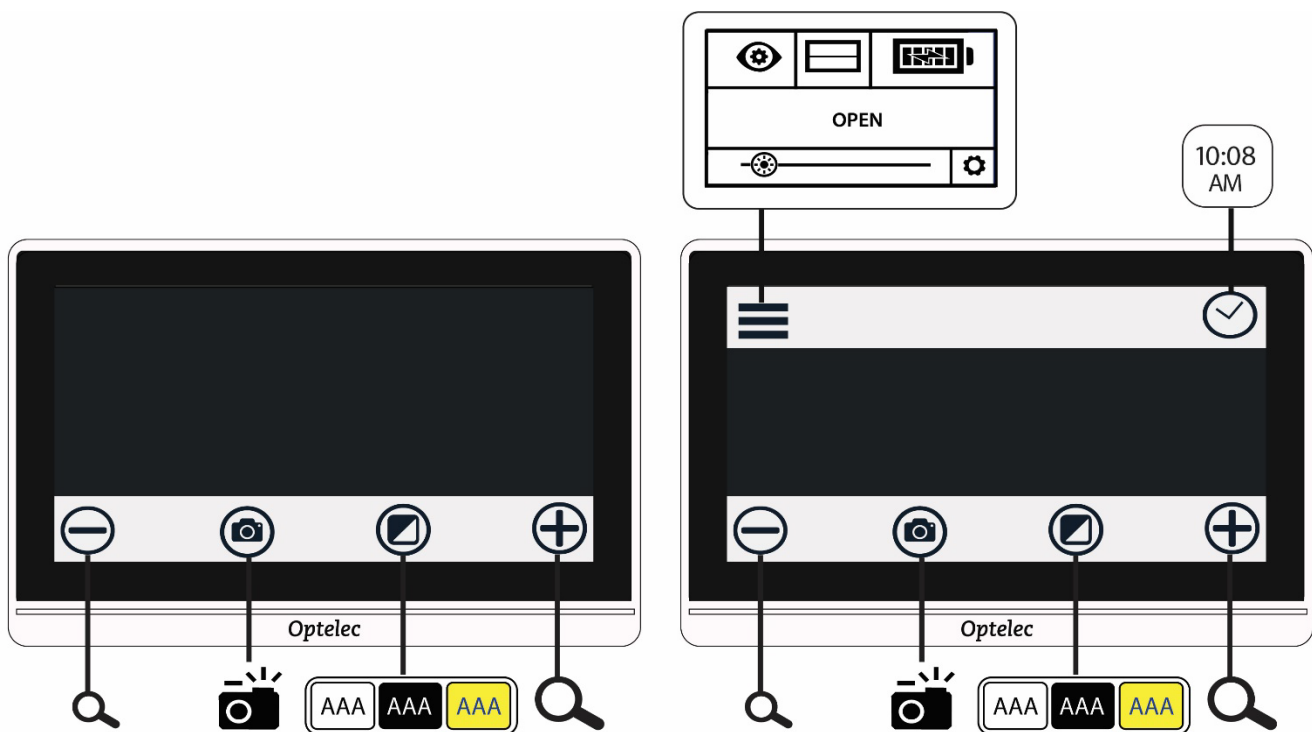


Per cambiare modalità:

1. premete e tenete premuto il pulsante Modalità colore per 5 secondi.
2. Nel menù Modalità che appare, toccate Semplificata o Avanzata. In Modalità semplificata, viene mostrata soltanto la barra dei pulsanti inferiore. La modalità Avanzata visualizza anche una barra dei pulsanti superiore.

3. Nella vista in Tempo reale, toccate il pulsante in alto a sinistra dello schermo. Verrà mostrato il Menù principale.

Inizialmente, il dispositivo sarà impostato per lavorare in modalità semplificata. Per personalizzare le impostazioni, dovete essere in Modalità avanzata. La modalità Semplificata non mostra nessuno dei menù usati per personalizzare il dispositivo.

Nella seguente illustrazione, l'utente tocca il pulsante Modalità colore in modalità semplificata. Dopo che avrete selezionato Avanzata nel menù Modalità, lo schermo sarà in Modalità avanzata.

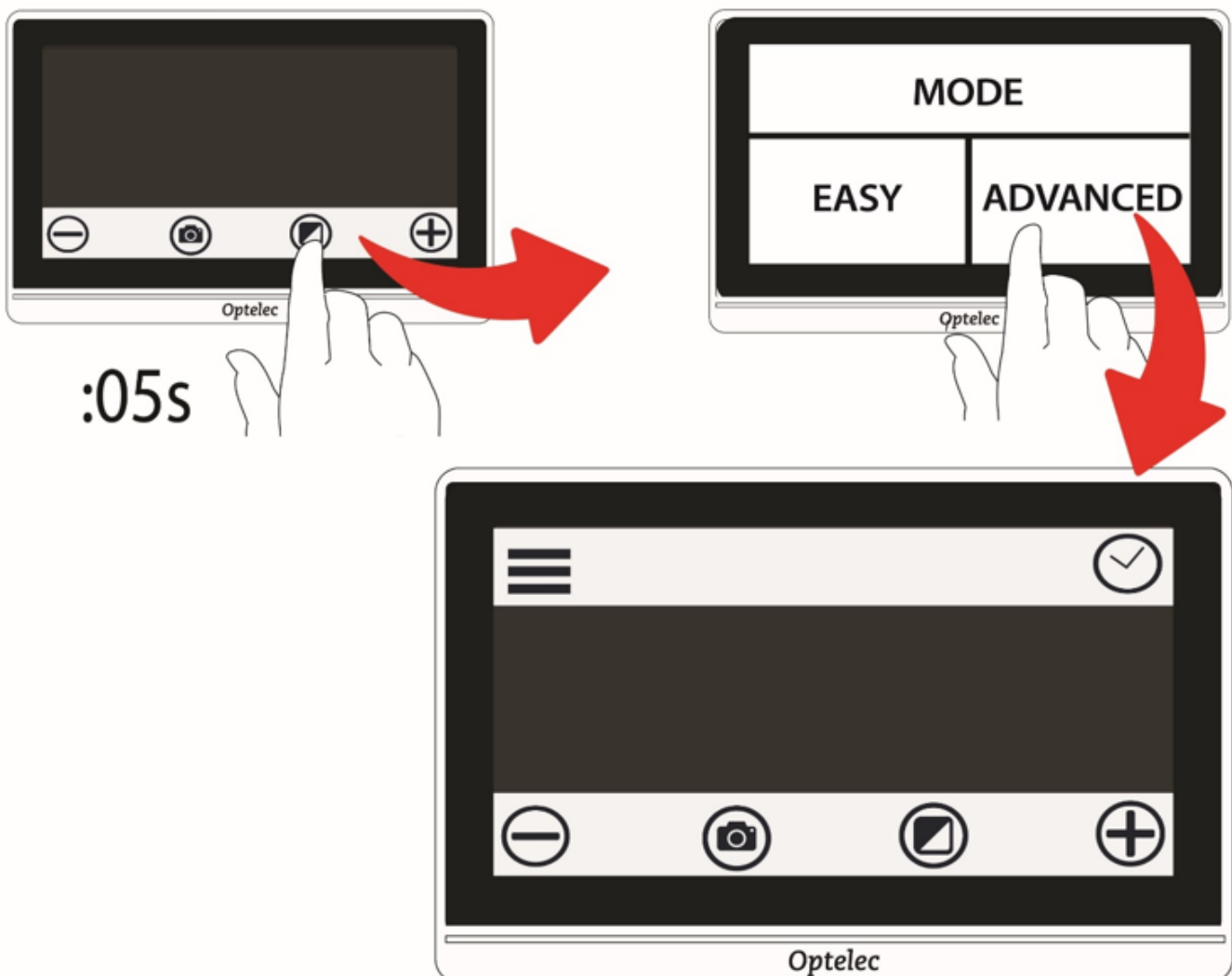

## 3.2 Operazioni di base


Quando accendete il videoingranditore, si avvierà in vista in Tempo reale. Rimarrete in Vista in tempo reale fino a quando non scattate un'istantanea. Sarete in vista Istantanea fino a quando non toccate la **X** nell'angolo in alto a destra dello schermo.

**Suggerimento:** se non siete sicuri di essere in Modalità istantanea, toccate lo schermo per mostrare le barre dei pulsanti. Se nell'angolo in alto a destra è presente un pulsante **X**, allora siete in vista Istantanea. Per tornare alla vista in Tempo reale, toccate la **X**.


### *Impostare data e ora*



Le istruzioni di seguito vi spiegheranno alcune funzionalità di base, e vi spiegheranno come impostare la data e l'ora.

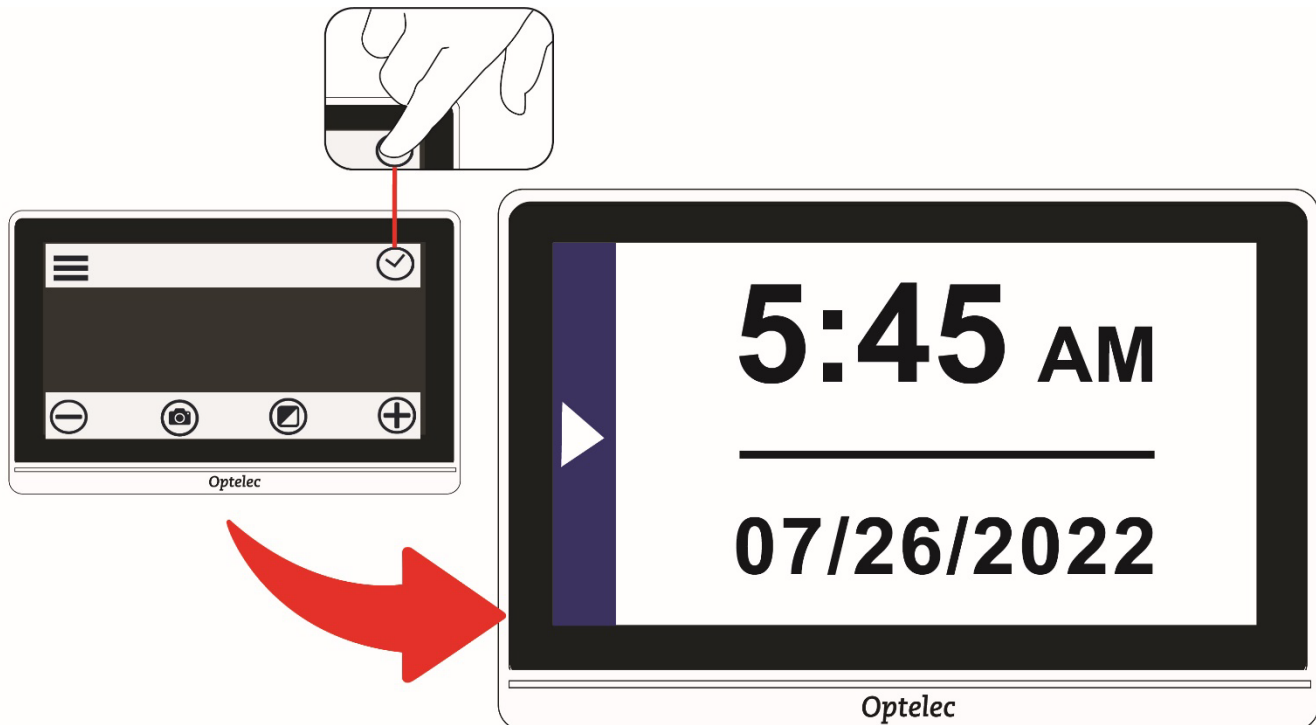1. Toccate un'immagine in tempo reale per mostrare le barre dei pulsanti.
2. Toccate l'orologio in alto a destra per mostrare la data e l'ora.

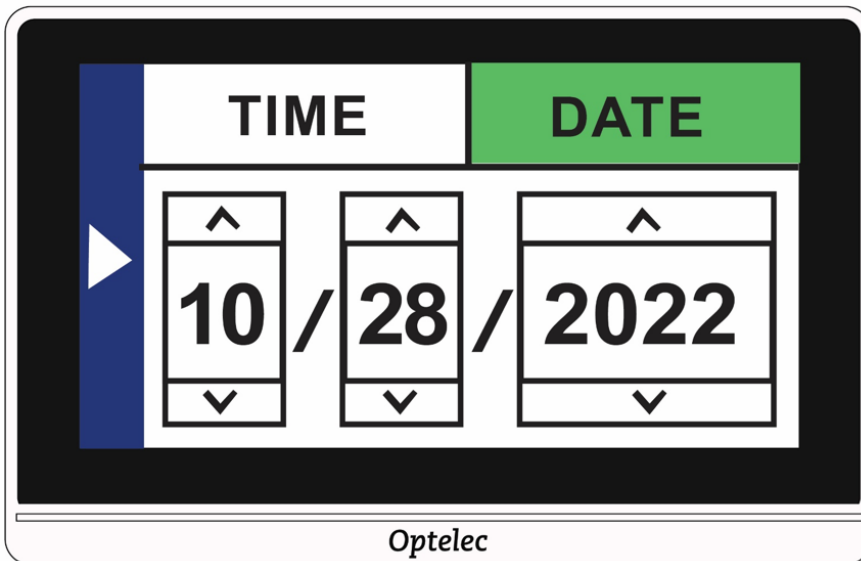

3. Nella schermata Data e ora, toccate in qualsiasi punto per mostrare la selezione dei valori di data e ora.
4. Tutto ciò che selezionate (evidenziate) sarà attivo. Toccate la casella Data per mostrare i campi di selezione per giorno, mese e anno.



5.  Toccate le frecce su e giù per spostare la selezione tra i tre campi. Toccate le frecce per impostare la data.
6. Toccate la casella Ora per evidenziarla e mostrare i campi di selezione dell'ora.
7. Infine, toccate 12 o 24 per decidere se volete un orologio a 12 ore (AM/PM) o a 24 ore.
8. Impostate l'ora.
9.  per impostare automaticamente i valori e tornare alla schermata precedente, toccate lo schermo in qualsiasi punto.
10. Ripetete il passaggio precedente per tornare alla vista in Tempo reale. L'orologio ora mostrerà la data e l'ora corrette.

**Avviso:** non fate affidamento sulle funzioni di data e ora del dispositivo per prendere decisioni di tipo medico, per esempio per stabilire quando prendere dei farmaci. La funzione è disponibile solo per vostra comodità, e non viene impostata automaticamente.

### ***Navigare nei menù***

Quando toccate il pulsante Menù per mostrare il Menù principale, sarete in vista Menù. Man mano che esplorate le varie schermate dei menù, vi troverete degli elementi in comune.



Nel Menù principale e nelle altre relative schermate, potete tornare alla schermata precedente toccando la freccia sinistra triangolare sulla parte destra dello schermo. Potete continuare a toccare la freccia fino a tornare alla vista in Tempo reale.



Se state visualizzando un'istantanea e volete tornare alla vista in Tempo reale, toccate la **X** nell'angolo in alto a destra.

Alcune icone rappresentano funzioni che possono essere attivate e disattivate tramite un tocco. Quando l'icona è selezionata, la funzione sarà abilitata.







Ad esempio, se toccate l'icona della Linea, la funzione verrà abilitata (sinistra). Se la toccate nuovamente, verrà disabilitata (destra).



### 3.3 Barre dei pulsanti

Quando toccate lo schermo, le Barre dei pulsanti verranno mostrate rispettivamente nella parte superiore ed inferiore dello schermo. Di seguito troverete una panoramica grafica delle barre con le definizioni dei pulsanti:

I pulsanti sono spiegati nella tabella seguente.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Pulsante Menù	Mostra il Menù principale, dal quale potete accedere alle funzionalità del dispositivo e modificare la visualizzazione dello schermo.
	Pulsante Ora	Mostra la data e l'ora corrente. Toccate in qualsiasi punto dello schermo per mostrare la schermata <a href="#">Data e ora</a> (consultate pagina 16), da cui potrete impostare i relativi valori..
	Riduci ingrandimento	Riduce l'ingrandimento, mostrando una porzione più ampia dello schermo.
	Istantanea	Scatta un'istantanea dell'immagine attualmente a schermo.
	Modalità colore	Cambia la combinazione di colori utilizzata per mostrare l'immagine attualmente a schermo.
	Aumenta ingrandimento	Aumenta l'ingrandimento, mostrando una porzione più ridotta dello schermo.










### 3.4 Struttura del Menù principale



Dovete essere in modalità Avanzata per personalizzare le vostre impostazioni. La barra dei pulsanti superiore viene mostrata soltanto in modalità Avanzata. Se viene mostrata solo la barra inferiore, significa che siete in modalità Semplificata. Per cambiare la modalità, consultate [Modalità Semplificata e modalità Avanzata](#) a pagina 14.




Per mostrare i menù:

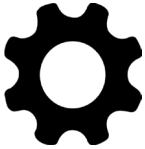

1. toccate lo schermo per mostrare le barre dei pulsanti.
2. Toccate il pulsante Menù nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Verrà mostrato il menù principale.

Riga 1	 <b>Aspetto</b>	 <b>LINEA</b>	 <b>BATTERIA</b>
Riga 2	<b>APRI</b>		
Riga 3	 <b>Luminosità</b>		 <b>Impostazioni</b>

La struttura del Menù principale viene descritta nella tabella seguente. Le icone che rappresentano le opzioni del menù si trovano nella

colonna di sinistra. Le opzioni nei menù Aspetto e Impostazioni verranno descritte nei due capitoli seguenti.

Menù	Descrizione
 <p data-bbox="217 596 365 638">Aspetto</p>	<p data-bbox="451 415 1435 747">Fornisce opzioni per personalizzare l'aspetto dello schermo per meglio adattarsi alle vostre condizioni visive - colori, linee o maschere, sensibilità alla luce, effetti per i contorni e impostazioni per il daltonismo. Le modifiche alle impostazioni visive si applicano immediatamente. Consultate <a href="#">Personalizzare l'aspetto</a> a pagina 36.</p>
 <p data-bbox="155 926 427 1010">Linea attiva/disattiva</p>	<p data-bbox="451 789 1390 926">Attiva o disattiva la visualizzazione di una linea o una maschera sullo schermo, che vi può aiutare a mantenere il segno durante la lettura.</p>
 <p data-bbox="217 1188 365 1230">Batteria</p>	<p data-bbox="451 1056 1414 1146">Mostra la percentuale di carica residua della batteria. Consultate <a href="#">Caricare la batteria</a> a pagina 9.</p>
<p data-bbox="224 1272 358 1314"><b>SALVA</b></p>	<p data-bbox="451 1272 1398 1507">Salva l'istantanea visualizzata attualmente a schermo. Una volta salvata, la stessa istantanea verrà mostrata insieme alle barre dei pulsanti. Consultate <a href="#">Salvare un'immagine</a> a pagina 31. Non disponibile dalla vista in Tempo reale.</p> <p data-bbox="451 1528 1398 1619"><b>Nota:</b> questa opzione è disponibile solo dopo che avete scattato un'istantanea.</p>
<p data-bbox="240 1661 342 1703"><b>APRI</b></p>	<p data-bbox="451 1661 1430 1843">mostra una miniatura di ogni istantanea salvata in una griglia. Inoltre, vi permette di aprire un file toccando la relativa immagine. Consultate <a href="#">Aprire un documento salvato</a> a pagina 32. Il pulsante Elimina</p>

Menù	Descrizione
	nella parte inferiore vi permette di eliminare uno o più file. Consultate <a href="#">Eliminare le istantanee</a> a pagina 34.
 Luminosità	Fate scorrere il cerchio verso destra per aumentare la luminosità dello schermo. Spostatelo a sinistra per diminuirla. Potete anche toccare direttamente un livello di luminosità per applicarlo. La modifica sarà immediata, quindi potete direttamente verificare la luminosità dal Menù principale.
 Impostazioni	Mostra delle opzioni che vi consentono di cambiare le impostazioni di base del sistema. Consultate <a href="#">Cambiare le impostazioni del sistema</a> a pagina 50.


## 4. Lavorare con Compact 8

Potete usare Compact 8 ogni qualvolta avete bisogno di ingrandire un'immagine. Potete tenerlo in mano per leggere etichette nei negozi, menù di ristoranti, o generalmente ingrandire qualunque cosa nelle vicinanze utilizzando la telecamera a distanza.

Quando estendete il supporto, potete leggere materiale direttamente sotto il dispositivo usando la telecamera per documenti. Questa sezione fornisce esempi di utilizzo e descrive come aprire e chiudere il supporto.

### 4.1 Leggere usando la Telecamera per documenti

Scegliete una superficie piana e stabile per la lettura. Estendete il supporto, quindi posizionate il dispositivo sopra il materiale da leggere.

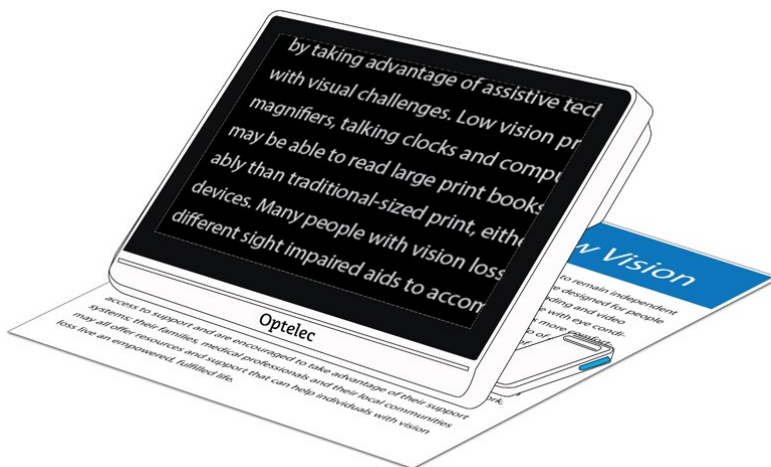

Un LED nel retro del videoingranditore illumina l'area di visualizzazione. La spia può essere abilitata o disabilitata dal Menù principale. Consultate [Luci](#) a pagina 53 per ulteriori istruzioni..

Potete migliorare la visibilità del testo visualizzato cambiando la modalità colore e il livello di ingrandimento.

## 4.2 Visualizzare oggetti a breve distanza

Potete utilizzare il videoingranditore per visualizzare oggetti a breve distanza. La telecamera a distanza è l'ideale per visionare etichette, cartellini dei prezzi o ricevute. Per poter attivare la telecamera a distanza, il supporto deve essere chiuso.

Potete anche usarla per leggere cartelli in strada o nei negozi.







## 4.3 Ingrandire l'immagine mostrata dalla telecamera

Potete modificare l'ingrandimento sia nella vista in Tempo reale sia nella vista Istantanea. Ci sono tre modi per farlo.



- Toccate il pulsante Aumenta ingrandimento per aumentare il livello di ingrandimento, ed il pulsante Riduci ingrandimento per ridurlo. Ogni tocco corrisponde ad un aumento o una diminuzione minima dell'ingrandimento.
- Per aumentare o ridurre l'ingrandimento in modo continuo, toccate uno dei due pulsanti e tenetelo premuto.

- Potete anche allargare e stringere le dita per regolare l'ingrandimento.
  - Riduci ingrandimento: posizionate due dita allargate sullo schermo, quindi stringetele per ridurre l'ingrandimento e vedere una porzione più ampia dell'immagine.
  - Aumenta ingrandimento: posizionate due dita unite sullo schermo, quindi allargatele per aumentare l'ingrandimento e vedere una porzione minore dell'immagine.

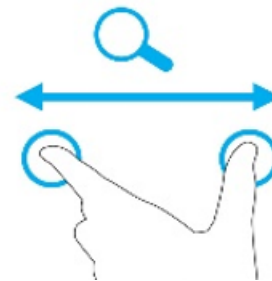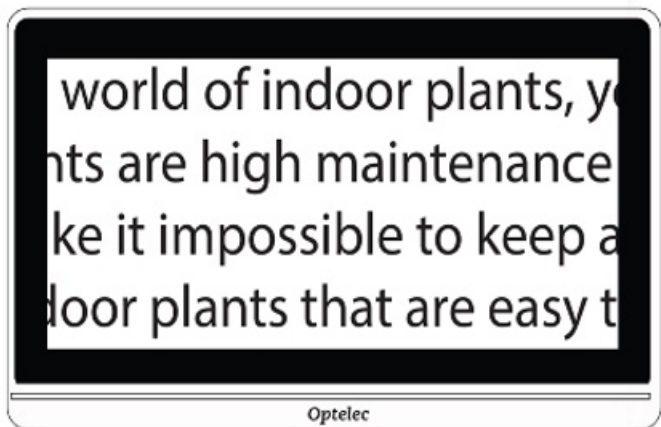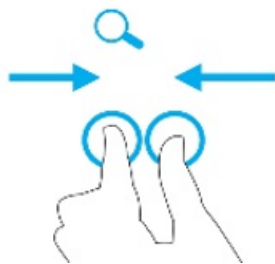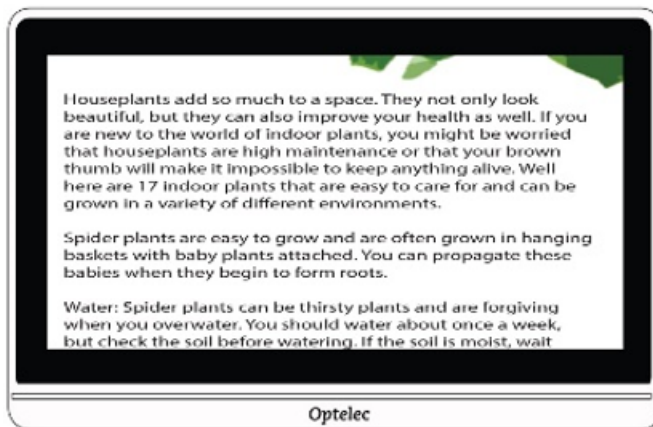

#### 4.4 Scorrere per vedere più porzioni di un'immagine.

Potete scorrere sullo schermo in alto, in basso, a destra o a sinistra per vedere le porzioni dell'immagine non mostrate attualmente a schermo.






Lo scorrimento è disponibile nelle viste in Tempo reale ed Istantanea, nonché durante la visione di un'immagine salvata. Man mano che l'ingrandimento aumenta, sarà necessario scorrere di più per vedere l'immagine nella sua totalità.

## 4,5 Cambiare la modalità colore



Toccate il pulsante Modalità colore per passare tra Colori reali e le altre quattro combinazioni di colori impostate. Colori reali è sempre disponibile. Le quattro combinazioni di colori preimpostate di fabbrica sono: bianco su nero, nero su bianco, giallo su nero e giallo su blu. Per modificare le combinazioni di colori, consultate la sezione [Colore](#) a pagina 38.


Il grafico seguente mostra un'immagine di esempio, visualizzata in diverse combinazioni di colori. L'immagine in alto a sinistra mostra come usare il pulsante Modalità colore passare tra le combinazioni di colori.

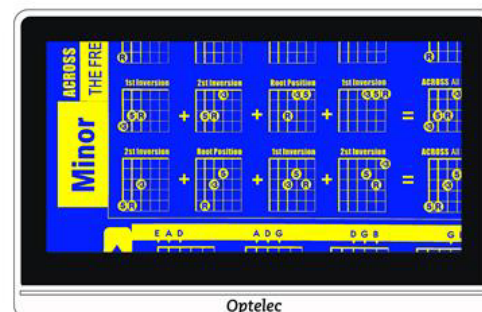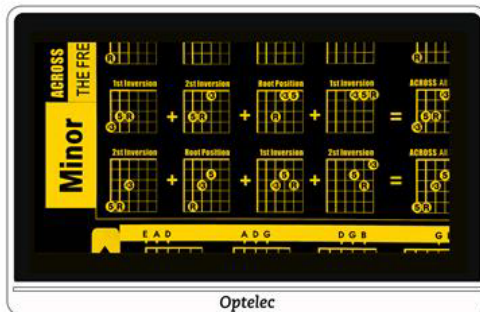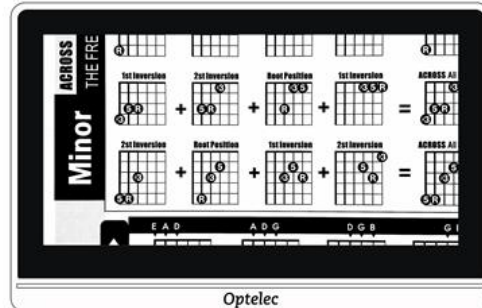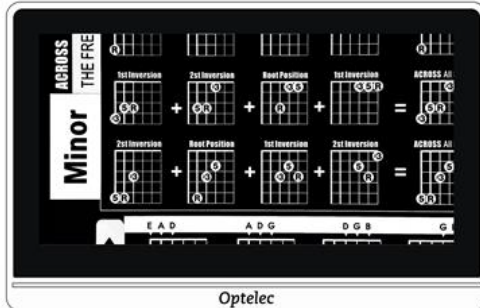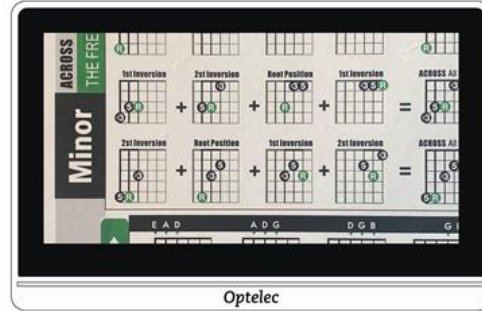



## 5. Scattare istantanee

All'accensione del videoingranditore, viene sempre mostrata la vista in Tempo reale. In questa vista, lo schermo mostra ciò che viene inquadrato dalla telecamera. Sarete in vista in Tempo reale fino a quando non scattate un'immagine, il che congela l'immagine attualmente a schermo. Le istantanee vi consentono di esaminare un determinato oggetto nel dettaglio, prendendovi il tempo necessario.

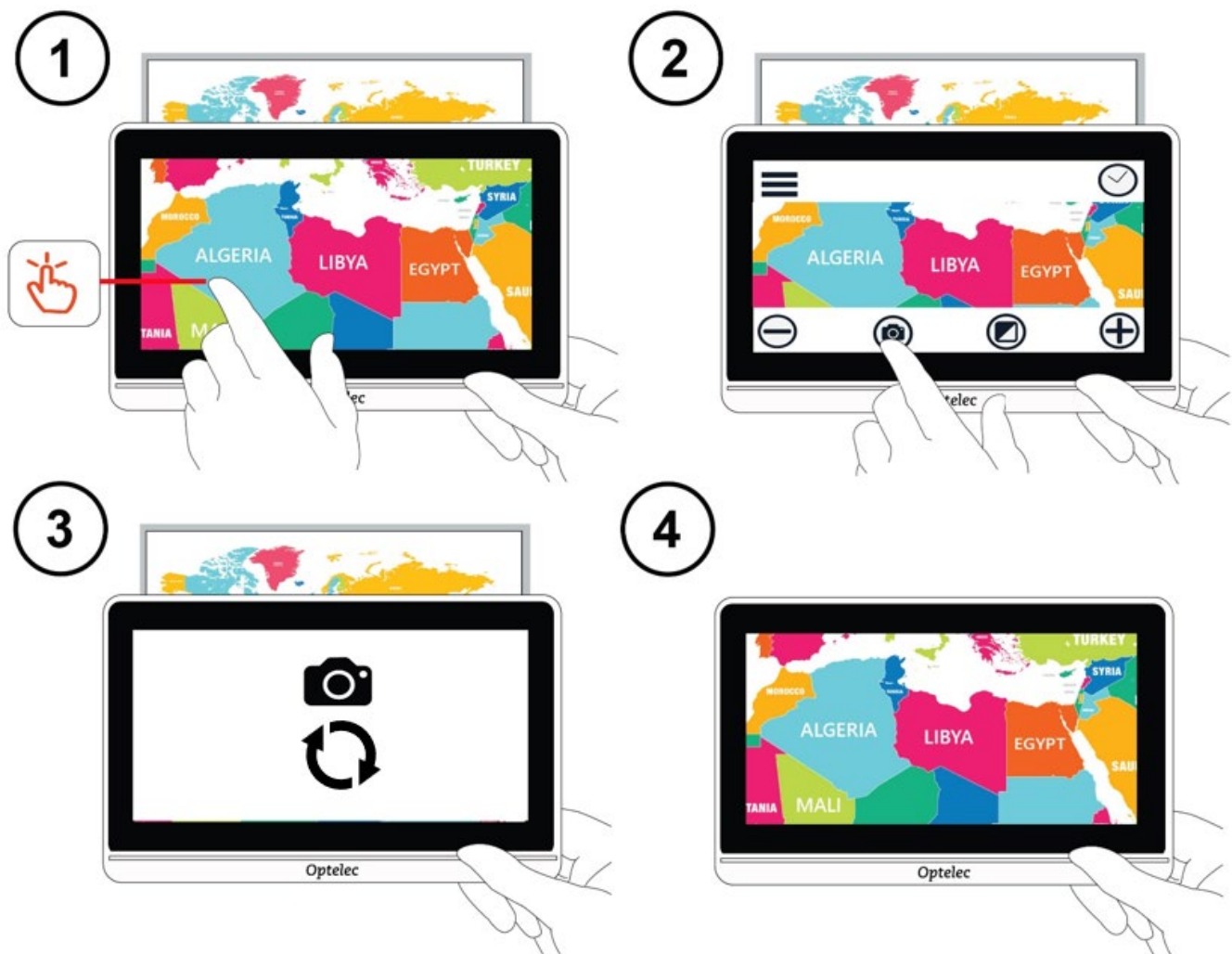

Per scattare un'istantanea:

1. Centrate l'immagine che volete salvare.

2. Tenete fermo il dispositivo. Movimenti accidentali possono sfocare l'immagine.
3. Toccate lo schermo per mostrare le barre dei pulsanti.
4. Toccate il pulsante Istantanea. Durante il processo di acquisizione, verranno mostrati una telecamera e un cerchio in movimento.
5. Tenete fermo il dispositivo fino a quando non sentite il suono di un otturatore.



L'istantanea verrà mostrata a schermo.

## 5.1 Chiudere un'istantanea

In vista Istantanea, quando vengono mostrate le barre dei pulsanti, viene visualizzata una **X** nell'angolo in alto a destra. L'immagine acquisita rimarrà sullo schermo fino a quando non tocate la **X**.



Per tornare alla vista in Tempo reale, dovete chiudere l'istantanea.

## 5.2 Modificare un'istantanea


Potete personalizzare le istantanee allo stesso modo in cui personalizzate la vista in Tempo reale. Per esempio, potete cambiare l'ingrandimento o la modalità colore di un'istantanea.

## 5.3 Salvare un'istantanea

Se volete che un'istantanea rimanga disponibile per essere visionata successivamente, potete salvarla.

1. Toccate lo schermo per mostrare le barre dei pulsanti.
2. Toccate il pulsante Menù per mostrare il Menù principale.
3. Toccate **SALVA**. Questa opzione sarà disponibile soltanto dopo che avrete scattato un'istantanea.

**Nota:** l'istantanea resterà aperta fino a quando non tocate la **X** nell'angolo -in alto a destra.

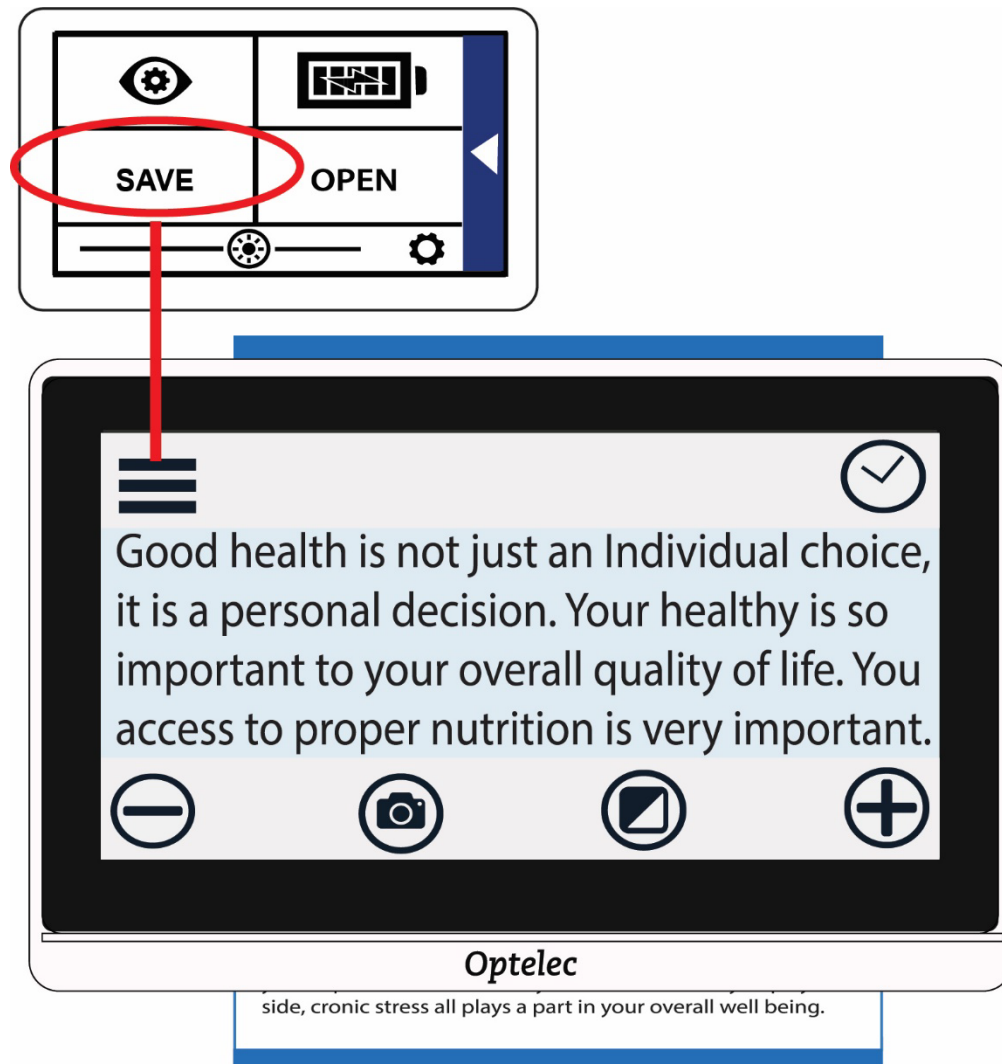


## 5.4 Aprire un'istantanea salvata

Per aprire un'istantanea salvata:

1. Toccate lo schermo per mostrare le barre dei pulsanti.
2. Toccate il pulsante Menù per mostrare il Menù principale.
3. Toccate **APRI**. Tutte le immagini che avete salvato verranno mostrate in una griglia. Tutte le istantanee salvate vengono sempre mostrate a Colori reali.



4. Toccate l'istantanea che volete aprire. Il messaggio "Apertura in corso" verrà mostrato fino a quando l'immagine non viene visualizzata.

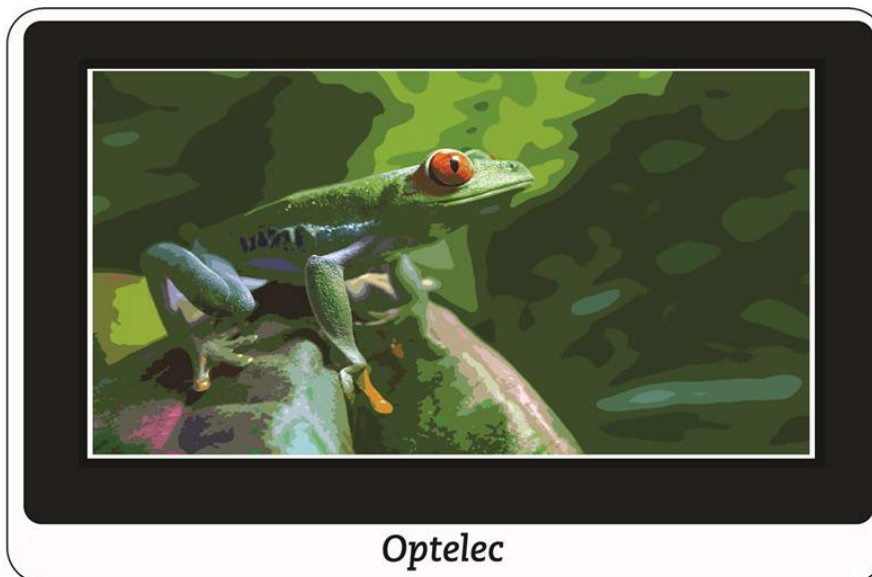

5. Se lo desiderate, modificate l'ingrandimento e il colore. Potete anche far scorrere le istantanee allo stesso modo in cui fate scorrere le immagini in tempo reale. Le modifiche ad un'immagine ad alto contrasto si applicano solo fin tanto che quest'ultima è aperta e in visualizzazione. L'immagine tornerà ai colori reali appena viene chiusa.

6. Per chiudere l'istantanea, toccate lo schermo per mostrare le barre dei pulsanti, quindi toccate la **X** nell'angolo in alto a destra. Verrà quindi mostrata la vista in Tempo reale.

## 5.5 Eliminare le istantanee

Per eliminare una o più istantanee:

1. Toccate lo schermo per mostrare le barre dei pulsanti.
2. Toccate il pulsante Menù per mostrare il Menù principale.
3. Toccate **APRI**. Tutte le immagini che avete salvato verranno mostrate in una griglia. Tutte le istantanee salvate vengono sempre mostrate a Colori reali.



4. Toccate **ELIMINA** nella parte inferiore dello schermo. Una casella di controllo verrà mostrata nell'angolo in alto a destra di ogni istantanea.
5. Toccate la casella di controllo relativa a ogni istantanea che volete eliminare.

**Suggerimento:** per eliminare tutte le istantanee dal videoingranditore, potete lasciare senza spunta tutte le caselle di controllo, toccare **ELIMINA**, quindi **Sì** nella schermata di conferma.



6. Toccate **ELIMINA**. Verrà visualizzato un messaggio di conferma.
7. Toccate **Sì**. Verrà visualizzato il messaggio di sistema “Documenti selezionati eliminati”, dopodiché tornerete alla schermata di eliminazione.





## 6. Personalizzare l'aspetto



Il menù Aspetto contiene opzioni che vi consentono di personalizzare l'aspetto visivo delle immagini sullo schermo. Per cambiare queste impostazioni, dovete essere in modalità Avanzata in modo che la barra dei pulsanti superiore sia visibile. Se toccate lo schermo e viene mostrata solo la barra dei pulsanti inferiore, significa che siete in modalità Semplificata. Per cambiare la modalità, consultate [Modalità Semplificata e modalità Avanzata](#) a pagina 14.

Per mostrare il menù Aspetto:

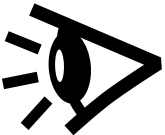

1. toccate lo schermo per mostrare le barre dei pulsanti.
2. Toccate il pulsante Menù nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Verrà mostrato il menù principale.
3. Toccate l'icona Aspetto. Verrà mostrato il menù Aspetto.






Riga 1	 <b>COLORE</b>	 <b>LINEA</b>
Riga 2	 <b>SENSIBILITÀ ALLA LUCE</b>	 <b>CONTORNO</b>
Riga 3	<b>DALTONISMO</b>	



Tutte le opzioni di questo menù sono disponibili sia nella vista in Tempo reale sia nella vista Istantanea, ad eccezione dell'opzione Linea, disponibile solo nella vista in Tempo reale. Gli effetti per i contorni disponibili dipendono dalla modalità colore attiva.

Le opzioni disponibili nel menù aspetto sono descritte nella tabella seguente.

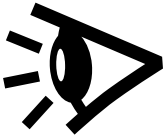Opzione	Descrizione
 <b>COLORE</b>	 Schermata <a href="#">Colore</a> , che consente di impostare le quattro combinazioni di colori disponibili tramite il pulsante Modalità colore. <b>nota:</b> Colori reali, che è sempre disponibile come quinta modalità colore, non può essere disabilitata.

Opzione	Descrizione
 <p><b>LINEA</b></p>	 Schermata <a href="#">Linea</a> , che vi consente di selezionare il tipo di linea o maschera visualizzata nella vista in Tempo reale quando l'icona Linea è selezionata nel Menù principale. Toccate per selezionare una linea o maschera orizzontale o verticale.
 <p><b>SENSIBILITA' ALLA LUCE</b></p>	Toccate per abilitare (selezionato) o disabilitare (deselezionato) la <a href="#">sensibilità alla luce</a> . Quando è abilitata, le onde luminose normalmente associate a fastidio legato a specifiche condizioni visive verrà disabilitato.
 <p><b>CONTORNO</b></p>	 Schermata <a href="#">Effetti per i contorni</a> , che consente di abilitare o disabilitare una funzione che rimuove le distrazioni e migliora i contorni delle immagini ad alto contrasto.
<p><b>DALTONISMO</b></p>	Schermata <a href="#">Daltonismo</a> , che migliora la distinzione ed il contrasto dei colori per tre specifiche condizioni di daltonismo. Se una delle tre caselle vi appaiono di colore grigio fisso, toccatela. <b>Nessuno</b> è l'impostazione predefinita per il daltonismo.  <b>Nota:</b> dovete scorrere verso il basso per vedere questa opzione.


## 6.1 Colore




Potete impostare le combinazioni di colori disponibili andando a **Menù principale > Menù aspetto > Colore**. Tali combinazioni di colori saranno disponibili in vista Istantanea ed in Tempo reale.

**nota:** Colori reali, che è la quinta modalità colore, non può essere disabilitata.

Toccate le frecce Su e Giù per scegliere la combinazione di colori che volete usare.

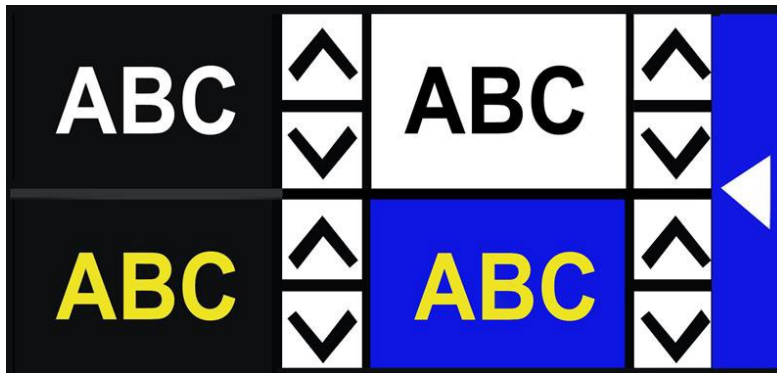

Se volete ridurre il numero di combinazioni di colori disponibili, potete rimuoverne una scorrendo fino a quando non viene visualizzata la **X**. Questo non vale per la prima combinazione a sinistra, che non può essere rimossa.

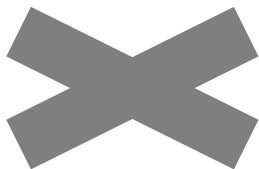

Le combinazioni verranno impostate quando chiudete la schermata. Toccate la freccia a destra per tornare al menù Aspetto.

### ***Combinazioni di colori disponibili***

Le seguenti combinazioni di due colori sono disponibili per la visualizzazione delle immagini. Il colore del testo sarà sempre menzionato per primo. Per esempio, bianco su nero significa testo bianco su sfondo nero.

Testo	Sfondo
Bianco	Nero
Nero	Giallo
Nero	Verde
Blu	Giallo
Blu	Bianco
Nero	Arancione
Nero	Rosso
Nero	Blu
Giallo	Nero
Verde	Nero
Giallo	Blu
Bianco	Blu
Arancione	Nero
Rosso	Nero
Blu	Nero
Nero	Colori migliorati
Nero	Scala di grigi

### ***Contrasto dinamico***

Il videoingranditore regola il contrasto in modo dinamico per migliorare l'esperienza di visione. Il contrasto dinamico viene regolato

automaticamente quando si utilizza qualsiasi combinazione a due colori o i colori migliorati.

## 6.2 Linea



L'opzione Linea nel menù Aspetto viene usata per selezionare il tipo di linea o maschera da usare quando è attiva (selezionata) l'opzione Linea nel menù Aspetto. Usare una linea o una maschera nella vista in Tempo reale può aiutarvi a mantenere il segno sullo schermo.

Potete cambiare la posizione della linea spostando il dito verso l'alto o verso il basso per le linee orizzontali, oppure verso destra o verso sinistra per le linee verticali.


Potete cambiare le dimensioni di una maschera usando il dito per spostare verso destra o sinistra il lato di una maschera orizzontale, o verso l'alto o il basso il lato di una maschera verticale.

Potete scegliere tra quattro opzioni:

- Linea orizzontale (in alto a sinistra)
- Linea verticale (in alto a destra)
- Maschera orizzontale (in basso a sinistra)
- Maschera verticale (in basso a destra)

La linea, o la maschera, attraverserà lo schermo e rimarrà fino a quando la relativa opzione non viene deselezionata.

## 6.3 Sensibilità alla luce

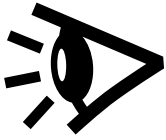

Il videoingranditore è progettato per minimizzare il fastidio causato dalla sensibilità alla luce durante l'uso prolungato. Questa funzione riduce le onde luminose che possono causare fastidio a chi soffre di queste patologie. L'obiettivo è di aumentare la comodità nella lettura, pur mantenendo livelli accettabili di luminosità e contrasto. A trarre beneficio da questa funzione possono essere utenti affetti da varie patologie visive, ma specialmente coloro che soffrono di degenerazione maculare o retinite pigmentosa.

Per abilitare questa funzione, andate a **Menù principale > Menù aspetto** e toccate **Sensibilità alla luce**. Quando è selezionata, la funzione Sensibilità alla luce sarà abilitata.

## 6.4 Effetti per i contorni



La schermata Effetti per i contorni è progettata per aiutarvi a riconoscere gli oggetti rimuovendo le distrazioni e migliorando i contorni. Attraverso questa funzione, il contrasto degli oggetti viene migliorato, facendo sì che siano maggiormente distinguibili dallo sfondo.

Per i Colori reali e i colori migliorati, sono disponibili due opzioni: disabilitati (predefinita), e abilitati.

Per tutte le combinazioni a due colori, sono disponibili quattro opzioni: disabilitati (valore iniziale), Omogeneo, Solo contorni ed Evidenziazione.



Di seguito è riportata una descrizione di ciascun effetto per i contorni, assieme ad un esempio.

## ***Colori reali o colori migliorati***

Se state usando i colori reali o i colori migliorati, toccate una delle opzioni seguenti:



### **Disabilitati**

Nessun cambiamento verrà apportato alle immagini.

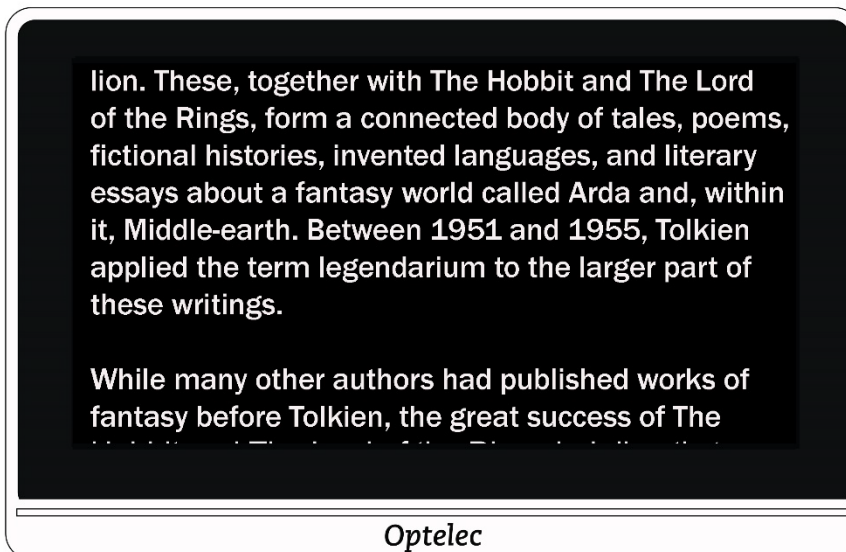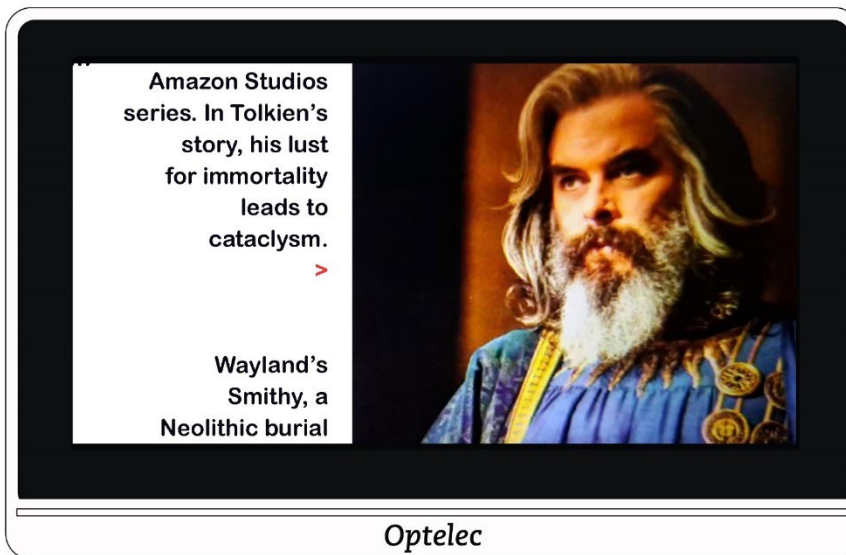

**Abilitati**

Migliora il contrasto delle immagini e contorna il testo.

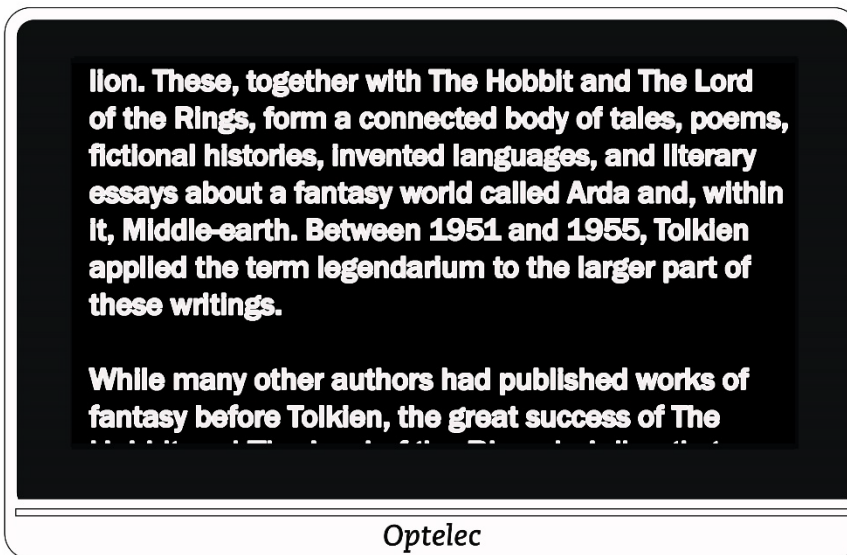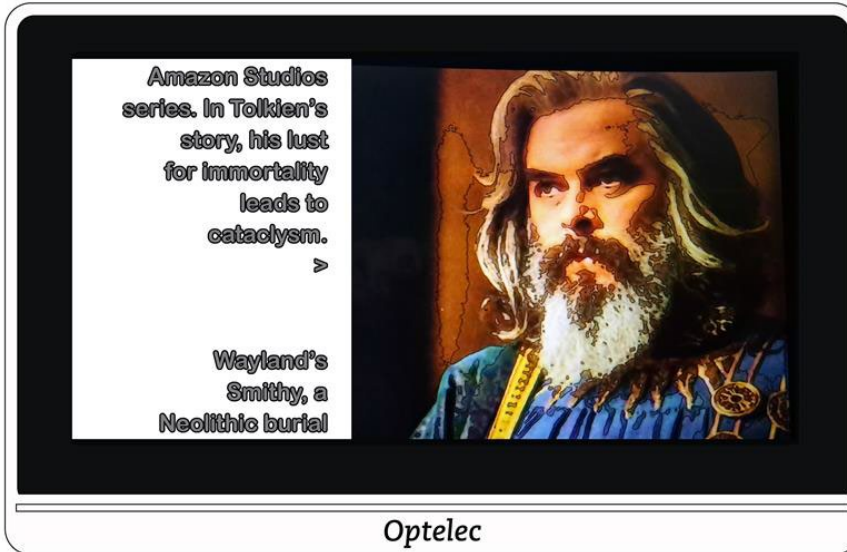





## ***Combinazione a due colori***

Se state usando una combinazione qualsiasi di due colori, toccate una delle opzioni seguenti:



### **Disbailitati**

Nessun cambiamento verrà apportato alle immagini.

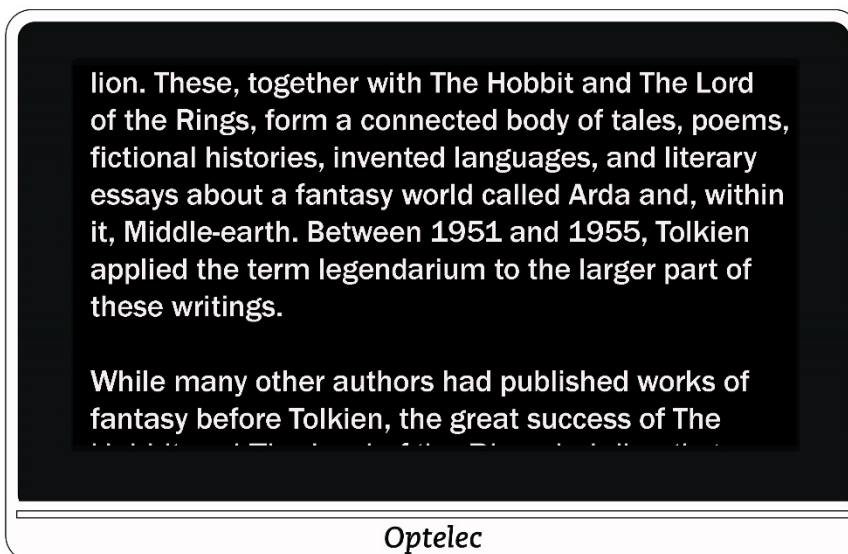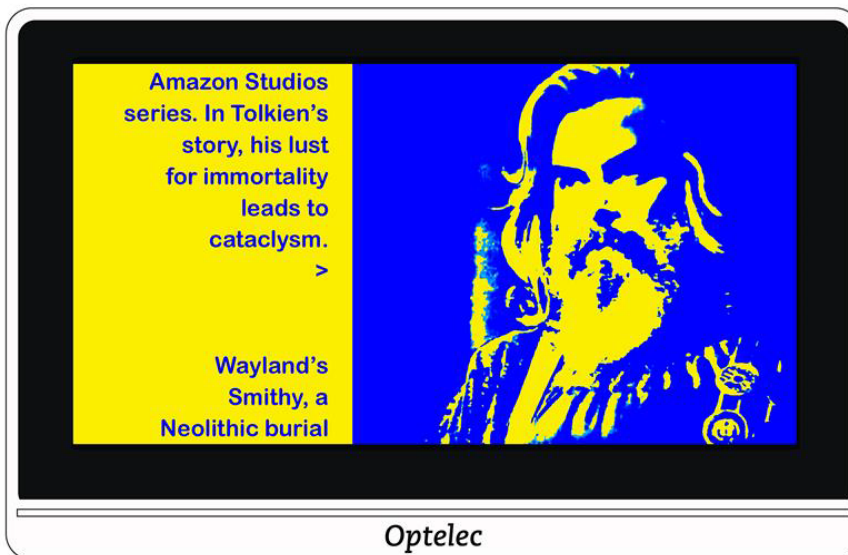


Omogeneo

Riduce le distrazioni nelle immagini.

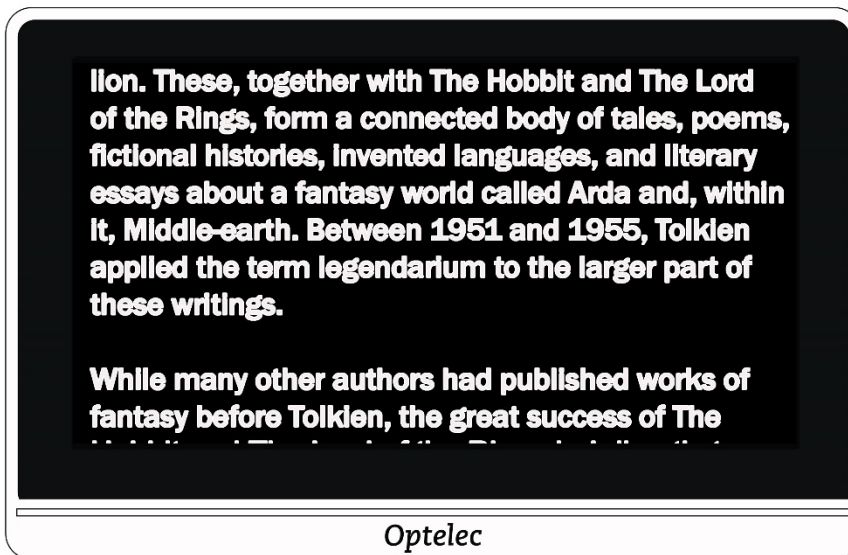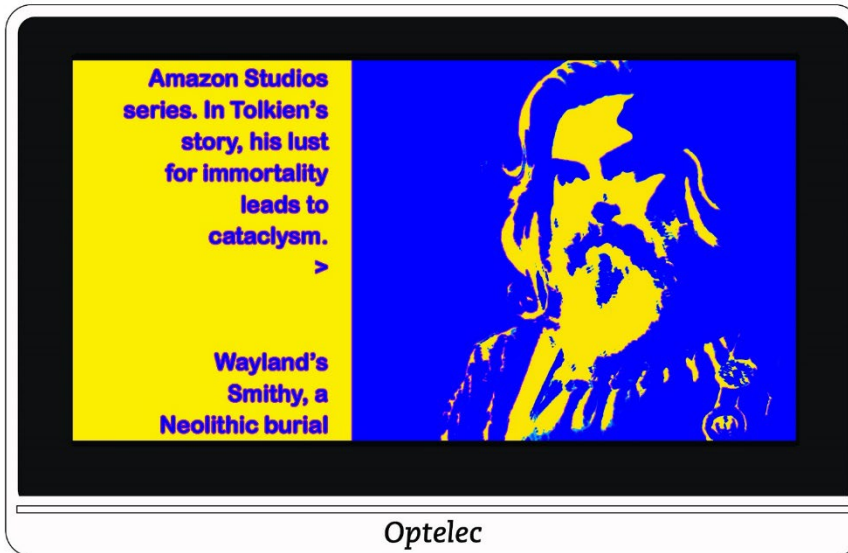

**Solo contorni**

Mostra solo le linee ed i contorni degli oggetti nell'immagine.


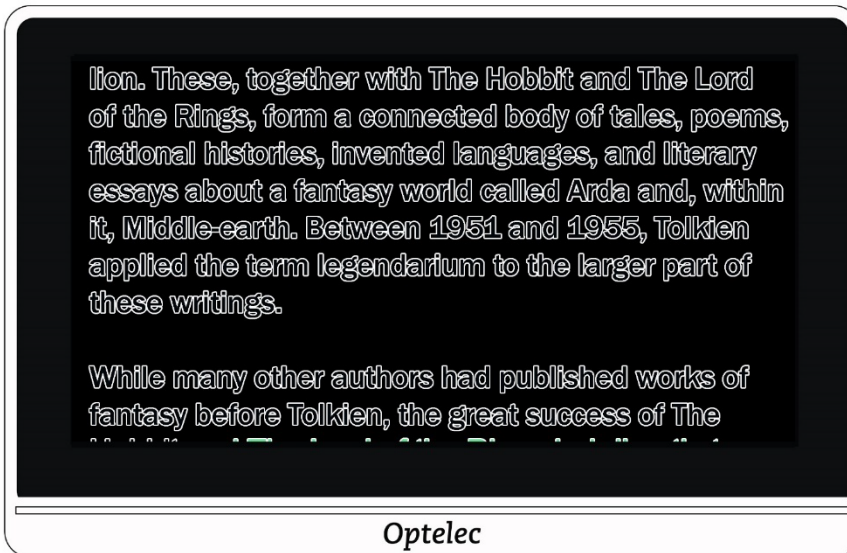


## Evidenziazione


Evidenzia i contorni delle immagini.



Potete scegliere tra cinque colori con cui evidenziare i contorni delle immagini. Quando toccate l'opzione Evidenzia, apparirà la schermata Evidenzia contorni. Toccate il colore da usare per l'evidenziazione.

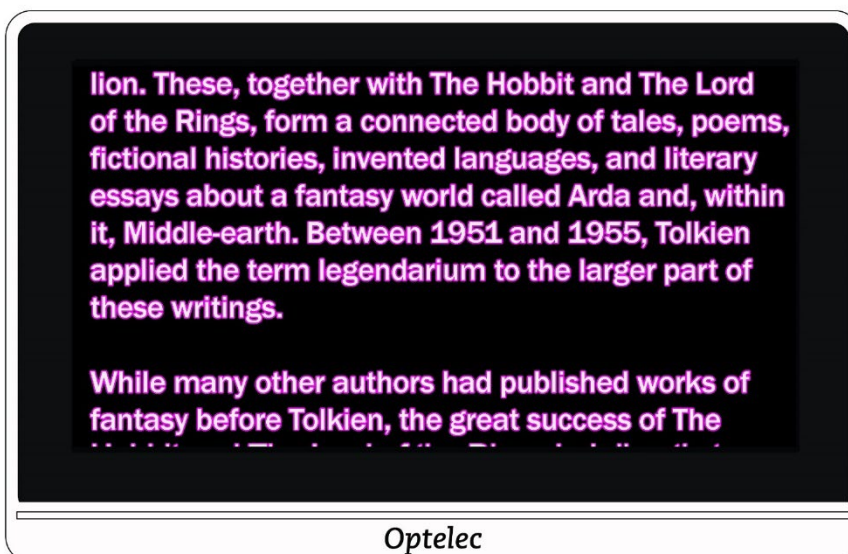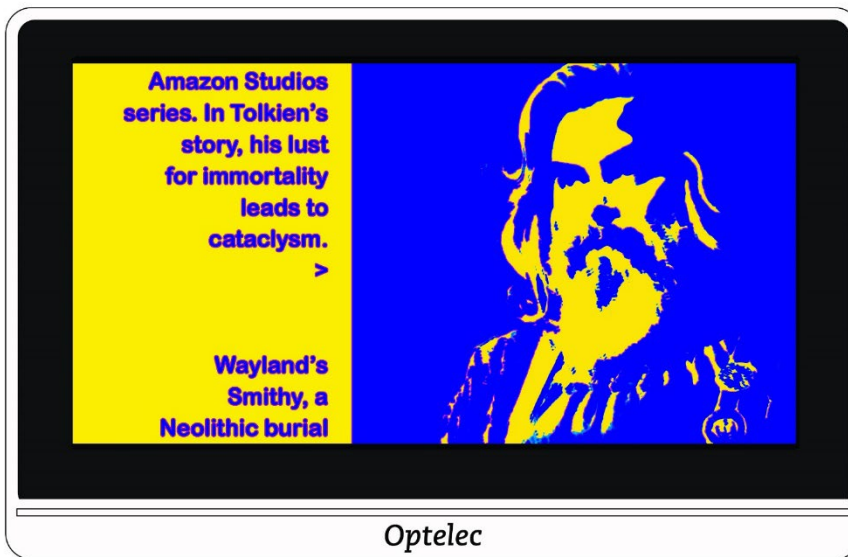

## 6.5 DALTONISMO

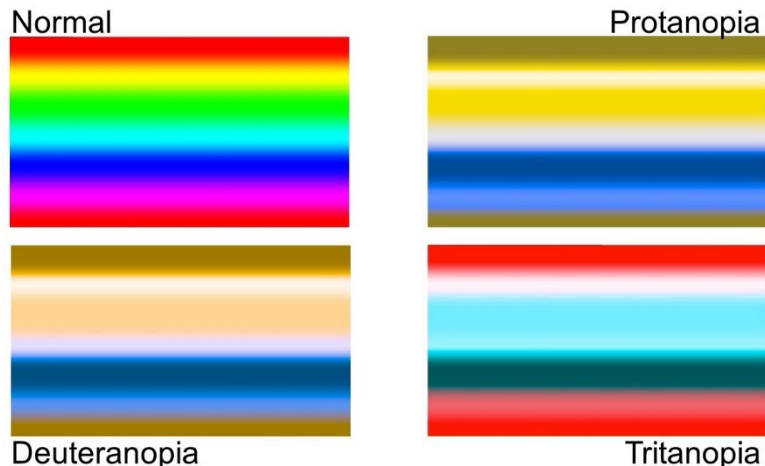


Il videoingranditore è progettato per aiutare con la distinzione dei colori, migliorando il contrasto per utenti con tre tipi di daltonismo. Per usare la funzione Daltonismo, andate a **Menù principale > Aspetto > Daltonismo**. Dovete scorrere in basso per vedere questa opzione.

La schermata Daltonismo mostra quattro riquadri. L'impostazione iniziale di fabbrica è **Nessuno**. Se una delle caselle vi appare di colore grigio fisso, toccatela.

Questa funzione è pensata per tre tipi di daltonismo.

- La protanopia (daltonismo al rosso) viene rilevata posizionando un riquadro blu accanto ad un riquadro rosso.
- La deuteranopia (daltonismo al verde) viene rilevata posizionando un riquadro verde accanto ad uno grigio.
- La tritanopia (daltonismo al blu) viene rilevata posizionando un riquadro blu accanto ad un riquadro rosso.

## 7. Cambiare le impostazioni di sistema

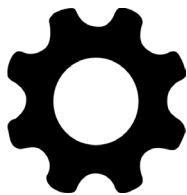

Il menù Impostazioni contiene delle opzioni che vi consentono di cambiare le impostazioni di base del sistema. Per cambiare queste impostazioni, dovete essere in modalità Avanzata in modo che la barra dei pulsanti superiore sia visibile. Se toccate lo schermo e viene mostrata solo la barra dei pulsanti inferiore, significa che siete in modalità Semplificata. Per cambiare la modalità, consultate [Modalità Semplificata e modalità Avanzata](#) a pagina 14.


Le istruzioni per accedere al menù delle impostazioni si trovano dopo il grafico seguente, che mostra il contenuto del menù.

Riga 1	 <b>TEMA</b>	 <b>LUCI</b>
Riga 2	 <b>AUDIO</b>	 <b>MIRACAST</b>
Riga 3	 <b>STANDBY</b>	 <b>Lingua</b>
Riga 4	 <b>AGGIORNAMENTO</b>	 <b>RIPRISTINA</b>









Riga 5

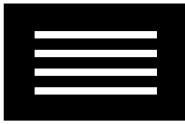


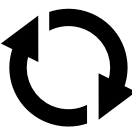





Per mostrare il menù Impostazioni di sistema:

1. toccate lo schermo per mostrare le barre dei pulsanti.
2. Toccate il pulsante Menù nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Verrà mostrato il menù principale.
3. Toccate l'icona Impostazioni nell'angolo in basso a destra.  Verrà mostrato il menù Impostazioni.

Ciascuna opzione nel menù Impostazioni verrà descritta nella tabella seguente. Questo capitolo fornirà ulteriori spiegazioni.

Opzione	Descrizione
 <b>TEMA</b>	 Schermata <a href="#">Tema</a> (pagina 52), che vi permette di impostare un tema chiaro o scuro per i pulsanti ed i menù.
 <b>LUCI</b>	 Schermata <a href="#">Luci</a> (pagina 53), che vi consente di decidere se le luci devono essere accese quando usate le telecamere.
 <b>AUDIO</b>	 Schermata <a href="#">Audio</a> (pagina 53), che vi consente di impostare il volume di sistema.
	 Schermata <a href="#">Miracast</a> (pagina 54), che vi consente di configurare il videoingranditore per trasmettere le immagini ad un dispositivo che

Opzione	Descrizione
MIRACAST	supporta Miracast, come per esempio un monitor o un televisore.
 STANDBY	<b>Zzz</b> Schermata <a href="#">Standby</a> (pagina 56), che vi consente di impostare il tempo di inattività che deve trascorrere prima che il dispositivo vada in Standby.
 Lingua	 Schermata <a href="#">Lingua</a> (pagina 56), che vi consente di cambiare la lingua usata per i menù e i pulsanti.
 AGGIORNAMENTO	 Schermata <a href="#">Aggiornamento</a> (pagina 57), da dove potete installare l'ultima versione del software e del firmware.
 RIPRISTINA	Schermata <a href="#">Ripristina</a> (pagina 58), da cui potete ripristinare il videoproiettore alle impostazioni di fabbrica.
 INFORMAZIONI	Schermata <a href="#">Informazioni</a> (pagina 59), che vi dà informazioni utili nel caso abbiate bisogno di supporto tecnico.

## 7.1 Tema



La schermata Temi vi permette di selezionare uno sfondo chiaro o scuro per menù, schermate e pulsanti. Ad esempio, selezionando



**Chiaro**, otterrete testo chiaro su uno sfondo nero, mentre selezionando **Scuro**, il testo sarà nero su sfondo bianco.

## 7.2 Luci



Questa schermata vi consente di abilitare o disabilitare le due luci per la telecamera per documenti (chiamate **Ingranditore** nella schermata Luci), e la luce per la telecamera a distanza (chiamata **Panoramica** nella schermata Luci).



Le luci di **INGRANDIMENTO** vengono usate con la Telecamera per documenti, e si accenderanno quando viene aperto il supporto.



La luce **panoramica** viene usata con la telecamera a distanza, consentendovi di vedere oggetti a distanza quando il supporto è chiuso.

Toccate il quadrato per accendere o spegnere le luci per ogni telecamera. Quando le luci sono accese, il quadrato e la spunta sono attivi



Scorrete verso destra per accendere la luce (o le luci). Quando è abilitata, lo schermo è selezionato.



Scorrete a sinistra per selezionare la **X** spegnendo le luci. Quando è disabilitata, lo schermo non è selezionato.

## 7.3 Audio



La schermata Audio vi consente di impostare il volume dei suoni di sistema, ad esempio il suono dell'otturatore che si sente quando un'immagine viene scattata con successo. Il nuovo valore del volume verrà applicato immediatamente.

Potete modificare il volume nei seguenti modi:



Fate scorrere il pulsante del volume verso destra per aumentare il volume, e a sinistra per diminuirlo. Ogni volta che modificate il volume, verrà riprodotto un lieve effetto sonoro per farvi ascoltare un esempio del volume selezionato. Se sposterete il controllo del volume totalmente a sinistra, attiverete il **Muto** e l'unità non emetterà alcun suono.

Toccate in qualsiasi punto della sezione **Muto** dello schermo per abilitare o disabilitare l'**audio**.

Il segno di spunta indicherà se il dispositivo è **muto** o meno.




**Muto** è disabilitato.



**Muto** è abilitato.

## 7.4 Miracast

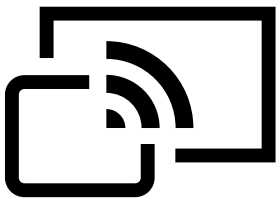

**Miracast**<sup>®</sup> è uno standard per le connessioni wireless. Potrebbe essere descritto come una connessione HDMI di tipo wireless, in cui la connessione senza fili sostituisce il cavo da USB a HDMI che va dal videoingranditore a un computer, tablet, smartphone o televisore.

**Nota:** non è richiesto il Bluetooth per utilizzare Miracast.

Per usare Miracast, dovete avere un computer o altro dispositivo di visualizzazione che supporti Miracast e sia abilitato a ricevere

connessioni. Per istruzioni, fate riferimento alla documentazione del dispositivo.



Per garantire una buona connessione, il videoingranditore deve trovarsi ad un metro dal televisore o altro dispositivo. A seconda della connessione, potrebbe esserci un leggero ritardo.

Lo schermo del videoingranditore verrà duplicato sul televisore o altro dispositivo. Quando fate scorrere un'immagine, quest'ultima scorrerà anche nel dispositivo connesso.

Per abilitare Miracast nel videoingranditore e collegarvi ad un dispositivo di visualizzazione:

1. Andate a **Menù principale > Impostazioni Miracast**.
2. Nell'angolo in alto a destra della schermata Miracast, spostate l'interruttore On/Off verso destra per selezionare la spunta.

3. Il videoingranditore avvierà automaticamente la ricerca di dispositivi disponibili, e li elencherà a schermo. Toccate il nome di un dispositivo per collegarvi. Nella schermata che si apre, toccate **Connetti**. Per tornare alla schermata Miracast senza connettervi, toccate **Ignora**. Potrebbe volerci fino a un minuto per stabilire la connessione. Quando la connessione sarà stabilita, lo streaming video farà comparire lo stesso contenuto sul videoingranditore e sul nuovo dispositivo.
4. Per disconnettervi, tornate alla schermata Miracast. Nell'angolo in alto a destra, spostate l'interruttore a sinistra in modo che sia selezionata la **X**.

## 7.5 Standby



Il tempo di standby indica il periodo di inattività che deve trascorrere prima che il dispositivo entri in modalità standby. Il tempo minimo è **Nessuno**, mentre il massimo è **30 minuti**. Se per esempio toccate **15 MINUTI**, il dispositivo andrà in standby dopo 15 minuti in cui non avviene alcuna interazione dell'utente.

Se toccate **Nessuno**, il dispositivo non andrà mai in standby, indipendentemente dal tempo di inattività. Non vi consigliamo di selezionare quest'ultima opzione, in quanto lo standby aiuta a risparmiare batteria.

## 7.6 Lingua



Nella schermata Lingua, toccate per selezionare la lingua da utilizzare per menù e schermate. La modifica sarà immediata.

**Nota:** assicuratevi che sia selezionata la lingua corretta prima di uscire da questa schermata.

La selezione della lingua compare quando il dispositivo viene acceso per la prima volta. Tuttavia, questa schermata vi consente di cambiare lingua in qualsiasi momento.

## 7.7 Aggiorna



Per ottenere le migliori prestazioni, dovrete aggiornare periodicamente Compact 8 con l'ultima versione del software. Per effettuare l'aggiornamento, avrete bisogno di un'unità USB a doppia uscita (USB-A e USB-C), oppure di un cavo da USB-C a USB-A.

**Nota:** vi raccomandiamo di aggiornare usando un'unità USB. Tuttavia, potete sempre usare un cavo Usb-A Usb-C. Per aggiornare in questo modo, copiate il file di aggiornamento nella directory principale del dispositivo, andate al passo 2 e saltate il passo 3. Se l'aggiornamento non riesce, provate a usare un'unità USB doppia.

Per aggiornare il dispositivo:

1. Scaricate la release del software dal sito di Optelec, quindi trasferitela su un'unità USB che supporti USB-A e USB-C. Il file della release, che ha un'estensione VHU (Vispero Hardware Update), aggiornerà il firmware e il software di Compact 8.

**Suggerimento:** un adattatore USB-C può essere usato con una chiavetta USB-A.

2. Guardando l'icona della batteria nel Menù principale, assicuratevi che la carica sia almeno al 50%. Se necessario, caricate il dispositivo.



3. Inserite l'unità USB-C con il file. VHU delle release nella porta USB di Compact 8.
4. Andate a **Menù principale > Impostazioni Aggiornamento**.  
**Suggerimento:** se viene visualizzato il messaggio “Inserite una chiavetta USB“, provate a capovolgere l'unità e ad inserirla nuovamente nella porta USB.
5. Toccate **Aggiorna**. Durante l'aggiornamento, che può richiedere diversi minuti, verranno visualizzati messaggi di stato. Alla fine dell'aggiornamento, il sistema verrà riavviato.  
**Attenzione:** non rimuovete l'unità Usb finché l'aggiornamento non è stato completato. Ciò potrebbe rendere il dispositivo non più responsivo e richiedere manutenzione.
6. Dopo l'aggiornamento, sarà visualizzata la vista in Tempo reale.

## 7.8 Ripristina



Se non siete soddisfatti delle impostazioni del vostro videoingranditore, potete ripristinarlo ai valori iniziali. Vi troverete in modalità Semplificata, e tutte le impostazioni saranno ai loro valori di fabbrica. Verranno cancellate tutte le combinazioni di colori e le altre impostazioni che potreste aver personalizzato.

**Nota:** non verrà eliminata alcuna impostazione quando ripristinate il videoingranditore. Verranno perse soltanto le personalizzazioni fatte al dispositivo.

Se volete ripristinare il videoingranditore ai valori di fabbrica, andate a **Menù principale > Impostazioni > Ripristina**. Verrà visualizzata una

schermata di conferma. Se toccate **Sì**, le impostazioni verranno ripristinate e tornerete alla vista in tempo reale.

## 7.9 Informazioni



La schermata Informazioni fornisce dettagli sul prodotto, tra cui la versione del software e del firmware, il nome della piattaforma e il numero di serie. Di seguito troverete una descrizione delle opzioni **Supporto tecnico** e **Riconoscimenti**.

### ***Supporto Tecnico***

Questa pagina può aiutarvi a diagnosticare e risolvere i problemi del sistema. Ne avrete bisogno soltanto se vi viene indicato dal [Supporto tecnico](#) o dal vostro distributore. Prima di chiamare o scrivere una email per richiedere assistenza, seguite queste indicazioni per ricevere un supporto più puntuale.

- Preparate una breve descrizione del problema con un esempio; potreste descrivere i passaggi che avete eseguito quando il problema si è verificato. Allegate immagini se possibile.
- Prendete nota dei numeri nella schermata Informazioni (versione app, versione HAL, piattaforma e numero di serie).

### **Esportare il file di supporto**

Se vi viene richiesto dal Supporto tecnico di allegare un file di supporto, seguite queste istruzioni:

1. Inserite un'unità USB-C nel videoingranditore.
2. Andate a **Menù principale > Menù informazioni > Supporto tecnico**.

3. Toccate **Esporta supporto** per esportare Compact8SupportData.zip. Quando visualizzate il messaggio che vi informa che i dati di supporto sono stati copiati, potete rimuovere l'unità USB.
4. Copiate il file esportato dalla chiavetta USB-C su un dispositivo dal quale potete inviare una email.
5. Allegate il file esportato ad una email. In questa email, fornite una [sommara descrizione](#) del problema, oltre a qualsiasi altra informazione che vi viene richiesta dal supporto tecnico.
6. Inviare l'email all'indirizzo fornito.
7. Eliminate i file di supporto seguendo i passaggi nella procedura qui sotto.

### **Elimina File di Supporto**

Se vi viene richiesto dal supporto tecnico di eliminare il file di supporto:

1. Andate a **Menù principale > Menù informazioni > Supporto tecnico**.
2. Toccate **ELIMINA SUPPORTO**.
3. Nella schermata di conferma, toccate **SI'**.

### ***Riconoscimenti***

Questa pagina fornisce informazioni dettagliate sui brevetti, i marchi e le licenze che si applicano a Compact 8.



## Uffici Optelec

### **Optelec Europa**

Pesetastraat 5a  
2991 XT Barendrecht  
Paesi Bassi  
T: +31 (0)88 678 3444  
[www.optelec.com](http://www.optelec.com)

### **Optelec U.S.**

17757 US Hwy 19 N, Suite 560  
Clearwater, FL 33764  
U.S.A.  
T: +1 (800) 444-4443  
[www.optelec.com](http://www.optelec.com)

### **Optelec GmbH**

Fritzlärer Strasse 25  
34613 Schwalmstadt  
Germania  
T: +49 669 196 170  
[www.optelec.de](http://www.optelec.de)

### **Optelec Limited**

Unit H1, Penfold Trading Estate  
Imperial Way  
Watford WD24 4YY  
Regno Unito  
T: +44 1923 23 13 13  
[www.optelec.co.uk](http://www.optelec.co.uk)

### **Optelec Nederland B.V.**

Pesetastraat 5a  
2991 XT Barendrecht  
Paesi Bassi  
T: +31 (0)88 678 3555  
[www.optelec.ni](http://www.optelec.ni)

### **Optelec Canada**

1812 Marie-Victorin  
Longueuil, QC J4G 1Y9  
Canada  
T: +1 (450) 677-1171  
[www.optelec.ca](http://www.optelec.ca)

### **Optelec NV**

Baron Ruzettelaan 29  
8310 Brugge  
Belgio  
T: +32 (0)50 35 75 55  
[www.optelec.be](http://www.optelec.be)



DOC-000929 Rev. P

