

Connect 12



Manuale Utente



INDICE

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO 2: PANORAMICA DEL PRODOTTO.....	4
Contenuto della confezione	4
Introduzione a Connect 12.....	5
Preparare il dispositivo	12
CAPITOLO 3: USARE IL SOFTWARE PRODIGI	15
Inizializzare il tablet di Connect 12.....	15
La barra dei comandi	16
Ingrandimento.....	17
Foto	19
Acquisire una pagina intera	20
Acquisizione di più pagine	21
Lettura	22
Strumenti per la scrittura a mano.....	26
Configurare la funzione Rapido	29
Attivare il filtro luce blu.....	29
Usare il menu Carosello	30
Scaricare Libri.....	31
Funzione “Vai alla pagina”	33
Scrivere note su un libro	34
Segnalibri.....	36
Utilizzare la funzione Rapido	37
Usare la calcolatrice	38
Calcolatrice Grafica Desmos	39
Visualizzare i documenti salvati.....	44
Il menu Impostazioni Galleria	45
Il menu Azione	45
Usare la telecamera a distanza	50
Spostarsi dalla telecamera a distanza alla telecamera da vicino	52
Usare la telecamera a distanza e la telecamera da vicino simultaneamente..	52
Visualizzare le immagini della telecamera a distanza.....	52
Leggere con la telecamera a distanza	53
Rimuovere la telecamera dal braccio.....	53
Visualizzare file di testo in Prodigy	54
Modalità Esame	55
Selezionare la lingua dell’OCR	56

CAPITOLO 4: SCEGLIERE IL CONTRASTO	58
CAPITOLO 5: MODALITA' STANDARD (AFFIANCATO)	59
CAPITOLO 6: MODALITA' SEMPLICE.....	61
CAPITOLO 7: MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI	62
CAPITOLO 8: TASTIERA BLUETOOTH ESTERNA.....	68
La tastiera HumanWare	68
Collegare una tastiera Bluetooth.....	68
CAPITOLO 9: ACCEDERE AD ANDROID	69
CAPITOLO 10: Menu AIUTO	70
CAPITOLO 11: RICARICA TABLET	70
CAPITOLO 12: RICARICA TELECAMERA	71
CAPITOLO 13: AGGIORNAMENTO SOFTWARE	72
CAPITOLO 14: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	74

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato Connect 12 con il software Prodigy, un dispositivo per la disabilità visiva con controllo tattile di HumanWare, leader globale nelle tecnologie assistive per persone ipovedenti. Connect 12 con Prodigy è una semplice, intelligente, portatile linea di prodotti mirata a ripristinare e mantenere l'indipendenza per le persone che convivono con problemi di vista.

Connect 12 è un completo sistema d'ingrandimento che consentirà di ingrandire, leggere documenti, e catturare immagini ovunque ci si trova.

Leggere attentamente le istruzioni per l'utilizzo e la sicurezza che si trovano in questo Manuale Utente prima di usare il dispositivo. In caso di domande, contattare l'Assistenza Clienti di Humanware. I riferimenti per l'assistenza si trovano sul retro di questo Manuale.

Copyright 2023 di Technologies HumanWare Inc., tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotto o distribuito in qualsiasi forma o mezzo, o archiviato in un database o in un sistema di recupero, senza il previo consenso scritto di Technologies HumanWare Inc.

Nota: alcune funzioni contenute in questo manuale potrebbero non essere disponibili nella propria lingua madre.

CAPITOLO 2: PANORAMICA DEL PRODOTTO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Scatola Tablet

- Tablet Connect 12 con software Prodigy™
- Cavo da USB a USB-C
- Alimentatore
- Guida Rapida
- Manuale Utente
- Penna Stilo per Tablet
- Garanzia

Custodia protettiva per il trasporto


- Stand pieghevole

Visione a distanza (opzionale)

- Telecamera a distanza
- Alimentatore
- Cavo USB
- Braccio per telecamera
- Guida Rapida per la telecamera
- Manuale Utente per la telecamera

INTRODUZIONE A CONNECT 12

Parte frontale

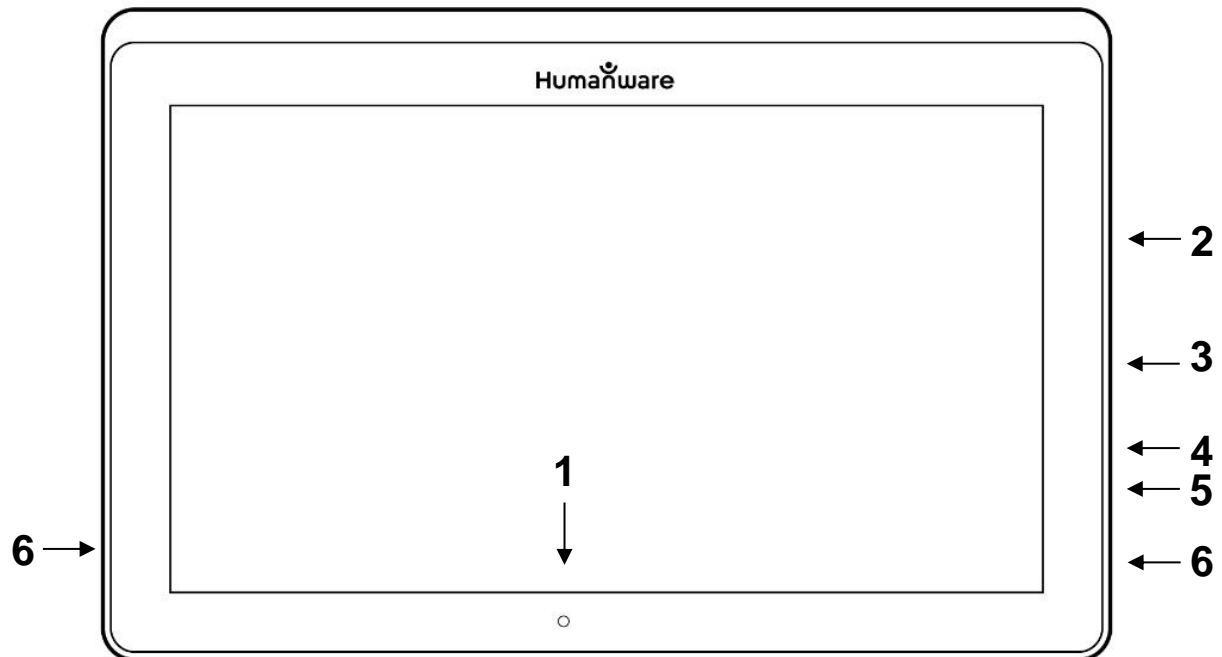


1. Telecamera frontale
2. Slot per Micro-SD
3. Porta USB-C
4. Porta video
5. Jack per cuffie
6. Altoparlanti

Bordo inferiore




1. Volume Giù - Su
2. Pulsante Accensione

Parte posteriore

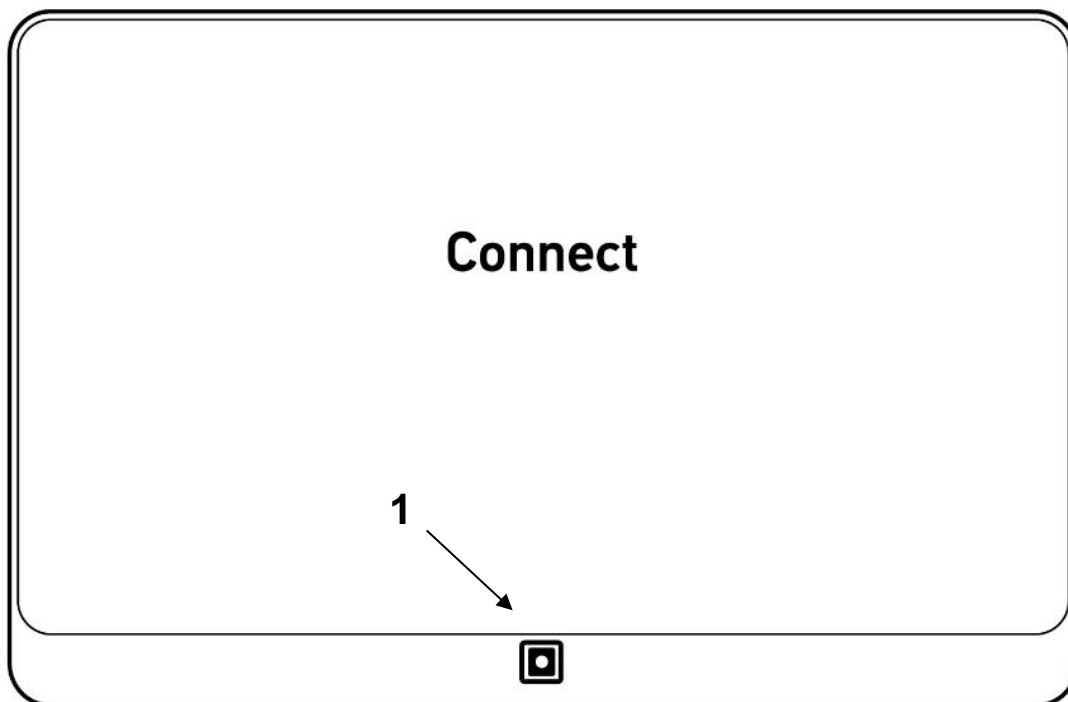


1. Telecamera

Pulsante bandiera

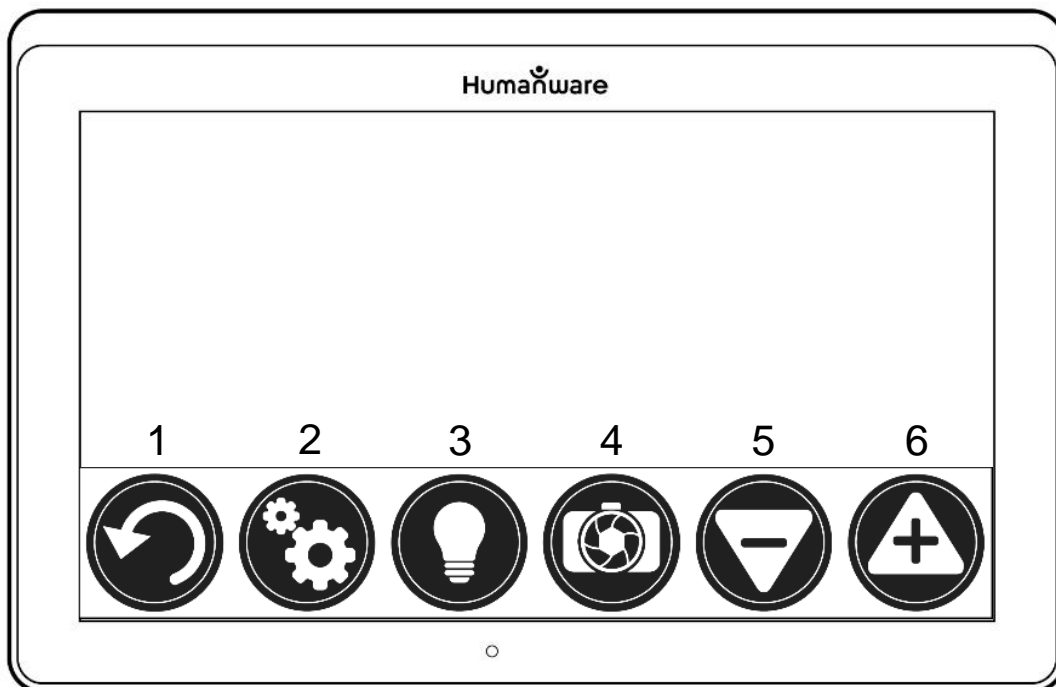


1. Pulsante Indietro
2. Pulsante Imposta
3. Pulsante Luce
4. Pulsante Foto/Lettura
5. Pulsante Diminuisci Ingrandimento
6. Pulsante Aumenta Ingrandimento

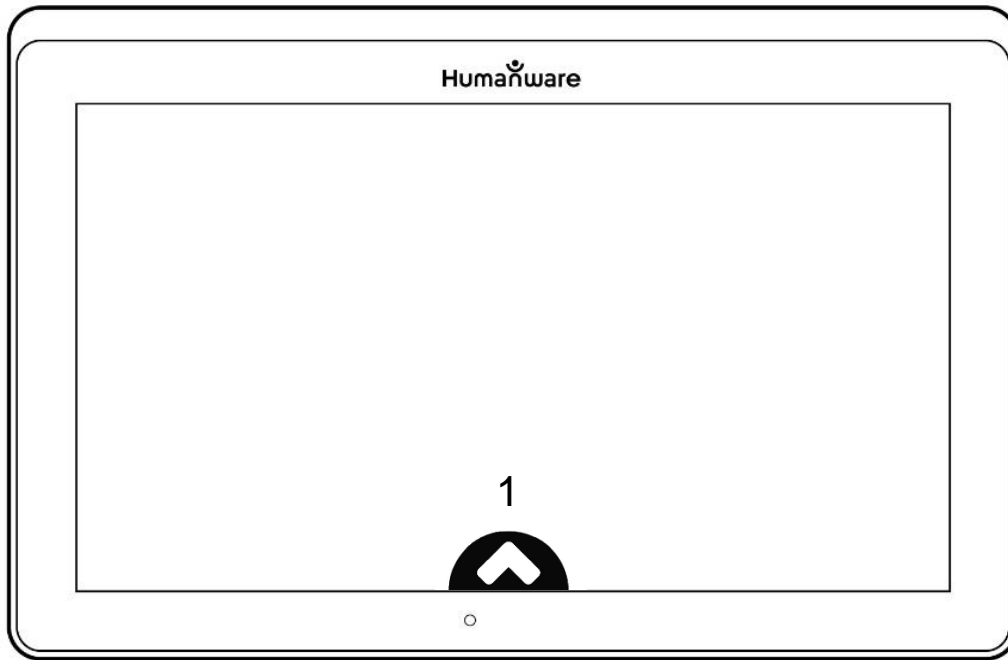


1. Apri Pulsante Bandiera

Stand ripiegabile

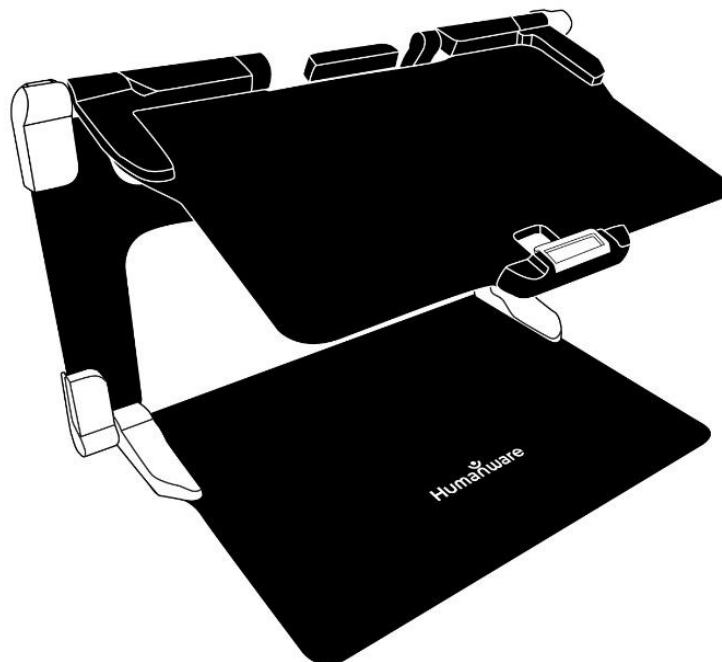


Telecamera a distanza

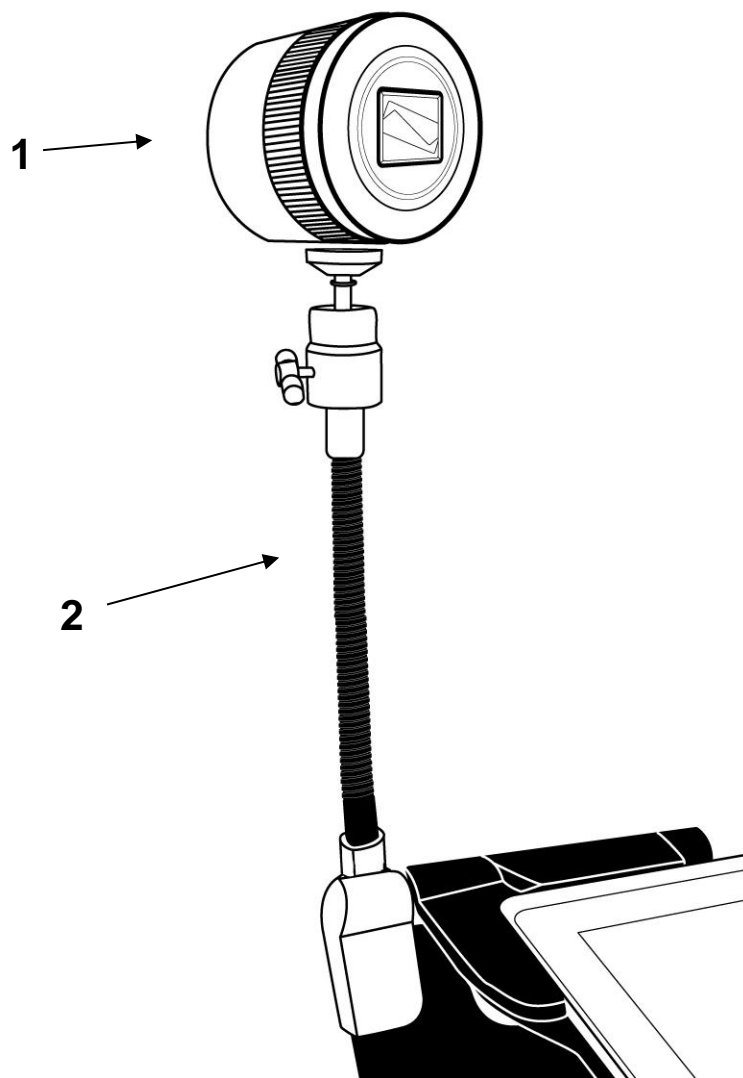


1. Telecamera a distanza
2. Braccio per telecamera

Vista frontale

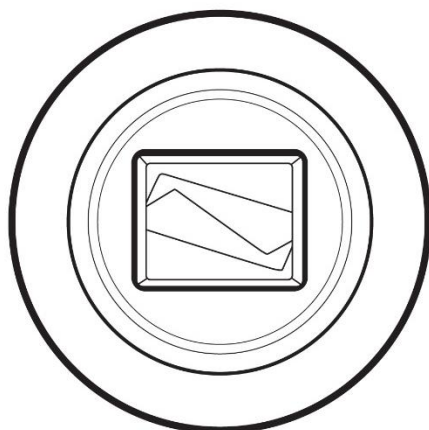


Vista dall'alto

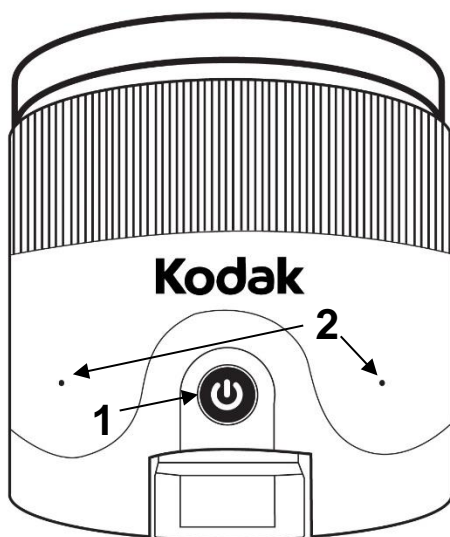

1. Pulsante di accensione
2. Microfoni

Vista da sinistra

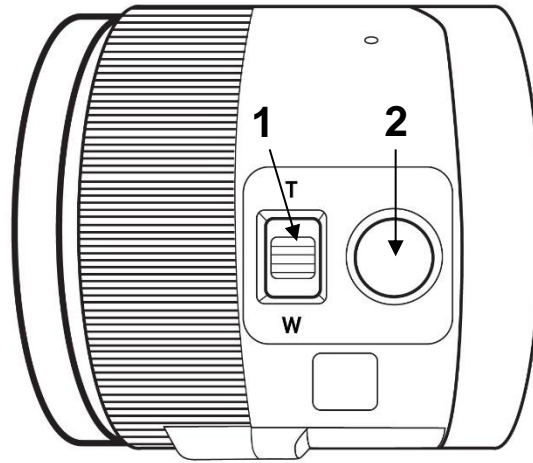


1. Levetta Zoom
2. Otturatore



IMPORTANTE: è indispensabile conservare la Guida Rapida della telecamera a distanza, poichè contiene le informazioni per l'accoppiamento (pairing) del dispositivo.

PREPARARE IL DISPOSITIVO

1. Sopra a una superficie stabile e piana, tenere lo stand in posizione diritta, con il pannello con la scritta "Connect" di fronte a sè. Mentre si tiene la maniglia con una mano, con l'altra aprire il pannello fino a posizionarlo in piano.

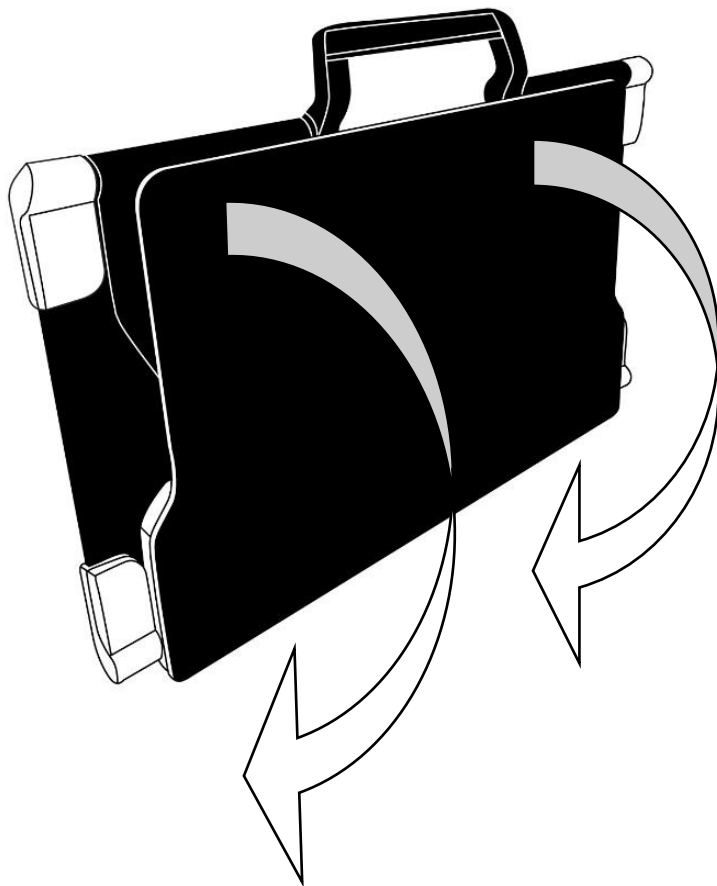


2. Aprire il pannello superiore, fino a posizionarlo in modo che sia parallelo al pannello inferiore.

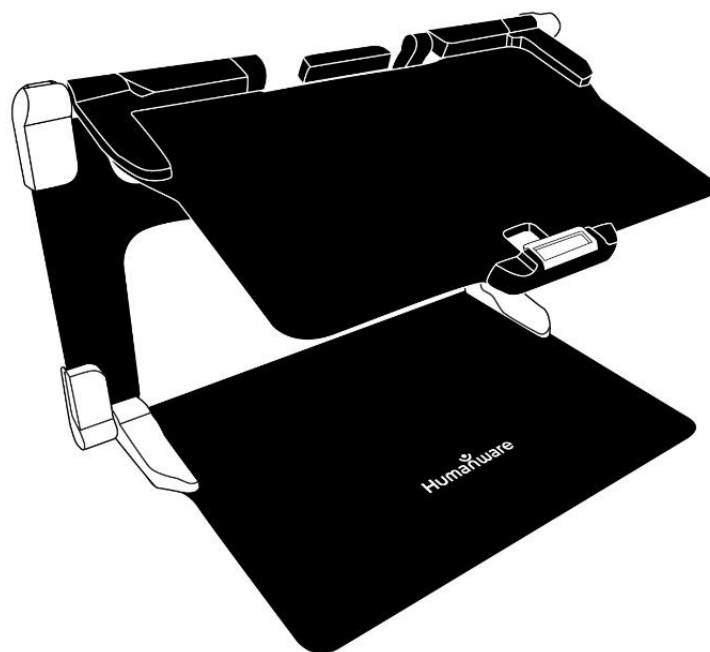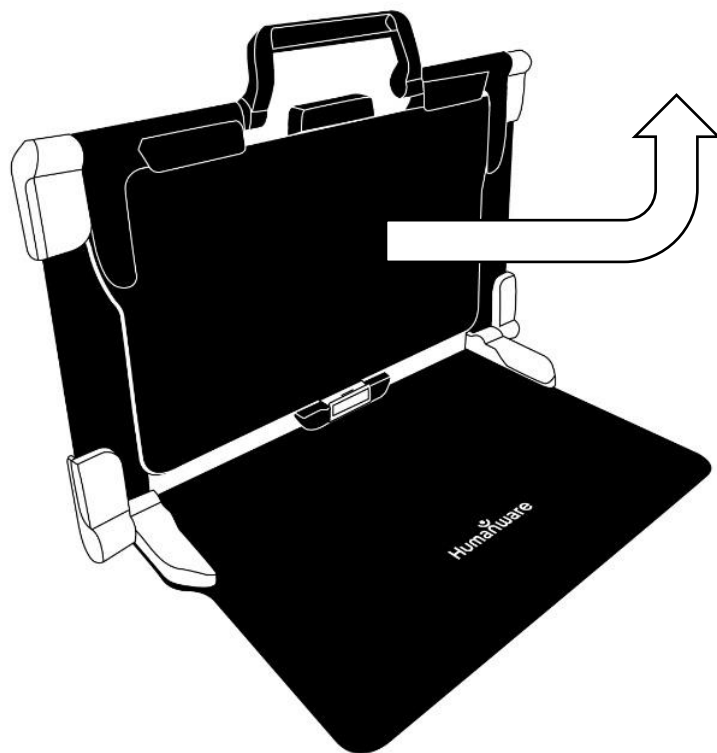

3. Tenere il tablet con lo schermo di fronte a sé, con il logo HumanWare posizionato in alto. Con cautela, inserire la parte superiore del tablet nell'alloggiamento e farlo scorrere in avanti fino a raggiungere la fine. Spingere verso il basso la parte inferiore del tablet: si sentirà un click, che indica che il tablet è ora bloccato. Per sbloccare il tablet, apporre il pollice sulla leva arancione e scorrere verso il basso, verso di sé.



4. Collegare il cavo all'alimentatore in dotazione, quindi collegarlo a una presa elettrica. La porta per la ricarica si trova sulla parte destra del tablet. Lasciare il dispositivo in carica fino a quando la batteria sarà completamente carica (la prima ricarica è di circa 8 ore).

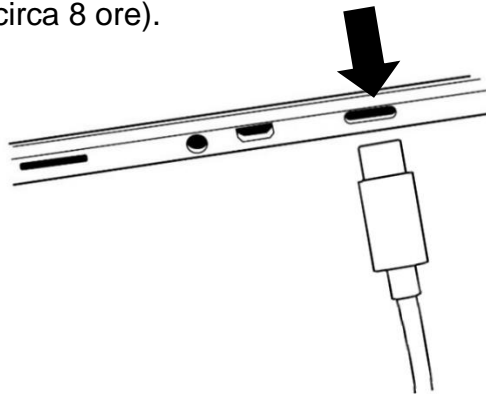

IMPORTANTE: Usare cautela nell'inserimento del cavo nella porta USB-C per la ricarica.

5. Per accendere il dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante di Accensione. Occorreranno circa 30 secondi per l'avvio. Appariranno i loghi HumanWare e Android sullo schermo.

CAPITOLO 3: USARE IL SOFTWARE PRODIGI

INIZIALIZZARE IL TABLET DI CONNECT 12

Per video dettagliati su questo processo, visitare la pagina di supporto per Connect 12 sul sito di HumanWare o il canale YouTube www.humanware.com/connectsupport

Prima che il software Prodigy possa essere usato, occorre inizializzare il tablet di Connect 12 con il setup di Android. Questo processo è quello che viene eseguito per qualsiasi computer. Preparare le seguenti Informazioni:

- Password per Wi-Fi e rete
- Info dell'account Google

Verranno chieste le credenziali per la connessione Wi-Fi, le informazioni sull'account Google e altre richieste legali. Si raccomanda di associare gli account Wi-Fi e Google durante questo processo, ma non è richiesto. Alcuni passaggi potrebbero richiedere alcuni minuti.

Al termine dell'installazione di Android, verrà chiesto di installare Prodigy. Seguire le indicazioni sullo schermo: questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti.


Quando Prodigy è installato, il sistema fa un controllo degli aggiornamenti, quindi verrà chiesto di scegliere una voce o delle voci (fino a quattro) da installare. Anche questo potrebbe richiedere alcuni minuti.

Dopo che Prodigy è stato completamente installato, verrà chiesto di scegliere la propria applicazione Home. In molti casi sarà scelto Prodigy.

È possibile ora accedere al software Prodigy.


LA BARRA DEI COMANDI

La maggior parte delle azioni del software Prodigy sono eseguite attraverso la barra dei comandi, situata nella parte inferiore dello schermo.

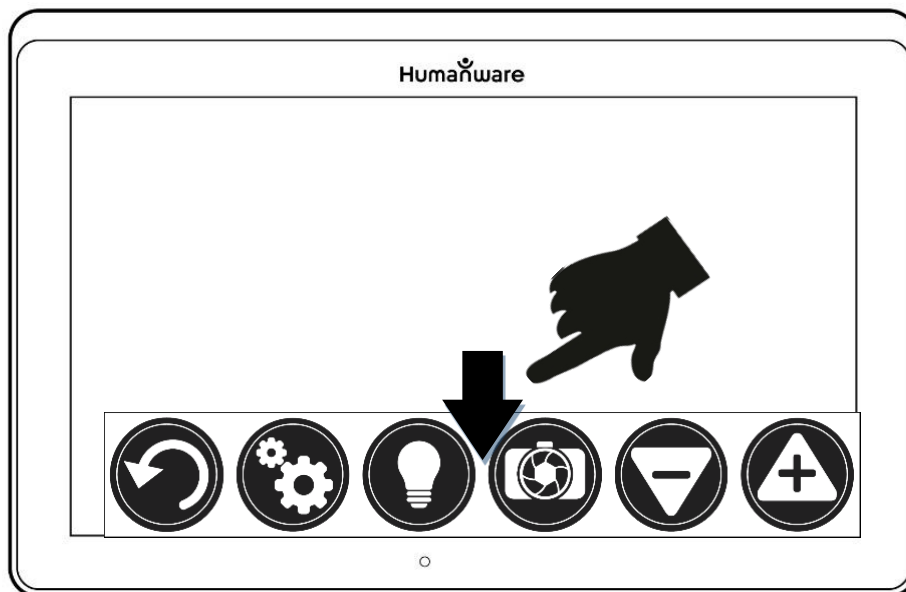

Se si desidera nascondere questo banner per vedere meglio lo schermo, tracciare uno swipe verso il basso sul banner del pulsante (muovere la mano verso il basso mentre si tocca lo schermo con un dito). Il banner verrà sostituito dal pulsante **Apri Bandiera** nella parte inferiore dello schermo.

Toccare questo pulsante o fare uno swipe verso l'alto per visualizzare nuovamente la barra dei pulsanti.

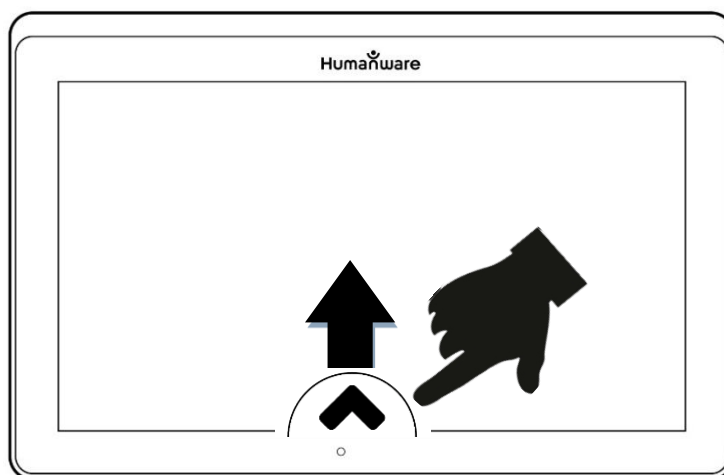

INGRANDIMENTO

- Accendere il tablet.
- Se si utilizza la telecamera posteriore, allineare il tablet sopra il documento o l'oggetto che si desidera visualizzare.
- Se si utilizza la telecamera frontale, posizionarsi davanti al tablet per avere una visione a specchio.
- Aprire l'applicazione ingrandimento dal menu a carosello toccando la sua icona:



- Selezionare la telecamera posteriore se si desidera ingrandire documenti o oggetti. Selezionare la telecamera frontale se si desidera visualizzare sé stessi. È possibile cambiare le telecamere schiacciando sull'icona delle impostazioni, quindi passare da una telecamera all'altra toccando Anteriore/posteriore



È inoltre possibile accedere rapidamente all'opzione fotocamera anteriore/posteriore eseguendo una pressione prolungata (3 secondi) sull'icona della fotocamera.



Quando si utilizza la fotocamera frontale, tenere presente che la funzione OCR (Optical Character Recognition) è automaticamente disabilitata.

- Muovere l'oggetto o il documento sotto il tablet per trovare l'informazione ricercata.


- Toccare i bottoni **Zoom In-Out** per regolare il livello d'ingrandimento. Per aumentare la grandezza dei caratteri, toccare il pulsante **Zoom In (+)**. Per diminuire la grandezza dei caratteri, toccare il pulsante **Zoom Out (-)**. È inoltre possibile toccare e tener premuto i pulsanti **Zoom In-Out** per regolare progressivamente il livello di zoom, e rilasciare una volta trovato il livello di zoom desiderato.



- In aggiunta ai bottoni Zoom In-Out, è possibile utilizzare il **pinch and zoom** per regolare il livello d'ingrandimento. Avvicinare le due dita per diminuire l'ingrandimento, allontanarle per aumentare l'ingrandimento:



- Per alternare i contrasti **colore**, **positivo**, e **negativo**, semplicemente scorrere verticalmente sulla parte destra dello schermo (vedi Capitolo 4: Scegliere il contrasto per maggiori dettagli).

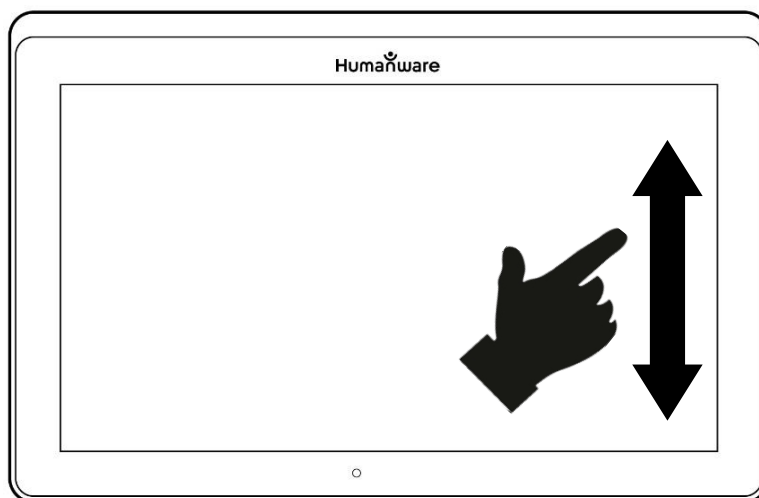

Nota: Il software Prodigis consente di decidere se bloccare o sbloccare l'autofocus della fotocamera. Ciò è utile quando viene visualizzata la corretta messa a fuoco per il documento e si desidera bloccarne la posizione, o quando si esegue un'attività manuale come scrivere su un pezzo di carta e si desidera evitare che il tablet si rifocalizzi sulla mano o sulla matita, per esempio. Per bloccare la messa a fuoco automatica, eseguire semplicemente un **doppio tocco** (tocca due volte rapidamente) in qualsiasi punto dello schermo. Toccare di nuovo due volte in un punto qualsiasi dello schermo per sbloccare la messa a fuoco automatica. La seguente icona apparirà sul lato destro dello schermo quando la messa a fuoco automatica è disattivata:



FOTO

- Utilizzando il supporto pieghevole, posizionare la tavoletta sopra il documento o l'oggetto che si desidera acquisire.


Nota: Non è necessario che il tablet sia perfettamente allineato sopra il documento; per impostazione predefinita, Prodigis correggerà automaticamente l'angolazione del tablet. Sullo schermo, due forme triangolari su ciascun lato del documento indicheranno la correzione dell'angolo. È possibile modificarlo accedendo alle Impostazioni. Toccare il pulsante Impostazioni, scorrere verso

l'alto per selezionare Correzione angolo e selezionare Abilitato o Disabilitato. Toccare Indietro per uscire.

- Toccare il pulsante Foto per fotografare un documento o toccare e tenere premuto il dito sullo schermo per 2 secondi.



- Si sentirà un suono, seguito da un click, che indica che il documento è stato fotografato.
- Una volta fatta la foto, il Pulsante Lampadina verrà sostituito dal Pulsante Salva. Questo pulsante permette di salvare le foto nella Galleria.

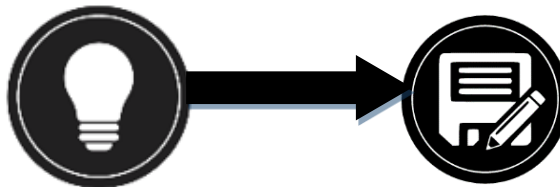

- Toccare il pulsante Salva per salvare il documento nella Galleria per utilizzarlo in un secondo momento.
- Toccare il pulsante Indietro se si desidera tornare alla Modalità Ingrandimento Live.

ACQUISIRE UNA PAGINA INTERA

Per acquisire una pagina intera:


- Invece di posizionare il foglio in verticale, posizionarlo lateralmente (posizione orizzontale) in modo che la parte superiore del testo si trovi sotto il bordo sinistro del Connect e la parte inferiore del testo si trovi sotto il bordo destro del tablet.
- Dalla modalità Ingrandimento, toccare il pulsante “Diminuisce Ingrandimento” una volta. Questo attiverà la visione a pagina intera; accendere il LED e ridurre il pulsante a Bandiera.
- Allineare la pagina sotto il supporto in modo che tutto il testo venga visualizzato sullo schermo.
- Toccare il pulsante Foto o tenere premuto il dito in basso sullo schermo per fotografare.

Consiglio: Per fotografare più testo, è possibile sollevare il tablet, consentendo un maggiore angolo di visione.

Per tornare alla modalità Live e catturare oggetti o documenti più piccoli, semplicemente toccare sul pulsante Banner per aprirlo e premere il pulsante Zoom In una volta.

ACQUISIZIONE DI PIÙ PAGINE

- Per acquisire un documento multipagina, attivare la modalità Acquisizione Multipla, scorrendo verticalmente sulla parte sinistra dello schermo:

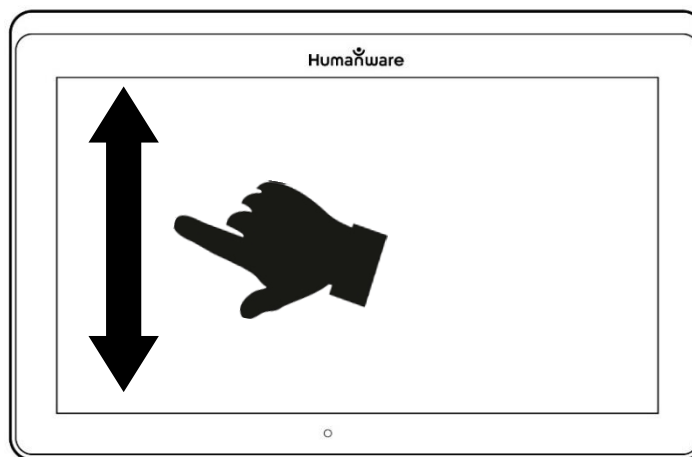

Note: è possibile attivare l'acquisizione multipla dalle Impostazioni. Fare un tocco sul pulsante Imposta, scorrere verso l'alto per selezionare Modalità e fare un tocco per impostare Acquisizione Multipla. Fare un tocco su Indietro per uscire dalle Impostazioni.

- È possibile ora acquisire un documento multipagina. Allineare il tablet sopra la prima pagina del documento e fare un tocco sul pulsante Foto oppure tenere premuto il dito sullo schermo. Procedere in questo modo per ciascuna pagina. Il documento multipagina sarà salvato nella Galleria per un futuro utilizzo.
- Fare un tocco sull'icona Galleria.




- Fare un tocco sulla prima pagina del documento per aprirlo. Fare un tocco sul pulsante Lettura per iniziare a leggere.
- Terminata la lettura, fare un tocco sul pulsante Indietro per tornare al documento. Fare ancora un tocco su Indietro per tornare alla modalità Ingrandimento.



LETTURA

Una volta fatta una foto, il pulsante Foto cambierà da un'immagine di una macchina fotografica a un simbolo Play. Questo è il pulsante Leggi.

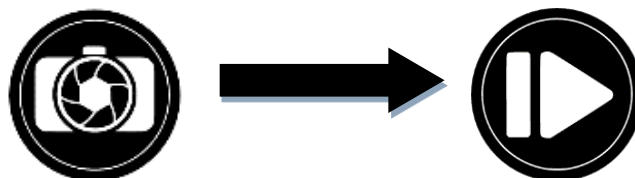

- Toccare Leggi o premere a lungo un punto qualsiasi dello schermo per 2 secondi per scorrere e leggere ad alta voce il testo in base alle proprie preferenze di lettura. È possibile anche premere a lungo su una parola specifica nel documento per iniziare a leggere da quella parola.



Nota: Quando si preme Leggi, il pulsante Bandiera si comprime per fornire una visione migliore dell'immagine. Può essere riaperto premendo il pulsante Apri Bandiera o facendo uno swipe verso l'alto nella parte inferiore dello schermo.

- Per regolare il volume, utilizzare i pulsanti Volume giù-su.
- Per mettere in pausa, toccare di nuovo Leggi o premere a lungo in un punto qualsiasi dello schermo.
- Durante la pausa, toccare Indietro per uscire dalla visualizzazione di lettura e di nuovo Indietro per tornare alla visualizzazione della telecamera.




- Per tornare indietro, toccare nuovamente il pulsante Leggi, o tenere premuto a lungo.

Per ingrandire in un documento fotografato:


Usare i pulsanti **Aumenta/Diminuisce Ingrandimento** per aggiustare il livello di ingrandimento. Per ingrandire il carattere, toccare il pulsante **Aumenta Ingrandimento (+)**. Per diminuire la grandezza del carattere toccare il pulsante **Diminuisce Ingrandimento (-)**. È anche possibile toccare e tenere premuto il pulsante per Ingrandimento per aggiustare progressivamente il livello di zoom, rilasciandolo una volta raggiunto il livello di zoom desiderato.

- In aggiunta ai pulsanti **Aumenta/Diminuisce Ingrandimento**, è possibile usare il gesto **pinch e zoom** per regolare il livello di zoom.
- Per ingrandire istantaneamente un'area d'interesse, toccare l'area che si desidera visualizzare e l'immagine verrà ingrandita in quella posizione al livello di zoom preferito.
- Se ci si trova ad un livello di zoom superiore, è possibile spostarsi all'interno del documento ingrandito eseguendo un **gesto di Panoramica** (spostare lentamente il dito sullo schermo senza sollevarlo).

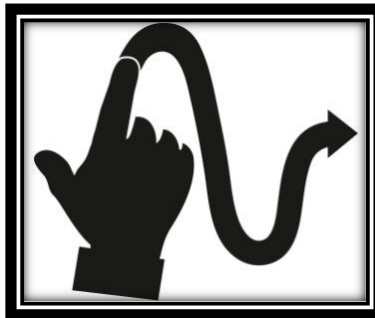

- Fare la panoramica per raggiungere altre parti dell'immagine ingrandita.

- Per spostarsi tra i diversi contrasti, scorrere sul lato destro dello schermo (vedi figura) o accedere alle Impostazioni (vedi Capitolo 4 per ulteriori dettagli).

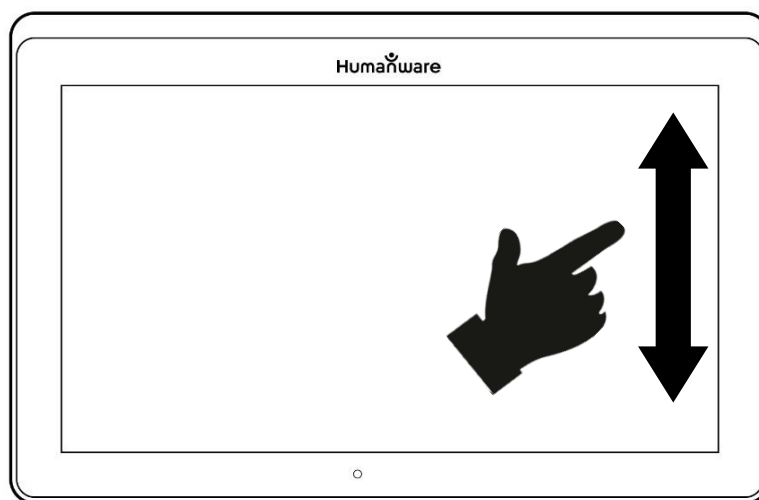

Nota: il testo si può presentare in tre differenti formati (Modalità di Lettura): il formato può essere cambiato dalle Impostazioni in una singola riga con la **Modalità Riga**, a colonne con la **Modalità Colonna** (predefinita), o è possibile leggere il testo senza perdere la sua configurazione con la **Modalità Pagina**. Due simboli “maggiore di” (>>) identificheranno la fine della pagina nelle Modalità Riga e Colonna.


Il software Prodigis emetterà un beep e annuncerà “Fine documento” quando si raggiunge la fine del documento; toccare Leggi per iniziare a leggere nuovamente dall’inizio.

- Per impostare una modalità di lettura diversa, toccare il pulsante Impostazioni e scorrere verso l'alto per selezionare Modalità di lettura.



- Toccare Modalità di lettura per alternare il valore. Toccare Indietro per uscire dalle Impostazioni.

- È possibile aumentare temporaneamente la velocità del parlato durante la lettura scorrendo verso sinistra (facendo scorrere e rilasciare il dito verso sinistra) sul touchscreen e ridurre la velocità del parlato scorrendo verso destra. Si noti che la modifica della velocità del parlato cambierà la velocità di lettura (velocità di scorrimento del testo) di conseguenza.

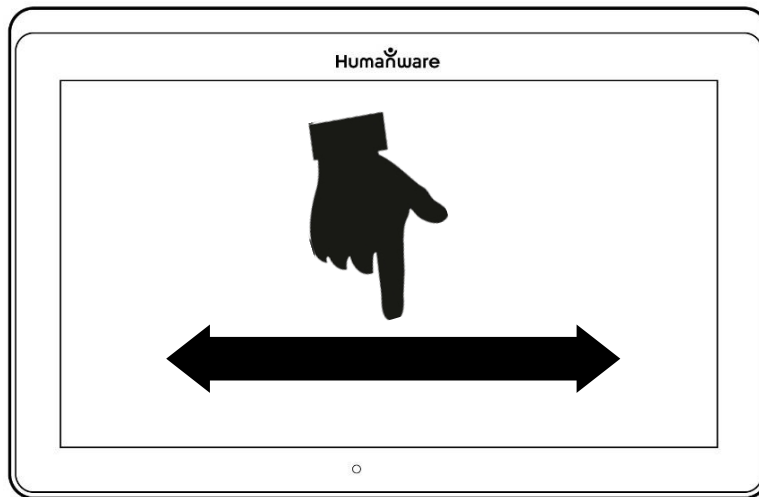

Nota: è possibile anche aumentare o diminuire la velocità del parlato in modo permanente dalle Impostazioni. Toccare il pulsante Impostazioni, selezionare Velocità voce e selezionare un valore. Toccare Indietro due volte per uscire dalle Impostazioni.

Nota: è possibile modificare la velocità di lettura (velocità di scorrimento del testo) scorrendo verso sinistra o verso destra, oppure dalle Impostazioni anche quando la voce è disattivata.

- Per attivare e disattivare la voce, toccare semplicemente due volte lo schermo durante la lettura. In alternativa, toccare il pulsante Impostazioni, selezionare Voce e selezionare Solo documenti o Disattiva.
- Il software Prodigy dispone di 4 voci diverse, che possono essere utilizzate per leggere ad alta voce documenti di testo. Per selezionare una voce diversa, toccare il pulsante Impostazioni, selezionare Voce e toccare per alternare tra le 4 voci di lettura.


- Toccare Indietro per tornare al tuo documento. Assicurarsi che la lingua della voce selezionata sia la stessa del documento che si vuole leggere.
- Toccare Indietro per interrompere la lettura e tornare alla visualizzazione della fotocamera.

STRUMENTI PER LA SCRITTURA A MANO

Il software Prodigy permette di utilizzare alcune funzioni per scrivere a mano, utili per evidenziare, per disegnare, oppure per scrivere sui vostri documenti e immagini acquisiti.

Per aprire la funzione Scrittura:

- Aprire un'immagine salvata nella Galleria oppure salvare un'immagine acquisita nell'applicazione Telecamera.
- Fare un tocco sull'icona Penna nel menu a Bandiera. Questa penna serve per attivare la funzione Scrittura a mano.

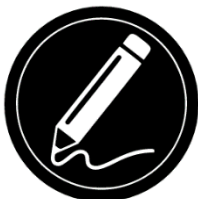


Si possono notare 4 nuovi pulsanti nel menu a Bandiera.

È possibile selezionare Penna, Evidenziatore o Testo. L'icona visualizzata modificherà in base allo strumento selezionato.

Le icone sono mostrate di seguito:




La Gomma è usata per cancellare segni di matita, evidenziatore o testo.

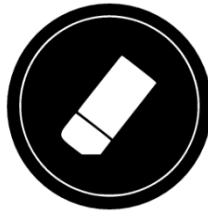

Il pulsante Colore Penna apre la lista colori. Fare un tocco sul colore che si vuole scegliere per il tratto della Penna o dell'Evidenziatore.



Il pulsante Dimensione (tratto) Penna apre il menu dove è possibile scegliere la dimensione del tratto della Penna o dell'Evidenziatore.

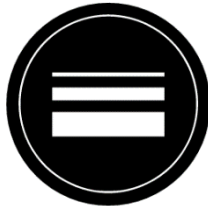

Per usare la Penna o l'Evidenziatore:

- Selezionare la Penna o l'Evidenziatore facendo un tocco sul secondo pulsante nel menu a Bandiera (secondo pulsante). Trascinare il dito sullo schermo per scrivere con la Penna o l'Evidenziatore.

Per cancellare Testo oppure segni di Penna/Evidenziatore:

- Selezionare la funzione Gomma facendo un tocco sul pulsante Gomma (terzo pulsante).
- Trascinare il dito sopra ciò che si desidera cancellare.
- Terminata l'operazione, deselegionare la funzione Gomma facendo nuovamente un tocco su Gomma.

Nota: La funzione Gomma cancellerà solo i segni del tipo di strumento selezionato.

Per scrivere un testo:

- Selezionare lo Strumento Testo facendo un tocco sul secondo pulsante nel menu a Bandiera.
- Premere e tenere premuto con il dito sullo schermo dove si vuole scrivere il testo.
- Una tastiera virtuale apparirà sullo schermo; usarla per digitare il testo. È possibile anche usare una tastiera fisica Bluetooth, se ne si è in possesso, accoppiata al dispositivo.
- Terminata la digitazione del testo, premere il pulsante FINE nell'angolo in alto a destra dello schermo per confermare il testo. In alternativa, premere **Ctrl + INVIO** per confermare il testo se si sta usando una tastiera.

Per spostare un testo:

- Selezionare lo Strumento Testo facendo un tocco sul secondo pulsante nel menu a Bandiera.
- Fare un tocco una volta sul testo per selezionarlo. Apparirà una scatola rossa intorno al testo, che significa che ora è selezionato.
- Trascinare il testo nella sua nuova posizione.
- Fare un tocco ovunque sullo schermo per deselegionare il testo.

Per ridimensionare il vostro testo:

- Selezionare Testo facendo un tocco sul pulsante nel menu a Bandiera (secondo pulsante).
- Fare un tocco una volta sul vostro testo per selezionarlo. Apparirà un rettangolo rosso intorno al testo, che significa che è ora selezionato.
- Modificare la dimensione del testo facendo il gesto di pizzicare (*pinch*): diminuire la distanza tra le due dita per ridurre la dimensione del testo, e aumentare la distanza per ingrandire il testo.
- Fare un tocco in qualsiasi punto dello schermo per deselegionare il testo.

Per fare la Panoramica in un'immagine che è stata modificata:

- Posizionare due dita sull'immagine.
- Trascinare le dita verso l'alto, in basso, a destra o a sinistra.
- Quando si ha finito, sollevare le dita dallo schermo.


Osservare che se la distanza tra le dita varia mentre si esegue la panoramica, l'immagine cambierà il suo ingrandimento.

CONFIGURARE LA FUNZIONE RAPIDO

La funzione Rapido permette di accedere velocemente alle applicazioni preferite, scorrendo con le dita il contenuto dello schermo.

Per usare la funzione Rapido:

- Andare in Impostazioni e fare un tocco su Applicazioni.
- Selezionare Rapido.
- Per abilitare la funzione Rapido, selezionare almeno un'applicazione. È possibile anche usare la funzione Trova e digitare l'applicazione che si vuole aggiungere, oppure selezionare Applicazioni per selezionare tutte le app desiderate dalla lista.
- È possibile attivare questa funzione facendo scorrere due dita verso il centro dello schermo, partendo da sinistra verso destra, come mostrato in figura. Prodigis rileva lo scorrimento delle dita e attiva la successiva app che avete selezionato per essere inclusa nella lista.

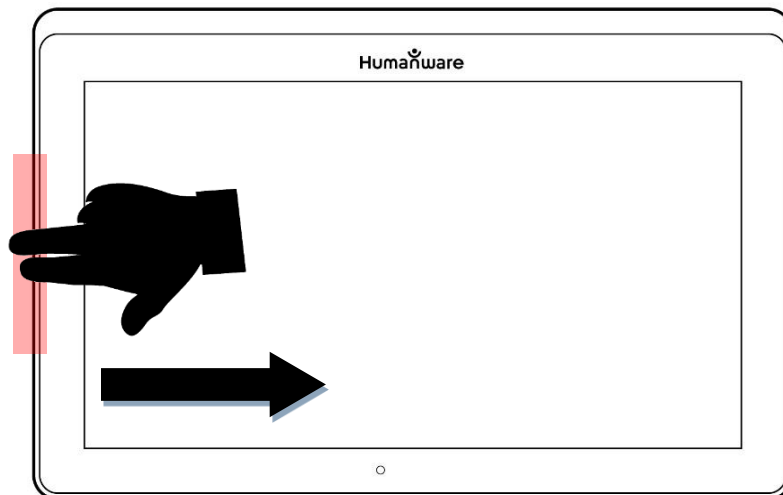

- La funzione "Rapido" può essere usata da qualsiasi applicazione.

ATTIVARE IL FILTRO LUCE BLU

Prodigi è fornito di un Filtro Luce Blu che permette di ridurre la quantità di luce blu visualizzata sullo schermo. La luce blu è conosciuta poichè riduce la


produzione di melatonina, un ormone che favorisce il sonno: questo filtro è utile per l'insonnia.

Per attivare/disattivare il Filtro Luce Blu nel Connect 12:

- Dal menu Carosello, selezionare l'icona Imposta:



- Nel menu Imposta, scegliere l'opzione 'Interfaccia Utente'.
- Scegliere l'opzione "Filtro Luce Blu".
- Tre livelli di filtro sono disponibili: basso (low), medio (medium), alto (high). Scegliere quello preferito facendo un tocco su di esso.
- Il colore dello schermo è ora cambiato in base alla scelta.
- Quando il Filtro Luce Blu è impostato come attivo, è possibile disattivarlo tornando nel menu Filtro Luce Blu menu e selezionando l'opzione 'Disattivato/Off'.

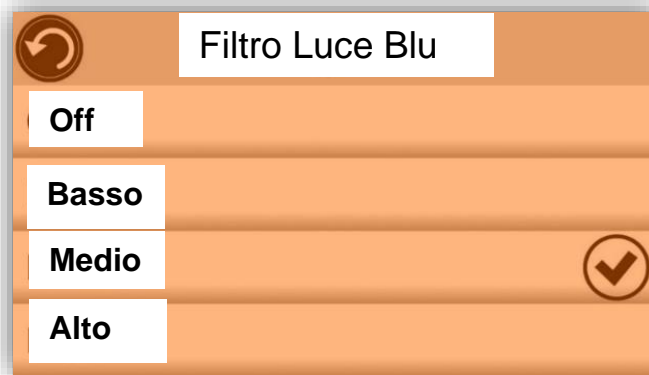

USARE IL MENU CAROSELLO

Il software Prodigis ha 9 applicazioni principali: App, Rapido, Calcolatrice, Libri, Telecamera per distanza (disponibile solo se è stata acquistata la telecamera per distanza), Lente, Galleria, Imposta e Aiuto. Sono visualizzate una ad una nel menu Carosello:



Per entrare nel menu Carosello dalla Lente:

- Fare un tocco su Indietro per chiudere la Lente e entrare nel menu Carosello.
- Prodigy dirà “Carosello Principale” seguito dall’applicazione selezionata.
- L’applicazione attualmente selezionata è posizionata nel centro dello schermo.
- Scorrere a sinistra oppure a destra nel menu Carosello per selezionare un’applicazione.
- Per attivare un’applicazione selezionata, semplicemente fare un tocco sull’applicazione.
- Per annullare e tornare al menu Carosello, fare un tocco su Indietro.

Nota: è possibile accedere al menu Carosello da qualsiasi parte ci si trovi nell’applicazione Prodigy, facendo un doppio tocco con due dita su qualsiasi parte dello schermo.

SCARICARE LIBRI

L’applicazione Libri in Prodigy permette di scaricare libri, riviste e altri periodici forniti da varie biblioteche internazionali.

Per scaricare materiale di lettura:

- Selezionare e fare un tocco sull’icona Libri nel menu Carosello:



- All’apertura di Libri, bisogna selezionare uno dei Libri oppure iscrizioni. Per fare ciò, selezionare Gestisci Librerie, quindi selezionare Fornitori di Libri oppure Fornitori di Riviste.
- Fare un tocco su una libreria e autenticarsi con lo username e la password ricevute dal fornitore del servizio. Prima di tutto, digitare il nome utente e fare un tocco sul pulsante blu sulla parte destra della tastiera. Quindi inserire la password e fare ancora un tocco sul pulsante blu. Le informazioni del login saranno salvate.

Nota: La password sarà nascosta, come impostazione predefinita. Fare un tocco sull’icona Occhio alla destra della casella della password per mostrare la vostra password. Toccare nuovamente per nasconderla.

Una volta autenticati, fare un tocco sul pulsante Indietro per due volte, fino a ritornare al menu principale Libri. Ogni libreria per la quale è stato eseguito un login apparirà ora in questa lista.

- Ogni Libreria ha diversi campi di ricerca, per esempio: Titolo, Nuove uscite, Autore, Parole chiave, Categoria, Contenuto, ISBN, ecc.
- Per scaricare un libro che si vuole leggere, fare un tocco sul pulsante Download/Scarico mentre sono visualizzati i dettagli del libro. Il libro sarà aggiunto al sottomenu “I miei libri”.
- Per leggere un libro scaricato, selezionare il sottomenu “I miei Libri”. Selezionare il libro dalla lista e fare un tocco per aprirlo.
- Per scaricare una rivista o un quotidiano, occorre prima iscriversi, andando in Gestisci Librerie, selezionare una categoria, fare un tocco sulla rivista o il quotidiano a cui ci si vuole abbonare. Un segno di spunta apparirà sulla destra e una finestra di popup informerà che è stato aggiunto il periodico alla propria biblioteca.
- Fare un doppio tocco sul pulsante Indietro per tornare al Menu Libri.
- Per leggere una rivista oppure un giornale scaricato, selezionare “I miei abbonamenti”, selezionare la rivista oppure il quotidiano desiderato, fare un tocco sulla pubblicazione che ha una grossa freccia nera sulla destra della data di pubblicazione. Quando lo scarico sarà completato, fare un tocco sulla pubblicazione per iniziare a leggerla.
- Premere Lettura per iniziare a leggere, come in un normale documento.
- Premere Lettura ancora per mettere in pausa. Sarà possibile quindi scorrere a sinistra oppure a destra per navigare tra le pagine del libro.
- È possibile anche navigare capitolo per capitolo nel libro scaricato, usando il pulsante Navigazione nel menu a Bandiera e quindi selezionando l'Indice:



- Si vedrà la lista dei capitoli dei libri scaricati, scorrere verso l'alto oppure verso il basso, selezionare un capitolo, e premere Lettura partendo da questo punto.
- Premere Indietro per uscire e ritornare alla lista dei libri scaricati. Premere ancora Indietro per tornare al menu “Libri”.

FUNZIONE “VAI ALLA PAGINA”

L'applicazione Libri in Prodigy ha la funzione “Vai alla Pagina” che permette una navigazione più rapida all'interno di un libro.

NOTA: Questa funzione è disponibile solo con i libri che hanno numerazione pagine e/o un Indice creati dall'editore.

Navigazione Indice:


- Quando un libro è aperto, fare un tocco sul pulsante Navigazione e selezionare Indice. L'Indice si aprirà.
- Fare un tocco sulla sezione oppure capitolo dove si desidera accedere dall'Indice.
- Prodigy aprirà la pagina dove inizia la sezione selezionata o il capitolo selezionato.

Navigazione “Vai alla pagina”:

- Fare un tocco sul pulsante Navigazione Libri. Si aprirà un menu.



- Fare un tocco sulla opzione “Vai alla Pagina” nel menu. Una casella di testo apparirà.
- Digitare il numero oppure il nome della pagina che si desidera visualizzare e fare un tocco sul pulsante OK. Prodigy aprirà il libro alla pagina selezionata.

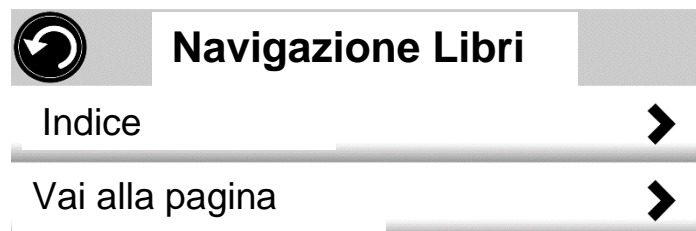

Navigazione Elenco Pagine:

- Fare un tocco sul pulsante Navigazione Libri. Si aprirà un menu.
- Fare un tocco sull'opzione 'Elenco Pagine' nel menu.
- Selezionare dalla lista la pagina alla quale volete accedere. Prodiggi entrerà nel libro alla pagina selezionata.

SCRIVERE NOTE SU UN LIBRO

È possibile aggiungere tre diversi tipi di note ad un libro scaricato per supportare varie esigenze personali e scolastiche: 1) Scrivere note usando lo schermo touch 2) Evidenziare e 3) Digitare note di testo.

Aggiungere una nota scritta usando lo schermo touch:

- Nel menu a Bandiera, fare un tocco sull'icona Penna. Appariranno le opzioni per selezionare Penna, Gomma, Colore Penna e Dimensione tratto Penna.



- Fare un tocco sulla Penna per creare Note. È possibile ora usare lo schermo touch per scrivere direttamente sulla pagina usando il vostro dito o la pennetta stilo.
- Se si desidera cancellare una Nota oppure pulire un tratto fatto per sbaglio, fare un tocco sull'icona Gomma. È possibile cancellare la Nota desiderata scorrendo il dito oppure la pennetta stilo sopra l'area dove c'è il testo da cancellare.
- Fare un tocco sull'icona Indietro per uscire dalla Modalità Note.

Evidenziare una parte di testo:

- Nel Menu a Bandiera, fare un tocco sulla Penna. Appariranno le opzioni per selezionare Penna, Gomma, Colore Penna e Dimensione tratto Penna.
- Fare un tocco sulla Penna per creare Note. Fare ancora un tocco sulla Penna per attivare l'Evidenziatore. È possibile ora usare lo schermo touch per evidenziare direttamente sulla pagina usando il dito oppure una pennetta stilo.



- Se si desidera cancellare un'evidenziazione oppure togliere un segno, fare un tocco sull'icona Gomma. È possibile cancellare l'evidenziazione scorrendo il dito oppure la pennetta stilo sopra l'area dove c'è il testo evidenziato. Fare un tocco sull'icona Indietro per uscire dalla Modalità Note.

Digitare Note di testo:

- Nel menu a Bandiera, fare un tocco sull'icona Penna. Appariranno le opzioni per selezionare Penna, Gomma, Colore Penna e Dimensione tratto Penna. Fare un tocco sulla Penna per creare Note. Fare ancora un tocco sulla Penna per attivare l'Evidenziatore, quindi ancora per attivare la funzione Digita Testo (icona "T").



- Ora fare un tocco sul documento/libro. Una casella di testo apparirà.
- Fare un tocco all'interno del testo per usare la tastiera a schermo.
- Digitare la Nota. Terminata l'operazione, fare un tocco su Invia.
- Se si desidera spostare la casella di testo contenente la Nota, è possibile farlo premendo e tenendo premuto sulla casella, quindi scorrere il dito nella posizione dove si desidera posizionarla.
- Per cancellare il testo digitato dal documento/libro, scegliere l'icona Gomma e scorrere il dito oppure la pennetta stilo sopra la nota.

SEGNALIBRI

Segnalibri è una funzione utile per tornare rapidamente in una certa posizione nel testo. Quando un segnalibro è aggiunto in una specifica posizione in un libro, è possibile accedere a questo segnalibro in qualsiasi momento, per rinominarlo e per cancellarlo.


Per aggiungere un segnalibro:

- Fare un tocco sul pulsante Segnalibri, nell'angolo in alto a destra dello schermo. Il menu Segnalibro si aprirà. In modalità Navigazione nella Pagina, l'icona Segnalibro sarà visibile alla sinistra dello schermo.



- Nel menu Segnalibro, fare un tocco su "Aggiungi".
- Digitare il nome del segnalibro nella casella di testo che apparirà. Premere il tasto Freccia per confermare il nome del segnalibro.

Nota: I nomi dei segnalibri sono limitati a 40 caratteri.

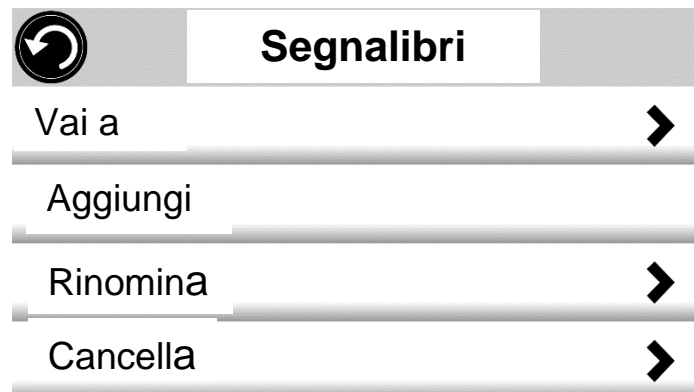

Per entrare in un segnalibro:

- Mentre un libro è aperto, fare un tocco sul pulsante Segnalibro. Il menu Segnalibro si aprirà.
- Nel menu Segnalibro, fare un tocco su "Vai a". Si aprirà un sottomenu che contiene tutti i segnalibri presenti nel libro.

- Selezionare il segnalibro desiderato. Prodigy aprirà il libro alla posizione del segnalibro selezionato.

Rinominare un segnalibro:

- Mentre un libro è aperto, fare un tocco sul pulsante Segnalibro. Il menu Segnalibro si aprirà.
- Nel menu Segnalibro, fare un tocco su 'Rinomina'. Si aprirà un sottomenu che contiene tutti i segnalibri presenti nel libro.
- Selezionare nell'elenco il segnalibro che volete rinominare.
- Digitare il nuovo nome del segnalibro nella casella di testo che appare. Premere il pulsante freccia per confermare il nome del segnalibro.

Nota: I nomi dei segnalibri sono limitati a 40 caratteri.

Cancellare un segnalibro:

- Mentre un libro è aperto, fare un tocco sul pulsante Segnalibro. Il menu Segnalibro si aprirà.
- Nel menu Segnalibro, fare un tocco su 'Cancella'. Si aprirà un sottomenu che elenca tutti i segnalibri presenti nel libro.
- Selezionare il segnalibro che desiderate cancellare dalla lista.
- Prodigy chiederà "Sei sicuro di voler cancellare questo segnalibro?". Fare un tocco su Sì per confermare.
- In alternativa, scorrere verso il basso per selezionare 'Cancella tutti i segnalibri' per cancellare tutti i segnalibri presenti nel libro.

UTILIZZARE LA FUNZIONE RAPIDO

La funzione Rapido permette di raggiungere più facilmente le applicazioni usate più frequentemente sul vostro Connect 12, con la possibilità di aggiungere nel Carosello tutte le applicazioni preferite.

Per aggiungere un'applicazione al Menu Rapido:

- Selezionare e fare un tocco sull'icona Rapido nel Carosello oppure sul menu Affiancato:



- Fare un tocco sull'icona Aggiungi, se si desidera aggiungere un'applicazione al menu Rapido:



- Un nuovo menu appare, che offre due diverse opzioni per accedere all'applicazione che si desidera aggiungere al menu Rapido: Cerca e Seleziona Applicazioni.
 - La funzione Cerca permette di trovare l'applicazione che si sta cercando digitandone il nome.
 - La funzione Seleziona Applicazioni visualizza la lista delle applicazioni installate sul vostro Prodigy.
- Una volta trovata l'applicazione cercata, sarà possibile aggiungerla al menu Rapido, facendo semplicemente un tocco su questa icona.
- Se si desidera rimuovere un'applicazione, semplicemente premere e tenere premuto sull'icona dell'applicazione, quindi fare un tocco su Cancella.

USARE LA CALCOLATRICE


Il software Prodigy permette di eseguire calcoli con l'app Calcolatrice.

Per usare la Calcolatrice:

- Selezionare e fare un tocco sull'icona Calcola nel menu Carosello:



- Fare un tocco sui numeri e le cifre desiderate. Il calcolo apparirà sulla parte alta dello schermo. Fare un tocco su DEL per correggerlo se necessario, oppure su UGUALE per vedere il risultato.

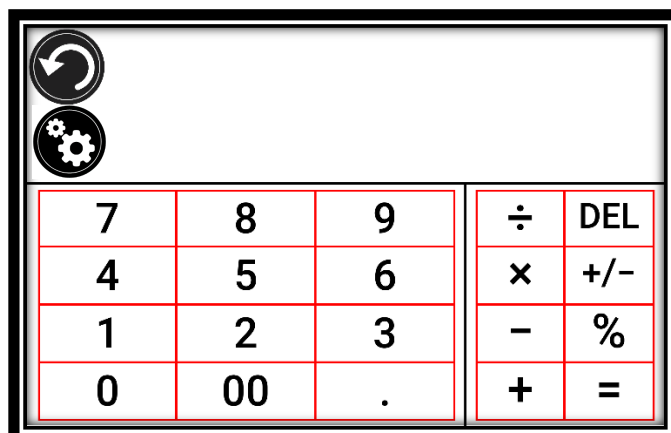


- Ottenuto il risultato, fare un tocco su CLR per pulire la sezione superiore.
- Come impostazione predefinita, la Calcolatrice è impostata in modalità Standard. Per usare funzioni matematiche come seno, coseno, tangente, ecc., è necessario attivare la modalità Scientifica. Per fare ciò, premere e tenere premuto il pulsante Indietro, e fare un tocco per impostare la modalità della Calcolatrice come scientifica. Premere Indietro per ritornare alla Calcolatrice. Fare un tocco sulle due frecce sulla parte bassa dello schermo per accedere alle funzioni scientifiche.
- Fare un tocco sul pulsante Indietro per ritornare al menu Carosello.

CALCOLATRICE GRAFICA DESMOS

L'integrazione della Calcolatrice grafica Desmos in Connect 12 comporta che gli utenti possano disegnare i loro grafici direttamente sul tablet, digitando la loro equazione.

Per attivare la Calcolatrice grafica:

- Premere il pulsante Impostazioni nella Calcolatrice.
- Premere Modalità
- Selezionare "Crea Grafico"
- Premere Indietro due volte per tornare alla Calcolatrice.

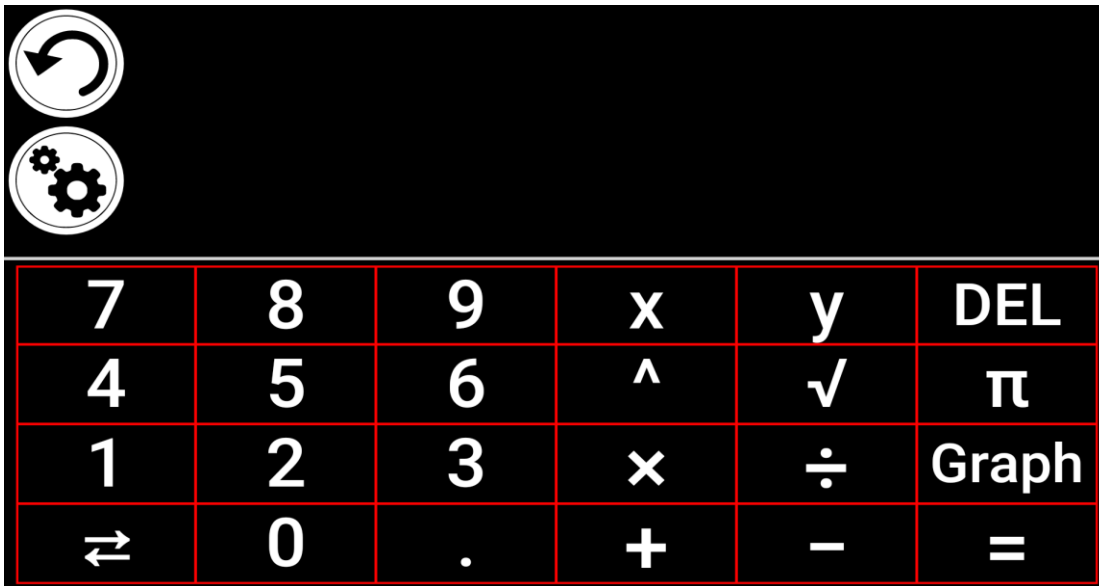

Per disegnare un grafico, è sufficiente scrivere un'equazione valida quindi premere "Grafico". Per esempio $3x+2=y$, $y=4$, $0.5+x^2=y$, ecc.

Premere i pulsanti Più e Meno per aumentare o diminuire l'ingrandimento del grafico. Scorrere il dito sullo schermo per vedere una panoramica del grafico.

Operazioni matematiche avanzate sono disponibili premendo il pulsante con due frecce opposte nell'angolo in basso a sinistra del tastierino della Calcolatrice.

Quando un Grafico è visualizzato sullo schermo, può essere acquisito e salvato nella Galleria nella cartella Schermate.




FUNZIONE DICTIONARY

(attualmente non disponibile per la lingua italiana)

La funzione Dictionary, sviluppata in collaborazione con Accessbyte e promossa da Oxford Languages, è una funzione rapida e comoda a cui si può accedere dal menu Carosello, e può essere usata come ogni altro dizionario on-line.

Ricerca di una parola

- Toccare “Search for a word” (o la lente d’ingrandimento in alto a sinistra dello schermo), quindi inserire la parola nella tastiera a comparsa e toccare “Search”.

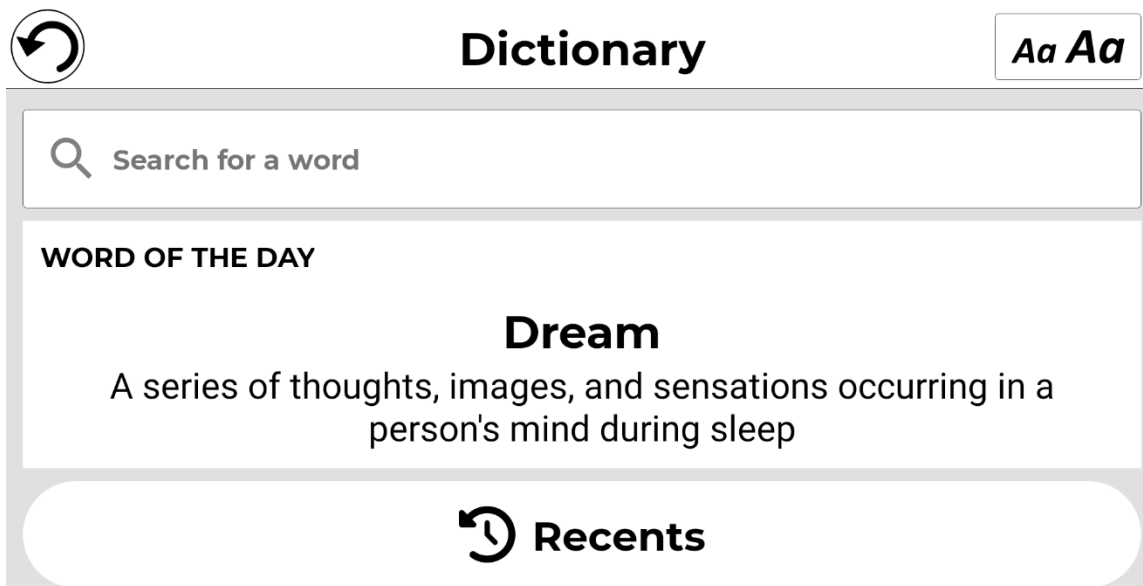

Humanware ACCESSIBYTE Powered by OxfordLanguages

Apparirà una lista di suggerimenti (“Suggestions”) che include la parola digitata nella barra di ricerca (apparirà in cima alla lista), insieme ad altre parole simili. La lunghezza della lista dei suggerimenti dipenderà dal numero di sinonimi trovati nel dizionario.

- Toccare una parola che appare nella lista per mostrare a schermo intero la definizione.



Definition



Accessibility

noun

1. The quality of being able to be reached or entered.

Examples

The restoration project involved repairing the roof and improving accessibility.

2. The quality of being easy to obtain or use.

Examples

Students were concerned about the accessibility of quality academic counseling.

3. The quality of being easily understood or appreciated.

Examples

È possibile salvare la definizione di una parola tramite l'icona segnalibro in alto a destra sullo schermo.

- Toccare l'icona Segnalibro (in alto a destra).

Apparirà una notifica a comparsa: "Save word to list:".

Inserire il nome della lista e toccare "Save"

Nel caso in cui esistesse già una lista:

- Toccare l'icona Segnalibro (in alto a destra).
- Toccare "Create New List".
- Inserire il nome della lista nella casella "Save word to list:".
- Toccare "Save".

La parola è stata salvata ed ora è possibile accedervi toccando la voce "Word Lists" dalla pagina di apertura della modalità Dictionary.

Toccare la lente di ingrandimento (in alto a destra accanto all'icona segnalibro), nella sezione "Definition", si riaprirà la pagina di ricerca delle parole.

Aggiustare la dimensione dei caratteri nella modalità Dictionary

La pagina principale include un'icona per selezionare la dimensione dei caratteri, posizionata in alto a destra sullo schermo.

- Toccare ripetutamente per selezionare tre diverse dimensioni per il carattere (piccolo, medio, grande). Fermarsi alla dimensione preferita.

La pagina principale della sezione Dictionary mostra la funzione "Word Of The Day". Questa funzione seleziona quotidianamente e casualmente una parola e la sua definizione corrispondente.

Sulla stessa pagina è presente l'icona delle "Words Lists", proprio sotto quella della "Word Of The Day". Toccandola è possibile aprire tutte le liste che sono state create.

L'icona "Recents" è situata sotto la "Words Lists". Toccandola si accede alla cronologia delle ricerche recenti.

Selezione Lingua (predefinito: US english)

- Sulla pagina principale della funzione Dictionary toccare la barra di ricerca della parola "Search for a Word".
- Cambiare la lingua del dizionario toccando l'icona ovale in alto a destra sullo schermo. Facendo ciò si verrà reindirizzati direttamente alla pagina "Dictionary Languages".
- Toccare e selezionare una delle quattro lingue disponibili.
- Toccare la freccia indietro (in alto a sinistra) per tornare alla pagina di ricerca della parola.

Opzione mostra/nascondi

L'icona della funzione dictionary è preimpostata per apparire nel menu Carosello di Prodigy, ma comunque, l'icona può essere nascosta per semplificare l'interfaccia.

- Toccare Imposta nel Menu Carosello. Scorrere fino a "Applicazioni".
- Toccare Mostra (le opzioni disponibili sono Libri, Calcolatrice, Dictionary).
- Deselezionare Dictionary.

- Toccare l'icona Indietro tre volte per tornare al menu Carosello (l'icona Dictionary non apparirà più).
- Per mostrare di nuovo l'icona Dictionary nel menu Carosello, seguire la stessa procedura, ma questa volta selezionare la voce "Dictionary".

VISUALIZZARE I DOCUMENTI SALVATI

La Galleria contiene tutti i documenti salvati.

- Selezionare e fare un tocco sull'icona Galleria nel menu Carosello:



- Scorrere a sinistra o a destra nella Galleria per vedere i documenti salvati. Notate che tutte le schermate acquisite sono salvate nella cartella Schermate.
- Il documento attualmente selezionato è nel centro dello schermo. Prodigy dirà e indicherà la prima parola contenuta nel documento attualmente selezionato. Se il documento non contiene parole, Prodigy lo etichetterà come un'immagine. Un'icona di un quaderno indicherà un documento multipagina:



- Per aprire un documento selezionato, fare un tocco su di esso.
- Fare un tocco su qualsiasi parte del documento per vedere quella sezione nell'ingrandimento desiderato.
- È possibile attivare i contrasti colore, positivo, negativo e Diamond Edge™ (se l'immagine contiene testo) e regolare la luminosità nello stesso modo della Lente.
- In un livello di ingrandimento superiore a 1X, è possibile spostarsi nel documento ingrandito con un gesto di Panoramica.
- Fare un tocco, oppure fare un tocco su Indietro, per ritornare alla visualizzazione della pagina intera.

- Nella pagina intera, fare un tocco su Indietro per chiudere un documento e ritornare alla Galleria.

IL MENU IMPOSTAZIONI GALLERIA

Il menu per le impostazioni della Galleria permette di:

- Creare categorie e sottocategorie (cartelle)
- Creare una nuova pagina
- Creare un nuovo documento
- Importare
- Cancellare i file in galleria

Per accedere alle Impostazioni della Galleria, semplicemente fare un tocco sull'icona Imposta nell'angolo in alto a destra dello schermo mentre ci si trova nella Galleria.

IL MENU AZIONE

La Galleria contiene un "Menu Azione" che include molte funzioni utili per i documenti salvati.

Nel Menu Azione è possibile:

- Condividere un'immagine attraverso altre app di Android
- Rinumerare la prima pagina di un document multi-cattura
- Rinominare un documento o una categoria
- Cancellare un documento, una categoria o il contenuto di una categoria
- Spostare un documento in una categoria
- Esportare un documento in JPG, testo oppure PDF nel sistema Android oppure in un drive esterno
- Spostare un'immagine acquisita con la telecamera per distanza nella Galleria per essere processata con Diamond Edge
- Cancellare, sostituire, inserire oppure aggiungere pagine in un documento multipagina
- Avviare la funzione OCR su un documento PDF (utile quando alcune parti di un PDF non sono visualizzate correttamente, di solito nelle tabelle).

Per accedere al menu Azione, fare una lunga pressione su un documento oppure su un'icona di categoria nella Galleria. Si aprirà un menu che elenca le azioni disponibili per il file selezionato.

Condividere un'immagine attraverso altre app di Android

- Fare una lunga pressione sull'immagine che volete condividere
- Fare un tocco su Condividi
- Selezionare il formato desiderato (JPG o PDF)
- Selezionare l'app da usare per condividere l'immagine (per es. Gmail, Maps, Google Drive, ecc.). Le app elencate nel menu Condividi potrebbero non essere tutte accessibili.

Cancellare un documento, una categoria, oppure il contenuto di una categoria

- Fare una lunga pressione sul documento oppure categoria da cancellare.
- Fare un tocco su Cancella, Cancella categoria oppure Cancella il contenuto della categoria.
- Fare un tocco su **Sì** per confermare la cancellazione.

Per rinominare un documento o una categoria

- Pressione lunga sul documento oppure sulla categoria che volete rinominare.
- Fare un tocco su Rinomina oppure Rinomina categoria.
- Digitare il nuovo nome del documento oppure della categoria.
- Fare un tocco su FINE.

Spostare un documento in una Categoria

- Fare una Pressione lunga sul documento che volete spostare.
- Fare un tocco su Sposta.
- Fare un tocco sulla categoria nella quale volete spostare l'immagine.

Importare un file JPG, di testo oppure PDF da un drive esterno a Connect 12

- Per permettere alla vostra chiave USB di essere rilevata dal Sistema, è necessario modificare le impostazioni USB nel sistema Android:
 - Premere e tenere premute quattro o cinque dita sullo schermo. Una pagina con tutte le app di Android apparirà.

- Dalla pagina delle app, selezionare Impostazioni.
 - Nella lista Dispositivi del menu Impostazioni, selezionare USB.
 - Nella parte alta dello schermo apparirà un messaggio: “USB connessa al computer”. Un pulsante sulla destra dello schermo permette di modificare in “USB non è connessa al computer”.
 - Fare un tocco sul tondo sulla parte inferiore destra del tablet per tornare a Prodigy.
- Inserire la chiave USB nella porta USB-C alla destra del tablet.
 - Selezionare e fare un tocco sull'icona Galleria nel menu Carosello:



- Fare un tocco sull'icona Impostazioni in alto a destra dello schermo, quindi selezionare Importa:



- Due opzioni saranno visualizzate: Memoria Interna e Store N Go, che corrisponde alla chiave USB. Fare un tocco sull'opzione *Store N Go*.
- La chiave USB apparirà. Premere sul suo nome, quindi premere su Seleziona per aprirla. Tutte le cartelle e i file contenuti sulla chiave USB sono ora accessibili.
- Fare un tocco sui file da importare nella Galleria. Saranno automaticamente scaricati sul Connect 12.

Esportare un documento JPG, testo oppure PDF nel sistema file di Android, oppure su un drive esterno

- Nella Galleria, premere e tenere premuto sul documento che si desidera esportare.
- Fare un tocco su Esporta.
- Selezionare in quale tipo di file desiderate esportare il vostro documento. È possibile modificare alcune impostazioni per JPG e PDF premendo e tenendo premuta l'opzione PDF o JPG (solo per utenti avanzati).
- Selezionare Memoria interna per esportare in una cartella specifica del dispositivo. È possibile anche selezionare l'opzione dispositivo USB se una chiave USB è inserita nella relativa porta per esportare su di essa.

Spostare un'immagine acquisita con la telecamera per distanza nella Galleria

- Nella categoria Distanza, tenete premuto il dito sull'immagine che si desidera spostare.
- Fare un tocco su Sposta in Galleria.
- L'immagine sarà acquisita e visualizzata in Diamond Edge, se un testo viene trovato. Il file sarà rinominato con la prima parola trovata del documento, se presente.
- Il file può quindi essere spostato in una categoria.

Per cancellare, sostituire, inserire oppure aggiungere una pagina in un documento multipagina

- Aprire il documento multipagina che si desidera modificare.
- Per cancellare una pagina, fare una lunga pressione sulla pagina che si desidera cancellare e fare un tocco su **Sì** per confermare la cancellazione.
- Per sostituire una pagina, fare una lunga pressione sulla pagina che si desidera sostituire. Fare un tocco su Sostituisci, fare un tocco su Sì e acquisire una nuova pagina.
- Per inserire una pagina, fare una lunga pressione sulla pagina dove volete inserire una nuova pagina. Fare un tocco su inserire e acquisire una nuova pagina.
- Per aggiungere una o diverse pagine, fare una lunga pressione su qualsiasi pagina in un documento multipagina e fare un tocco su Aggiungere. Acquisire il documento. La/e pagina/e saranno aggiunte alla fine del documento multipagina.

Per aggiungere un grafico di funzione in un documento

Durante la modifica di un documento, è possibile aggiungere una funzione grafico.

- Selezionare e fare un tocco sull'icona Galleria nel menu Carosello:



- Aprire un documento.



- Eseguire una lunga pressione su un elemento all'interno del documento.
- Apparirà un sottomenu Impostazioni. Selezionare l'opzione 'Inserisci'.
- Il menu Inserisci apparirà sullo schermo. Selezionare l'opzione 'Nuovo Grafico Funzione'.
- Prodigy aprirà la Calcolatrice in modalità Grafico. Digitare una formula e selezionare il pulsante 'Grafico'.
- Prodigy aprirà il grafico. Fare un tocco sul pulsante "Salva".



- Prodigy tornerà al documento con l'immagine del grafico inserita nella posizione selezionata.

In alternativa, se si desidera aggiungere una funzione alla fine di un documento:

- Selezionare e fare un tocco sull'icona Galleria nel menu Carosello:



- Aprire un documento



- Fare un tocco sul pulsante nell'angolo in alto a destra dello schermo. Un menu apparirà.



- Selezionare l'opzione 'Aggiungere'. Il menu apparirà sullo schermo.
- Selezionare l'opzione 'Nuovo Grafico Funzione'.
- Prodigy aprirà la Calcolatrice in modalità Grafico. Digitare una formula e selezionare il pulsante 'Grafico'
- Prodigy visualizzerà il grafico. Fare un tocco sul pulsante "Salva".



- Il grafico apparirà alla fine del documento.

USARE LA TELECAMERA A DISTANZA

La telecamera a distanza opzionale può essere molto utile quando si ha bisogno di visualizzare qualcosa a distanza, come una lavagna o una presentazione. La telecamera a distanza si connette in modalità wireless, ha una batteria della durata di 4 ore e può essere posizionata fino a 10 metri dal Connect 12.


La telecamera a distanza deve essere accoppiata (pairing) con il tablet di Connect 12 via Wi-Fi. Per istruzioni dettagliate visitare la pagina dedicata all'assistenza per Connect 12 sul sito di HumanWare www.humanware.com/connectsupport.

Nota: La telecamera a distanza è disponibile come optional ed è venduta separatamente. Si raccomanda di familiarizzare con il suo utilizzo leggendo attentamente il manuale utente allegato al dispositivo.

Installazione della telecamera a distanza

Inserire la telecamera sul braccio, nell'apposito slot.

- Allineare la telecamera con gli oggetti che si desidera visualizzare.
- Accendere la telecamera.

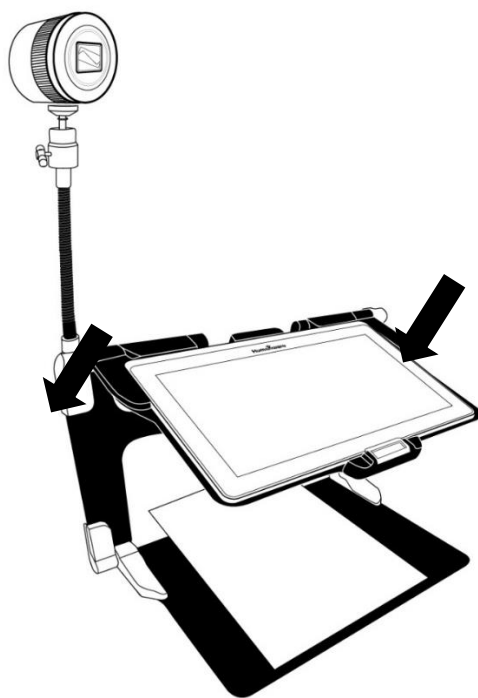

- Accedere al menu Carosello facendo un tocco sul pulsante Indietro in modalità Ingrandimento.
- Selezionare l'icona Telecamera, quindi fare un tocco su di essa.



- Ci si trova ora nella modalità reale della telecamera esterna. Per fare una foto, fare un tocco sul pulsante Foto. In alternativa, è possibile fare una foto tenendo premuto il pulsante verso il basso il pulsante dell'Otturatore posizionato vicino alla leva dello Zoom sulla parte sinistra della telecamera.
- Si dovrebbe sentire il suono dell'otturatore e vedere brevemente l'immagine che è stata appena acquisita, quindi si ritorna alla visualizzazione in modalità reale.
- È possibile ingrandire o diminuire l'ingrandimento facendo un tocco, oppure toccare e tenere premuti i pulsanti Zoom. In alternativa, è possibile usare la levetta dello Zoom posizionata vicino al pulsante Acquisisci, sulla sinistra della telecamera.

Fare un tocco su Indietro per ritornare al menu Carosello.

SPOSTARSI DALLA TELECAMERA A DISTANZA ALLA TELECAMERA DA VICINO

Durante la lettura, se si desidera spostarsi velocemente dall'immagine a distanza a quella da vicino, per prendere appunti, scorrere semplicemente il dito sullo schermo da sinistra a destra. Scorrere nuovamente da sinistra a destra per tornare alla visualizzazione precedente.

USARE LA TELECAMERA A DISTANZA E LA TELECAMERA DA VICINO SIMULTANEAMENTE

È possibile usare le due telecamere simultaneamente. È sufficiente toccare la freccia sulla parte sinistra dello schermo e lo schermo si dividerà in due parti: nella parte alta ci sarà l'immagine della telecamera a distanza e nella parte bassa quella dell'immagine ingrandita sul piano di lettura. Una finestra blu o rossa indicherà quale visualizzazione è selezionata. Per andare in modalità schermo intero per una delle due visualizzazioni, toccare quella desiderata e toccarla nuovamente per passare alla modalità schermo intero.

Per fare una foto senza abbandonare la modalità Schermo Diviso, fare un tocco per selezionare la visualizzazione desiderata della quale si vuole fare la foto, quindi tenere premuto il dito su di essa per acquisire l'immagine.

VISUALIZZARE LE IMMAGINI DELLA TELECAMERA A DISTANZA

Le immagini acquisite con la telecamera a distanza possono essere viste nella Galleria analogamente alle immagini acquisite con la Telecamera.

Per visualizzare le immagini fatte con la telecamera a distanza:

- Selezionare e fare un tocco sull'icona Galleria nel menu Carosello.



- Scorrere a destra fino a selezionare l'icona della Telecamera a Distanza (un cannocchiale è sulla cartella), quindi fare un tocco.



- Il documento attualmente selezionato è nel centro dello schermo. Prodiggi dirà e indicherà la data in cui è stata fatta la foto.
- Scorrere a destra e a sinistra tra le foto disponibili.
- Per aprire un documento selezionato, semplicemente fare un tocco su di esso.

LEGGERE CON LA TELECAMERA A DISTANZA

Per leggere un'immagine acquisita con la telecamera a distanza, è necessario trasferire l'immagine dalla categoria Distanza a Galleria.

- Nella categoria Distanza della Galleria (una cartella con un cannocchiale), mantenere premuto il dito sull'immagine che si desidera spostare.
- Fare un tocco su Vai alla Galleria.
- L'immagine dovrebbe essere ora nella root della Galleria, dove può essere letta come ogni altro documento.

RIMUOVERE LA TELECAMERA DAL BRACCIO

Se si desidera staccare la telecamera dal braccio, seguire questi passaggi:

- Accertarsi che la telecamera sia spenta.
- Con una mano tenere saldamente la telecamera.

- Con l'altra mano, localizzare la vite sotto la telecamera e iniziare a svitarla fino a che non si stacca dal braccio.

Attenzione: la telecamera è molto delicata e fragile, quindi fare molta attenzione quando la si stacca dal braccio.

VISUALIZZARE FILE DI TESTO IN PRODIGI

Prodigi permette di incollare file di testo nella Galleria e quindi aprirli usando l'interfaccia di Prodigi.

Incollare un file testo in Prodigi:

- Copiare negli Appunti del tablet il testo che si desidera aggiungere in Prodigi. Questo può essere fatto esternamente a Prodigi, nelle applicazioni di Android che permettono di copiare un testo (per es. il browser Internet, Dropbox oppure email).
- Selezionare e fare un tocco sull'icona Galleria nel menu Carosello.



- Scorrere fino a selezionare l'icona Testo, quindi fare un tocco per aprire la sezione del testo della Galleria.



- Scorrere fino a selezionare l'icona Incolla, quindi fare un tocco per incollare



il testo che avete precedentemente copiato:

- Il testo apparirà in Diamond Edge in colonna in Modalità Lettura (layout originali non disponibili).
- Fare un tocco su Indietro per ritornare alla sezione Testo della Galleria.
- Il testo incollato sarà salvato nella sezione Testo della Galleria e sarà nominato con la prima parola del testo.

MODALITÀ ESAME

La modalità Esame è usata per bloccare alcune funzioni e applicazioni in Connect 12 per un certo periodo di tempo. Mentre la modalità Esame è attiva, le funzioni e applicazioni bloccate possono essere rese accessibili inserendo un PIN preimpostato in precedenza oppure attendere che trascorra il tempo impostato.

Per attivare la modalità Esame in Connect 12:

- Dal menu Carosello, selezionare l'icona Impostazioni:



- Nel menu Impostazioni, selezionare Modalità Esame. Un sottomenu sarà visualizzato sullo schermo.
- Nel sottomenu Modalità Esame, è possibile regolare i parametri, facendo un tocco su di essi e modificandone il valore. I parametri regolabili sono i seguenti:
 - Ora di inizio.
 - Durata: selezionare un valore tra 30 minuti e 8 ore.
 - Torna ad Android: fare un tocco su abilita per abilitare l'accesso ad Android mentre la modalità Esame è attiva. Fare ancora un tocco per disabilitarla.
 - Acquisizione & Galleria: fare un tocco per abilitare l'accesso alla Galleria e alle acquisizioni mentre la Modalità Esame è attiva. Fare ancora un tocco per disabilitarli.
 - Calcolatrice: fare un tocco per abilitarla e poter entrare nella Calcolatrice mentre la modalità Esame è attiva. Fare ancora un tocco per disabilitare.
- Sistemati tutti i parametri, fare un tocco su Modalità Esame: è possibile attivarla o disattivarla con un tocco.
- Fare un tocco sull'icona Indietro in alto a sinistra sullo schermo.
- Verrà chiesto di inserire un codice PIN per disattivare la Modalità Esame.
- La Modalità Esame è ora pronta per essere usata.

Se si desidera modificare i parametri della modalità Esame mentre è attiva, oppure disattivarla, seguire i seguenti passaggi:

- Accedere nelle Impostazioni generali facendo un tocco sull'icona **Imposta** nel menu Carosello.
- Nel menu Impostazioni, selezionare Modalità Esame.
- Verrà chiesto di inserire il codice PIN creato durante l'attivazione della Modalità Esame.
- Ora è possibile accedere al sottomenu modalità Esame, dove è possibile modificare i parametri oppure disattivare la Modalità Esame.

SELEZIONARE LA LINGUA DELL'OCR


Prodigi permette l'uso della funzione dell'OCR (Optical Character Recognition) in varie lingue mentre si utilizza la funzione Ingrandimento o Telecamera.

Per abilitare/disabilitare la funzione OCR:


- Fare un tocco sull'icona Impostazioni nel menu a Bandiera dall'app Ingrandimento.




- Scorrere e fare un tocco sulla voce 'OCR: Disattivato' nel menu Impostazioni per abilitare la funzione. Se l'OCR fosse attivato, fare un tocco su di esso per disattivarlo.

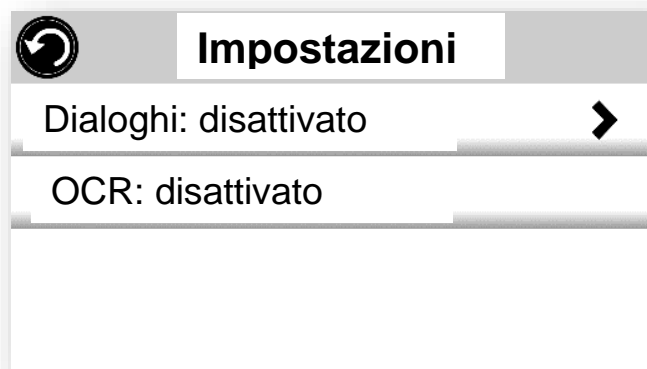

- Prodigi visualizzerà automaticamente un nuovo elemento nel menu Impostazioni: 'Lingue OCR: Voci installate'.

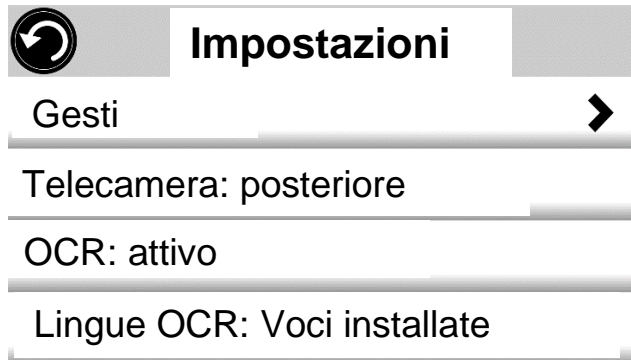


- Fare un tocco per modificare la funzione in 'Personalizzate'.
- L'opzione 'Scegli lingua OCR' apparirà. Fare un tocco su di essa per aprirla. Apparirà una lista delle lingue disponibili.

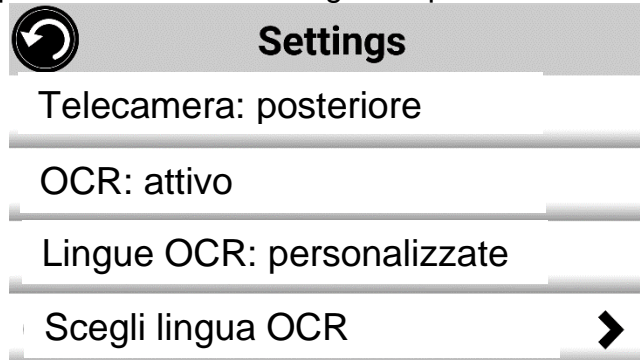

- Scegliere la lingua desiderata dalla lista.
- Premere il pulsante Indietro fino a raggiungere l'applicazione Lente.

CAPITOLO 4: SCEGLIERE IL CONTRASTO

Connect 12 permette di visualizzare documenti, immagini e oggetti con 3 tipi di contrasto: **colore, positivo e negativo**. Per documenti che contengono testo, un quarto tipo di contrasto può essere usato: **Diamond Edge™**. I contrasti positivo, negativo e Diamond Edge rafforzano i colori. È possibile attivare i diversi contrasti scorrendo verticalmente sul lato destro dello schermo touch, mentre si visualizza un'immagine oppure un documento:

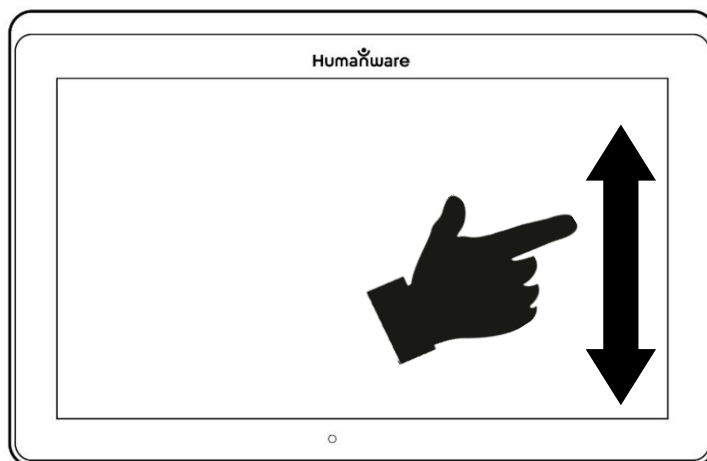

In alternativa, fare un tocco su Imposta durante la lettura o la visualizzazione di un'immagine, selezionare Contrasto, e scorrere per scegliere un contrasto. Fare un tocco su Indietro due volte per ritornare al documento o all'oggetto.

Contrasto Colore è utile per visualizzare documenti, oggetti e fotografie nel loro colore originale.

Contrasto Positivo mostra testi in 2 colori, in base alla combinazione colori selezionata; la combinazione predefinita è Nero su Bianco. Questo è un modo pratico per visualizzare il testo nella migliore combinazione di colori.

Contrasto Negativo mostra i testi con un contrasto invertito rispetto alla combinazione colore selezionata. Per esempio, se la combinazione fosse Nero su Bianco, il contrasto negativo mostrerà testo e immagini Bianco su Nero. Questa funzione è utile per invertire il contrasto di un testo che contiene diversi contrasti.

Contrasto Diamond Edge combina il meglio dei due precedenti; mostra il testo con Diamond Edge Text™ nella combinazione colore selezionata e immagini nel loro colore originale. Questo permette di ingrandire il testo senza comprometterne la qualità, nella miglior combinazione di colori possibile, visualizzando le immagini nel loro colore originale sulla stessa pagina.

CAPITOLO 5: MODALITA' STANDARD (AFFIANCATO)

La modalità Standard (Affiancato) è una delle tre interfacce utente che possono essere usate in Connect 12, oltre alla Modalità Carosello (come impostazione predefinita) e la modalità Semplice. Il menu della modalità Standard (Affiancato) permette di personalizzare l'accesso alle applicazioni che vengono usate di più all'interno di Prodigy. Per attivare la modalità Standard (Affiancato):



- Dal menu Carosello, scorrere e selezionare l'icona Imposta e fare un tocco su di essa. Fare un tocco su Interfaccia Utente, selezionare e fare un tocco su Interfaccia: Standard (Carosello), fare tocco su Standard (Affiancato) e toccare 3 volte su Indietro per accedere al menu della modalità Standard:
- Le applicazioni di Prodigy sono ora accessibili in una serie di schermate che ruotano come nel menu Carosello, ma visualizzando 6 applicazioni su ogni schermata, anziché una ad una. Le principali 9 applicazioni di Prodigy sono accessibili come impostazione predefinita nel menu Affiancato. Sarà ora possibile anche vedere data e ora.
- Scorrere a sinistra o a destra nel menu Affiancato, oppure fare un tocco sulla freccia destra o sinistra sul lato dello schermo, per andare alla schermata delle applicazioni successiva.
- Per lanciare un'applicazione, fare un tocco sull'icona dell'applicazione stessa.

Se si desidera aggiungere un'applicazione al menu Affiancato:

- Fare un tocco sull'icona Aggiungi:



- Appare un nuovo menu, che dà due diverse opzioni per accedere all'applicazione che desiderate aggiungere al menu Affiancato: Ricerca e Mostra Tutte.
 - La funzione Ricerca permette di accedere all'applicazione che si sta cercando, digitandone il nome.
 - L'opzione Mostra Tutte visualizza una lista di tutte le applicazioni installate in Prodigy.
- Una volta trovata l'applicazione cercata, sarà possibile aggiungerla al menu Affiancato semplicemente facendo un tocco sulla sua icona.
- Se si desidera rimuovere un'applicazione dal menu Affiancato, semplicemente toccare e tenere premuto l'icona dell'applicazione, quindi fare un tocco su Cancella.

CAPITOLO 6: MODALITA' SEMPLICE

La modalità Semplice permette di accedere alle principali applicazioni di Prodigy dalla stessa schermata. Come impostazione predefinita, Prodigy è impostato in modalità Standard.



Per attivare la modalità **Semplice**:

- Dal menu Carosello, scorrere e selezionare l'icona **Imposta** e fare un tocco su Interfaccia Utente. Selezionare e fare un tocco su Interfaccia: Standard (Carosello), fare un tocco su Semplice e fare un tocco su Indietro 3 volte per accedere al menu modalità Affiancato:
- Le applicazioni di Prodigy sono ora accessibili dalla stessa schermata. Sarete inoltre in grado di vedere ora e data.
- Per lanciare un'applicazione, semplicemente fare un tocco sull'applicazione.

Tornare alla modalità menu Carosello

- Scorrere fino all'icona Imposta e toccarla.
- Toccare "Interfaccia Utente".
- Selezionare "Interfaccia".
- Toccare "Standard (Carosello\Affiancato)".
- Toccare 3 volte la freccia indietro in alto a sinistra dello schermo per tornare alla schermata di menu Carosello.

CAPITOLO 7: MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI

Il menu Impostazioni di Connect 12 è contestuale; Impostazioni differenti saranno visualizzate in base a ciò che state facendo oppure in base a dove ci si trova nel sistema.

Per accedere alle Impostazioni:

- Fare un tocco sul pulsante Imposta.
- Scorrere verso l'alto per selezionare un elemento. L'elemento attualmente selezionato è letto e evidenziato con una cornice.
- Scorrere in alto o in basso per spostare la cornice e selezionare un elemento. Gli elementi saranno letti uno alla volta (come impostazione predefinita).
- Fare un tocco per attivare/disattivare il valore oppure scorrere quando siete in una lista di valori. Fare un tocco su Indietro (angolo in alto a sinistra) per ritornare a cosa si stava facendo.

Nota: La modalità di navigazione sarà differente se la voce è impostata su No oppure "Solo Documento". Non ci sarà più una cornice e ogni voce del menu avrà un'ombra sotto di essa. In questa modalità di navigazione, potete semplicemente toccare un elemento per selezionarlo, anziché evidenziarlo con la cornice.

Ecco una lista delle Impostazioni contestuali di Connect 12:

(I valori con l'asterisco (*) sono le Impostazioni predefinite)

- **Luminosità:** da 0 a 100% (50%*)
- **Contrasto:** Diamond Edge (se l'immagine acquisita contiene del testo), Colore*, Positivo, Negativo
- **Colori:** Nero su Bianco*, Bianco su Nero, Nero su Grigio, Grigio su Nero, Nero su Giallo, Giallo su Nero, Nero su Arancione, Arancione su Nero, Nero su Ciano, Ciano su Nero, Nero su Viola, Viola su Nero, Nero su Verde, Verde su Nero, Blu su Giallo, Giallo su Blu, Bianco su Blu, Blu su Bianco, Beige su Nero, Nero su Beige.
- **Modalità** (solo modalità Standard): Reale*, Acquisizione Multipla
- **Autofocus** (solo Modalità Reale): Bloccato, Sbloccato*
- **Correzione angolo:** Attivo*, Disattivo
- **Dialoghi/Voce:** Sì*, Solo Documento, No
- **Voce:** Voce 1*, Voce 2, Voce 3, Voce 4 (4 voci al massimo)
- **Velocità Voce:** Molto lenta, Lenta, Normale*, Veloce, Molto Veloce
- **Modalità di Lettura:** Pagina, Colonna*, Riga Linea

- **Velocità della Voce:** Molto lenta, Lenta, Normale*, Veloce, molto Veloce
- **Diamond Edge:** Sempre*, Su richiesta
- **Tipo di carattere:** Normale, Grassetto*
- **Zoom preferito:** da 2x a 35x (4x*)
- **Dimensione Carattere:** Minimo, Piccolo, Medio, Standard*, Grande, Molto Grande, Grandissimo, Massimo
- **Evidenziatura** (solo modalità Colonna e Riga. Evidenzia le parole lette): Mostrare*, Nascondere
- **Cancella contenuto Galleria** (in Galleria): Cancella tutti i file in Galleria. Premere e tenere premuto il pulsante Indietro nella Galleria per raggiungere questa impostazione.
- **Configurazione Wi-Fi:** accedere al menu Imposta e toccare la voce "Sistema"
 - **Wi-Fi:** Attivare o disattivare Wi-Fi.
 - **Reti Wi-Fi:** Lista delle reti disponibili. Quando connesso, mostra la rete alla quale siete connessi.
 - **Reti Salvate:** Configurazioni delle reti salvate. Per cancellare una configurazione di rete, fare un tocco sulla rete, fare un tocco su Dimentica, e fare un tocco su Sì.
- **Modalità** (nell'app Calcolatrice, premere e tenere premuto Indietro per raggiungere questa impostazione.): Standard*, Scientifica, Grafica.
- **Griglia** (in Calcolatrice, premere e tenere premuto Indietro per raggiungere questa impostazione.): Colore indicatore*, Rosso, Arancione Giallo, Viola, Ciano, Verde, Blu.
- **Utilizzo Dati:** Abilitato*, Disabilitato, Dettagli.
- **Gesti** (durante l'ingrandimento, mentre si visualizza un'immagine, oppure si legge un documento, permette di abilitare o disabilitare i gesti sullo schermo touch). Sono attivi come impostazione predefinita:
 - **Scorri sul bordo sinistro / Modalità:** Attiva/Disattiva modalità Reale e Acquisizione Multipla.
 - **Scorri sul bordo destro / Contrasto:** I contrasti disponibili sono Colore, Positivo, Negativo e Diamond Edge (l'ultima selezione sarà salvata nella memoria di Connect 12).
 - **Pizzica per ingrandire:** Regolare il livello di ingrandimento diminuendo o aumentando la distanza tra le due dita.
 - **Doppio tocco:** Per aprire il menu Carosello oppure per attivare/disattivare la voce mentre leggete, toccando velocemente due volte con un dito.
 - **Tocco / Zoom:** Premere il vostro dito verso il basso velocemente sullo schermo (tocco) per ingrandire al livello preferito.

È possibile accedere ad altre Impostazioni dal menu Carosello, facendo un tocco sull'icona Imposta:



Sono presenti le seguenti voci: Interfaccia Utente, Audio, Sistema, Applicazioni, Modalità esame, Torna ad Android e Informazioni su. Scorrere in alto o in basso nelle Impostazioni per selezionare un menu. Connect 12 dirà “sottomenu” se il menu selezionato contiene sottomenu e visualizzerà una freccia sul lato destro dello schermo. Per aprire un menu, un sottomenu oppure un elemento del menu, selezionarlo e fare un tocco su di esso. Una volta raggiunta l'impostazione che volete modificare, fare un tocco oppure scorrere verso l'alto nella lista di valori. Fare un tocco su Indietro per ritornare alla schermata precedente. Toccare e tenere premuto il pulsante Indietro per uscire dalle Impostazioni.

Ecco una lista delle Impostazioni generali di Connect 12:

I valori con l'asterisco (*) sono le Impostazioni predefinite.

Interfaccia Utente:

- **Interfaccia:** Standard*, Semplice
- **Lingua Sistema:** Lingua 1*, Lingua 2, Configurazione (si collega ad Internet per trovare pacchetti lingua disponibili)
- **Colori** (si vedano le combinazioni di colore nel menu Impostazioni)
- **Colore indicatore:** Rosso*, Arancione, Giallo, Viola, Ciano, Verde, Blu
- **Filtro per la luce blu:** Disattivato*, Basso, Medio, Alto, Altissimo
- **Luminosità Schermo** (modifica il livello di luminosità dello schermo): da 1 a 100% (60%*)
- **Menu a Bandiera:** Auto*, Nascondi, Sempre
- **Virazioni del tablet:** Sì*, No

Audio:

- **Dialoghi/Voce:** Sì*, Solo Documento, No
- **Velocità Voce:** Molto lento, Lento, Normale*, Veloce, Molto Veloce
- **Suoni:** Sì*, No
- **Volume della base:** da 0 a 15 (9*)
- **Volume Cuffie (quando collegate):** da 0 a 15
- **Suono OCR:** Sì, No*

Sistema:

- **Configurazione Wi-Fi:**
 - **Wi-Fi:** Attivare/disattivare Wi-Fi.
 - **Wi-Fi Networks:** Lista delle reti disponibili. Quando connesso, mostra la rete a cui siete connessi.
 - **Reti Salvate:** Configurazioni delle reti salvate. Per cancellare una configurazione di rete, fare un tocco sulla rete, fare un tocco su Dimentica, e fare un tocco su Sì.
- **Configurazione Bluetooth**
 - **Bluetooth:** Attivare e disattivare Bluetooth. Quando è attivo, il vostro Connect 12 cercherà di trovare altri dispositivi e rendersi visibile da essi.
 - **Dispositivi Accoppiati:** Dispositivi attualmente connessi a Connect 12
 - **Dimentica dispositivo:** Elimina accoppiamento del dispositivo, che rimane recuperabile nel sottomenu Dispositivi.
 - **Rinominare il dispositivo:** Scegliere un altro nome per il dispositivo.
 - **Ripristina nome:** Ripristina il nome predefinito per il dispositivo.
 - **Dispositivi:** dispositivi Bluetooth nelle vicinanze rilevati da Connect 12.
- **Aggiornamento Software:** Aggiornare il dispositivo
- **Auto spegnimento:** 10 min*, 20 min, 30 min, Mai
- **Ripristina Impostazioni di Fabbrica**

Applicazioni:

- **Libri:** Attivata*, Disattivata
- **Calcolatrice:** Attivata*, Disattivata
- **Distanza:** Attivata *, Disattivata (Solo Modalità Semplice)
- **Rapido:**
 - Cerca
 - Seleziona applicazioni

Modalità esame

Torna ad Android:

Esce da Prodigy. È possibile ritornare a Prodigy premendo il pulsante Zoom e facendo un tocco sull'icona Prodigy.

Informazioni su:

- **Software** (Versione)
- **Voci** (Versione)
- **OCR** (Versione)
- **Libri** (Versione)
- **Calcolatrice** (Versione)
- **Distanza** (Versione)
- **Prodigi Updater** (Versione)
- **Numero Seriale**
- **Modello**
- **Versione Android** (Versione)
- **Build Android** (Versione)
- **Utilizzo Dati**

Dialoghi/Voce attivati:

Quando la funzione Dialoghi/Voce è attiva, la navigazione sarà molto diversa. Prodigy leggerà tutti gli elementi visibili sullo schermo per una guida completa dell'utente.

All'interno dei menu:

La funzione Dialoghi/Voce leggerà il numero degli elementi presenti in un menu o sottomenu e poi il primo elemento selezionato sullo schermo. Se questo elemento attiva un sottomenu, verrà anche annunciato "sottomenu".

Per esempio Impostazioni Menu > 7 elementi > Interfaccia Utente > Sottomenu

È possibile non toccare direttamente un elemento del menu per selezionarlo. Dovete scorrere verso l'alto oppure verso il basso per isolare l'opzione del menu che desiderate selezionare nel riquadro colorato.

Una pressione con due dita in qualsiasi parte sullo schermo all'interno di un menu isolerà e evidenzierà il pulsante di navigazione "Indietro". Una volta che "Indietro" è evidenziato, fare un tocco una volta sullo schermo e si verrà portati alla schermata precedente.

All'interno del Menu Standard (Affiancato) / Menu Principale:

La sintesi vocale leggerà l'applicazione attualmente posizionata nel riquadro colorato. Per esempio, se aprite il vostro Connect 12 sull'icona Imposta, La modalità Voce dirà: Menu Principale > Imposta.

Per navigare in altre applicazioni, scorrere a sinistra oppure a destra in qualsiasi parte dello schermo. Fare un tocco per lanciare l'applicazione nella cornice colorata. Per interrompere la voce e tornare alla navigazione normale:


- Andare in Imposta.
- In Imposta, selezionare Audio. Un sottomenu si aprirà.
- Selezionare Dialoghi/Voce.
- Ci sono due opzioni. Selezionare NO se desiderate zittire la voce completamente, oppure Solo Documento se desiderate usare la funzione solo nei documenti.

CAPITOLO 8: TASTIERA BLUETOOTH ESTERNA

Con Connect 12, è possibile digitare e navigare usando la tastiera Bluetooth.

LA TASTIERA HUMANWARE

Nonostante qualsiasi tastiera Bluetooth funzioni, suggeriamo di usare la tastiera HumanWare mostrata sotto.

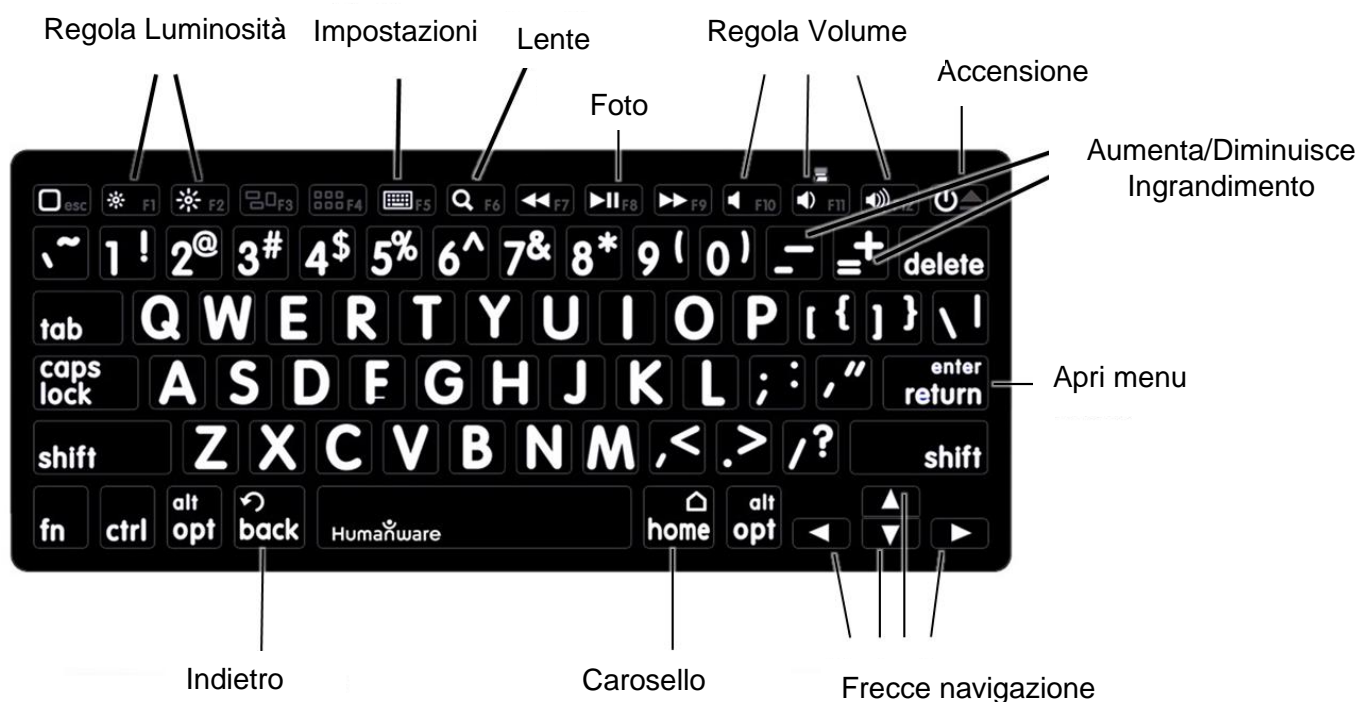

Uno dei vantaggi dell'uso della tastiera HumanWare è che tutti i tasti sono con caratteri ingranditi, facili da leggere. Inoltre le icone dei comandi più utilizzati del software Prodigy sono stampati sulla tastiera, per ricordare rapidamente la funzione dei tasti.

COLLEGARE UNA TASTIERA BLUETOOTH

Per collegare la tastiera Bluetooth a Connect 12:

- Assicurarsi che la tastiera Bluetooth sia accesa.

- Accedere alle Impostazioni generali facendo un tocco sull'icona Imposta nel menu Carosello.
- Selezionare e entrare nel sottomenu Sistema.
- Selezionare e entrare nel Setup del Bluetooth.
- Bluetooth è disattivo come impostazione predefinita. Attivarlo facendo un tocco sulla voce Bluetooth nel menu. Dopo qualche secondo, altri elementi appariranno nel menu e il Connect 12 sarà visibile da altri dispositivi.
- Selezionare e entrare nel sottomenu Dispositivi.
- Selezionare la tastiera Bluetooth e fare un tocco sullo schermo.
- Fare un tocco su Connetti.
- Il Connect 12 mostrerà un numero di PIN. Digitare questo numero sulla tastiera Bluetooth, quindi premere INVIO.
- La tastiera Bluetooth è ora accoppiata con il Connect 12 e pronta all'uso.

CAPITOLO 9: ACCEDERE AD ANDROID

Connect 12 permette di accedere alle applicazioni di Android. HumanWare fornisce una assistenza limitata per Android e le sue applicazioni.

Android è accessibile dalle Impostazioni nel menu Carosello. Fare un tocco sull'icona Imposta e scorrere verso il basso per selezionare Accedi ad Android. È possibile anche accedere ad Android posizionando e tenendo 4 o 5 dita sullo schermo contemporaneamente. Questo gesto è disponibile ovunque in Connect 12. Per tornare a Prodigy quando siete in Android, selezionare l'icona Prodigy:



Creare un nuovo Profilo Utente

Connect 12 permette di creare Profili Utenti multipli.

Per aggiungere un nuovo Profilo Utente:

- Premere e tenere premute 4 o 5 dita sullo schermo. Apparirà la schermata home di Android. Scorrere verso l'alto e apparirà una pagina che visualizza tutte le app di Android.

- Dalla pagina App, selezionare Impostazioni.
- In Impostazioni, selezionare Utenti.
- Selezionare Aggiungi Utente o Profilo.
- Selezionare l'opzione Utente– Gli utenti hanno applicazioni e contenuti personali e fare un tocco su OK.
- Premere sull'opzione Configura Utente che apparirà sullo schermo.
- Seguire le istruzioni di Android per completare il Profilo Utente.

CAPITOLO 10: MENU AIUTO

L'icona più a destra del menu Carosello è il menu Aiuto, dove è possibile trovare utili video che mostrano come utilizzare il Connect 12. Il menu Aiuto è rappresentato da un'icona con un punto di domanda:



Nel menu Aiuto sono presenti le seguenti opzioni:

Tutorial su YouTube: per accedere a materiale utile per l'uso di Connect 12, come *webinar* e molti tutorial. Assicurarsi di controllare periodicamente per vedere se ci sia qualche novità.

Commenti/Feedback: per recensire il Connect 12 e suggerire come migliorarlo in futuro.

CAPITOLO 11: RICARICA TABLET

Ottimizzare l'operatività:

- In una situazione lavorativa, nella quale si utilizza il tablet in modo discontinuo, è possibile attivare la modalità Standby premendo il pulsante di accensione. Lo schermo si spegnerà.
- Riattivare il tablet premendo il pulsante di accensione.
- Se non si utilizza il tablet per qualche giorno, raccomandiamo di premere e tenere premuto il pulsante di accensione e selezionare Spegnimento.

Ricarica della batteria:

Fare un tocco sul pulsante Imposta per accedere al menu e per visualizzare il livello di batteria. Scorrere verso l'alto nel menu Impostazioni fino alla prima voce dell'elenco per vocalizzare il livello di carica (la voce deve essere attiva nelle Impostazioni).

IMPORTANTE: Usare sempre alimentatore e cavo forniti con Connect 12. Altri alimentatori potrebbero non ricaricare, non funzionare correttamente o anche danneggiare il tablet.

IMPORTANTE: Il tablet inizia a scaldarsi durante la ricarica. Non ricaricare il tablet vicino a una fonte di calore.

IMPORTANTE: Non chiudere lo stand pieghevole durante la ricarica, perchè si potrebbe danneggiare il cavo o il tablet.

Per ricaricare la batteria:

- Collegare il cavo USB alla porta USB-C e collegare ad una presa usando l'alimentatore fornito.
- Una ricarica completa richiede circa 4 ore.

Precauzioni per la sicurezza nell'uso della batteria:

- Non disassemblare o modificare la batteria.
- Potrebbe esserci il rischio di surriscaldamento, fuoco o esplosione se la batteria viene gettata nel fuoco, viene riscaldata, prende dei colpi o viene a contatto con l'acqua.

CAPITOLO 12: RICARICA TELECAMERA

La telecamera ha una batteria con un'autonomia di 4 ore e potrebbe essere necessario ricaricarla.

Nota: Potrebbe essere necessario l'aiuto di una persona vedente per ricaricare la telecamera. Per ricaricare la telecamera:

- Inserire con cautela il connettore micro USB nell'apposita porta.
- Inserire l'altra estremità del cavo nel blocco di ricarica e quindi in una presa di corrente.
- L'indicatore di carica è arancione quando la telecamera si sta caricando e diventa verde quando la batteria è completamente carica.

CAPITOLO 13: AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Configurare il vostro Wi-Fi

Prima di iniziare l'aggiornamento del software, occorre configurare la rete Wi-Fi.

- Fare un tocco sull'icona Imposta nel menu Carosello.
- Scorrere per selezionare Sistema e fare un tocco su di esso.
- Fare un tocco per aprire Wi-Fi Setup.
- Selezionare Reti Wi-Fi e selezionare la rete alla quale volete connettervi.
- Fare un tocco su Connetti. Una tastiera apparirà sullo schermo. Digitare la password e fare un tocco sul pulsante blu. Quindi, fare un tocco su Connetti.

Aggiornamento Automatico

Quando il Wi-Fi è configurato, Connect 12 controllerà automaticamente gli aggiornamenti ogni settimana.

Se ci fosse un aggiornamento disponibile, Connect 12 avviserà e chiederà se si desidera aggiornare il dispositivo. Quando ciò accade:

- Fare un tocco su Installa per installare l'ultimo aggiornamento disponibile. Il Connect 12 mostrerà lo stato del download.
- Una nuova finestra apparirà, che dirà che il software ora è aggiornato. Fare un tocco su OK per tornare a Prodigy.

Aggiornamento Manuale

In alcune occasioni, si vorrà aggiornare Prodigy manualmente:

- Accedere a Imposta dal menu principale, quindi selezionare Sistema.
- Per iniziare un aggiornamento del software update, selezionare Aggiornamento Software e fare un tocco su di esso.
- Connect 12 verificherà se il software è aggiornato oppure se un aggiornamento è disponibile.
- Se un aggiornamento è disponibile e si desidera installarlo, fare un tocco su Installa. Se si desidera annullare, fare un tocco su Annulla.
- Se si sceglie di installare l'aggiornamento, Connect 12 scaricherà l'aggiornamento e mostrerà il progresso del download.
- Apparirà una nuova finestra, che indica che il software è aggiornato. Fare un tocco su OK per tornare a Prodigy.

Note di rilascio

Per visualizzare le note di rilascio del software Prodigy:

- Accedere a Imposta dal Menu Principale, quindi selezionare Sistema.
- Selezionare Aggiorna Software.
- Selezionare Note di Rilascio, se disponibili.

CAPITOLO 14: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se lo schermo è vuoto:

- Diminuire l'ingrandimento fino al livello minimo.
- Il tablet potrebbe essere spento o in Modalità Standby.

Se i colori sono difficili da individuare:

- Controllare se la luce ambientale sia sufficiente.
- Scegliere un contrasto o una combinazione di colori differenti nelle Impostazioni.
- Regolare la luminosità nelle Impostazioni.

Se c'è un forte riflesso:

- Ridurre il livello di luminosità nelle Impostazioni.
- Ridurre gli effetti della luce esterna.
- Se l'immagine acquisita è troppo luminosa o irregolare, spegnere la luce dal pulsante a Bandiera e fare una nuova foto.

Se l'immagine o il testo non sono a fuoco:

- Acquisire nuovamente l'immagine, mettendola bene a fuoco.
- Tenere ben ferma la telecamera mentre si fa la foto.
- Accertarsi che il tablet sia spento e pulire le luci a LED e la superficie della telecamera sul retro con un panno pulito.

Se la lettura è incomprensibile:

- Assicurarsi che la voce impostata sia la stessa del documento. Modificarla nelle Impostazioni, se necessario.

Se il tablet non risponde:

- Assicurarsi che la batteria sia carica. Ricaricarla se necessario.

Altri problemi:

- Ripristinare le impostazioni di fabbrica nel menu di Prodigy. Questo causerà la perdita delle impostazioni preferite in Prodigy.

Fare un reset completo del sistema Android

Attenzione! Tutte le precedenti impostazioni e i dati personali andranno persi!

IMPORTANTE: Si raccomanda di rimuovere dal tablet ogni account Gmail salvato prima di resettare le impostazioni Android, poichè non sarà più possibile farlo dopo il reset del sistema. La rimozione degli account salvati dopo il reset necessita un intervento da parte di HumanWare, che richiederebbe dei costi.

Per rimuovere l'account Gmail salvato:

- Aprire le **Impostazioni di Android** e andare in **Password & account**.
- Fare un tocco sull'account che deve essere rimosso.
- Fare un tocco su **Rimuovi account**, quindi confermare la rimozione

Per fare un reset completo del sistema Android:

- Aprire le **Impostazioni di Android** e andare in **Sistema**.
- Fare un tocco su opzioni Reset, quindi su Cancella tutti i dati (reset fabbrica).
- Confermare la cancellazione di tutti i dati.

Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il distributore per l'assistenza.

Servizio clienti per l'Italia:

SUBVISION S.r.l.

Via Giovanni da Procida, 6

20149 Milano

tel. +39 02 799 341

assistenza@subvisionmilano.com

Customer support

For customer support, please contact the HumanWare office nearest you or view our Website at:

www.humanware.com

North America: 1 (800) 722-3393

support@humanware.com

Europe: (0044) 1933 415 800

eu.support@humanware.com

Australia / Asia: (02) 9686 2600

au.sales@humanware.com

**ACCD-0313
REV 02**


Humanware™
see things. differently.

**ACCD-0171
REV 05**