


Guida rapida MANO EDU XL

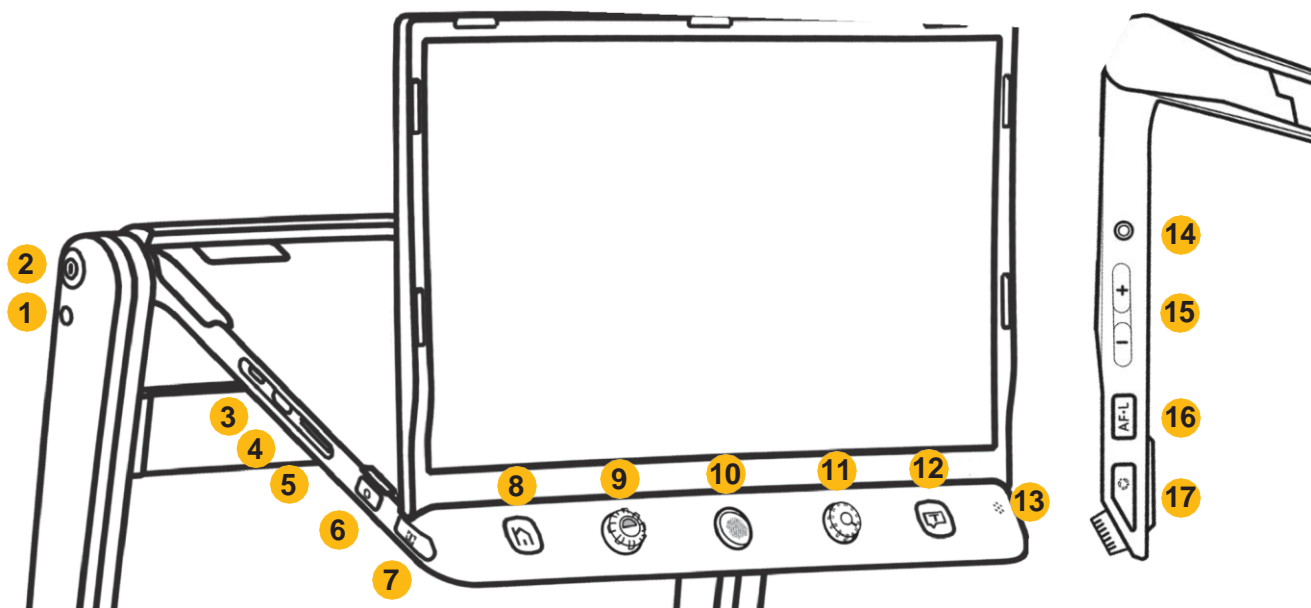

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Presa di ricarica | 7) Ausili per l'orientamento | 13) Microfono |
| 2) On/Off | 8) Menu iniziale/principale | 14) Presa per cuffie/altoparlanti |
| 3) Ingresso HDMI | 9) Modalità colore | 15) Volume +/- |
| 4) Uscita HDMI | 10) Joystick | 16) Autofocus |
| 5) Slot per scheda SD | 11) Ingrandimento | 17) Immagine fissa |
| 6) Cambio di telecamera | 12) Funzione di lettura ad alta voce | |

- A** Tenere la piastra di base con una mano e ripiegare il supporto.
- B** Regolare il display in una posizione di visione confortevole e, a scelta, sollevarlo lateralmente e regolarlo verticalmente.
- C** Estrarre la telecamera ambiente e ruotarla nella direzione desiderata.



Guida rapida MANO EDU XL

Funzionamento in modalità di ingrandimento e menu			
	Premere brevemente il pulsante: Visualizzare il livello di carica della batteria		Tenere premuto il pulsante: Accensione/spegnimento/standby
	Premere brevemente il pulsante: Mostra/nasconde la barra dei menu		Tenere premuto il pulsante: Aprire il menu
	Ruotare la manopola: Commutare tra le diverse combinazioni di colori		Premere il cursore: Cambia tra il colore vero e l'ultimo colore falso
	Navigazione orizzontale e verticale nell'immagine ingrandita, navigazione nella galleria di immagini, impostazione delle dimensioni e della posizione del righello/copertina		
	Ruotare il comando: Modifica dell'ingrandimento		Cursore di stampa: Ricerca di sezione nell'immagine non ingrandita
	ingrandire: Allontanare le dita dal display		ridurre al minimo: avvicinare le dita
	Spostare l'immagine ingrandita avanti e indietro con il dito.		
	Premere brevemente: Cambia la visuale della telecamera e la suddivisione dello schermo		
	Premere brevemente il pulsante: Passare dal righello alla copertina		
	Premere brevemente il pulsante: visualizzazione dell'immagine fissa		Tenere premuto il pulsante: salvare l'immagine fissa
	Premere brevemente: Avvio della lettura ad alta voce (sezione dello schermo corrente) pressione lunga: avvio della lettura ad alta voce (pagina A3)		nei menu e nelle gallerie: Premere brevemente: Conferma la selezione pressione prolungata nelle gallerie: Selezione multipla
	nei menu e nelle gallerie: toccare un'icona con il dito per selezionarla		
Funzionamento in modalità di lettura ad alta voce			
	Premere brevemente: Mostra/nasconde la barra dei menu pressione prolungata: Esce dalla modalità di lettura ad alta voce		Ruotare la manopola di controllo: Modifica dell'ingrandimento Premere la manopola di controllo: Zoom out
	Passare dalla modalità immagine a quella testo		Segmentazione del testo on/off
	Avvio/pausa della lettura ad alta voce		indietro/avanti per segmento/registro
	Impostazione della velocità di lettura		in modalità immagine: salvare l'immagine in modalità testo: salvare il testo