


Guida rapida MANO EDU lite

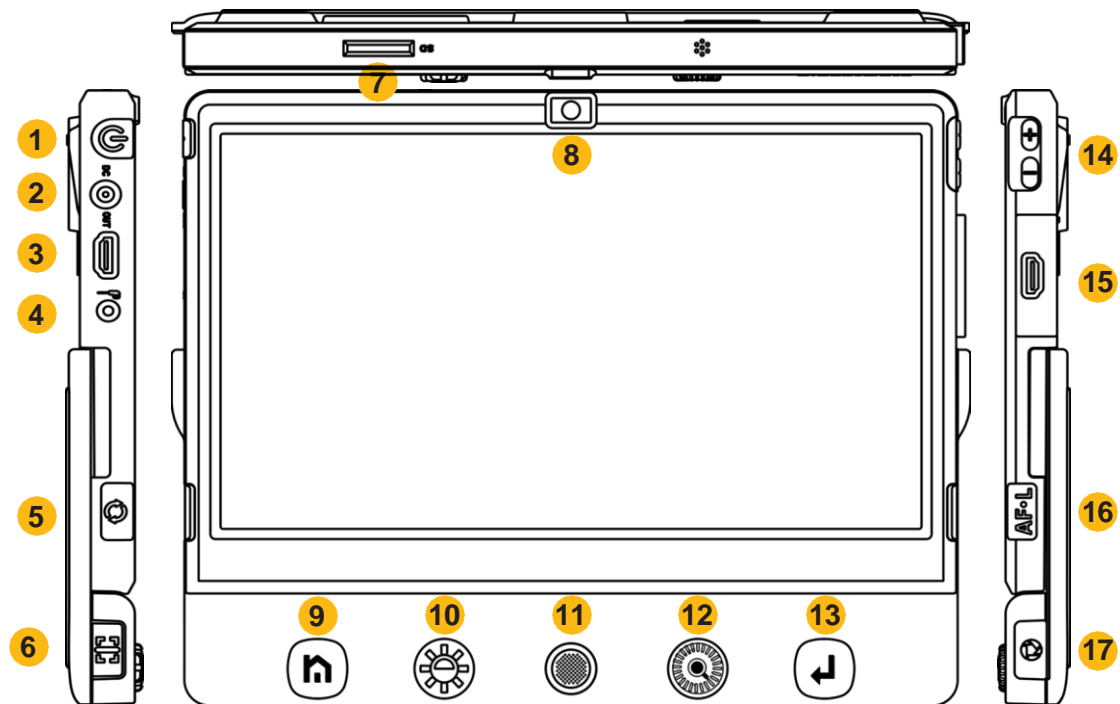

- 1) Acceso/spento
- 2) Presa di ricarica
- 3) Uscita HDMI
- 4) Presa per cuffie/altoparlanti
- 5) Cambio telecamera

- 6) Ausili per l'orientamento
- 7) Slot per schede SD
- 8) Fotocamera frontale
- 9) Menu principale
- 10) Modalità colore
- 11) Joystick

- 12) Ingrandimento
- 13) Pulsante di invio
- 14) Volume +/-
- 15) Collegamento della telecamera ambiente
- 16) Autofocus
- 17) Immagine fissa

Estrarre il supporto e posizionare il dispositivo sul materiale di lettura.



Inserire il braccio della telecamera nell'attacco sul lato destro del dispositivo.



Guida rapida MANO EDU lite

Telecamera in camera:

- Ruotare la marcatura grigia in avanti
- Il braccio della telecamera punta dritto verso l'alto
















Telecamera per documenti:

- Ruotare lateralmente la marcatura grigia fino a quando la marcatura sul giunto articolato è visibile
- piegare con cautela il braccio della telecamera di lato



Funzionamento in modalità di ingrandimento e menu

	Premere brevemente il pulsante: Visualizza il livello di carica della batteria	Tenere premuto il pulsante: Accensione/spegnimento/standby
	Premere brevemente il pulsante: Mostra/nasconde la barra dei menu	Tenere premuto il pulsante: Aprire il menu
	Ruotare il cursore: Passare da una combinazione di colori all'altra	Premere il cursore: Cambia tra il colore vero e l'ultimo colore falso
	Navigazione orizzontale e verticale nell'immagine ingrandita, navigazione nella galleria di immagini, impostazione delle dimensioni e della posizione del righello/copertina	
	brevemente nei menu e nelle gallerie: Conferma la selezione	pressione prolungata nelle gallerie: Selezione multipla
	nei menu e nelle gallerie: toccare un'icona con il dito per selezionarla	
	Ruotare il comando: Modifica dell'ingrandimento	Cursore di stampa: Ricerca di sezione nell'immagine non ingrandita
	ingrandire: Allontanare le dita dal display	ridurre al minimo: avvicinare le dita
	Spostare l'immagine ingrandita avanti e indietro con il dito.	
	Premere brevemente il pulsante: Commutazione tra telecamera interna/esterna	 nella barra dei menu: Passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore
	Premere brevemente il pulsante: Passa dal righello alla copertina	
	Premere brevemente il pulsante: visualizzare/chiudere l'immagine fissa	Tenere premuto il pulsante: salvare l'immagine fissa